



FUTURO™ NACKSTÖD

09027



VENTILERANDE
MATERIAL

Ger komfort och stöd till stel eller skadad nacke.

PERFEKT FÖR:

Klämda nerver eller stelhet i nacke, komfort efter whiplash-skada, eller enligt din läkares instruktioner.

VIKTIGA FUNKTIONER:


- 1 Justerbar för både omkrets och längd för skräddarsydd passform.
- Bekvämt och lämpligt för användning dag eller natt.

STORLEK:



Artikel Nummer	CM
09027	Omkrets: 27.9-50.8 Höjd: 6.35-12.7

ANVÄNDNING:

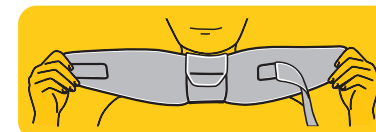

För att placera stödet, håll med båda händer i den mellersta hakremmens flik och rikta den bort från dig. Tag karborrebandets krokdel i höger hand riktat mot kragens "utsida". Placera kragen vid nackens framsida med hakremmen centrerat under hakan.



Linda kragens vänstra ände runt nackens baksida och fäst på den motsatta änden.



Sträck sedan kardborrebandets mjuka del från den vänstra sidan tills det överlappar och sitter stadigt på krokdelen. Justera kardborrebanden tills passformen är stabil men ändå bekväm.



Medan kragen hålls stadigt på plats, lossa på hakremmens flik. Dra åt eller lossa på hakremmen tills kragen sitter bekvämt men ett stadigt stöd under hakan. Fäst karborrebandet igen.

Avsedd användning: Vid användning enligt din läkares instruktioner: klämda nerver eller stelhet i nacken, komfort efter whiplash-skada.

Material: Polyuretan, Modal akryl, Nylon, Bomull, Polyester.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

