



FUTURO™ COLLARÍN CERVICAL

09027



SOPORTE
MODERADO



MATERIAL
TRANSPIRABLE

Ofrece comodidad y sujeción a cuellos rígidos y lesionados.

IDEAL PARA:

Utilizar de acuerdo con las indicaciones del médico: pinzamientos o rigidez cervical; más comodidad tras sufrir un latigazo cervical.

CARACTERÍSTICAS:


- 1 Perímetro y altura regulables para un ajuste personalizado.
- Cómodo para utilizar de día o de noche.

TOMAR LA MEDIDA:



CÓDIGO NACIONAL	CM
158753.4	Circunferencia: 27.9-50.8 Altura: 6.35-12.7


CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:

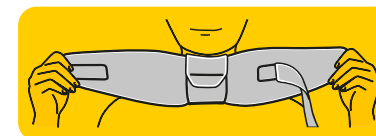

Para colocar el collarín, sostenerlo con ambas manos con la solapa del cierre de la barbilla mirando hacia afuera y el cierre lateral en la mano derecha, mirando hacia el exterior del collarín. Colocar el collarín en la parte delantera del cuello, centrando el cierre de la barbilla bajo la barbilla.



Pasar el extremo izquierdo del collarín hacia la parte posterior del cuello y asegurar con el otro extremo.

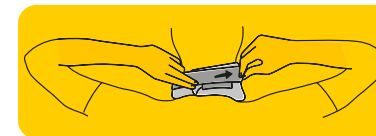

Pasar la tira suave desde el lado izquierdo de modo que quede superpuesta y asegurar el cierre. Ajustar los cierres hasta conseguir una sujeción firme pero cómoda.



Sujetando el collarín con firmeza, soltar el cierre de la barbilla. Apretar o aflojar el cierre de la barbilla hasta que el collarín se ajuste con comodidad bajo la barbilla. Asegurar el cierre.

Uso previsto: Utilizar de acuerdo con las indicaciones del médico: pinzamientos o rigidez cervical; más comodidad tras sufrir un latigazo cervical.

Composición: Polyurethane, Modal Acrylic, Nylon, Cotton, Polyester.

Si siente malestar o dolor, o si esos síntomas persisten o aumentan, deje de utilizar el soporte y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

