



# FUTURO™ COLAR CERVICAL SUAVE

09027



MATERIAL  
RESPIRÁVEL

Proporciona conforto e ajuda a apoiar o pescoço rígido e lesionado.

## IDEAL PARA:

Quando utilizado como prescrito pelo seu médico: compressão dos nervos ou rigidez no pescoço; conforto após um traumatismo cervical.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Ajustável tanto no perímetro como em altura para um ajuste personalizado.
- Confortável para utilização de dia ou de noite.

## TAMANHOS:



| C.N.P   | CM                           |
|---------|------------------------------|
| 6174912 | Circunferência:<br>27.9-50.8 |
|         | Altura:<br>6.35-12.7         |

## COMO UTILIZAR:



Para aplicar, segure com as duas mãos, com a aba da tira central do queixo virada para fora e o fecho de gancho na mão direita, virado para o "exterior" do colar. Coloque o colar à frente do pescoço, com a tira do queixo centrada por baixo do queixo.



Enrole a extremidade esquerda do colar à volta da parte posterior do pescoço e fixe à extremidade oposta.



Em seguida, puxe a tira de pelo macio do lado esquerdo, de forma a sobrepor-se, e fixe com firmeza a tira de fecho de gancho. Ajuste os fechos até o ajuste ser firme e confortável.



Segurando o colar com firmeza, solte a aba da tira do queixo. Aperte ou solte a tira do queixo até o colar estar confortavelmente ajustado, mas com um suporte firme por baixo do queixo. Volte a fixar o fecho.

Utilização prevista: Quando utilizado como prescrito pelo seu médico: compressão dos nervos ou rigidez no pescoço, conforto após um traumatismo cervical.

Composição: Polyurethane, Modal Acrylic, Nylon, Cotton, Polyester.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

3M España, Sucursal em Portugal  
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA  
1990-138 Lisboa

