



FUTURO™ COLLARE CERVICALE MORBIDO

09027



MATERIALE
TRASPIRANTE

Offre comfort e aiuta a sostenere il collo rigido e lesionato.

IDEALE PER:

Utilizzare solo se prescritto dal medico: nervi compressi o tensione al collo; comfort dopo una lesione da colpo di frusta.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:


- 1 Regolabile in circonferenza e altezza per una vestibilità personalizzata.
- Comodo per l'uso diurno o notturno.

TAGLIA:



Codice Prodotto	CM
09027	Circumference: 27.9-50.8 Height: 6.35-12.7

COME INDOSSARLO:

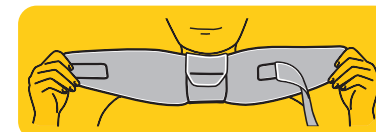

Per applicare il collare, tenerlo con entrambe le mani con la linguetta della fascia del mento centrale rivolta verso l'esterno e la chiusura nella mano destra rivolta verso l'esterno del collare. Posizionare il collare sulla parte anteriore del collo, con la fascia al centro sotto il mento.



Avvolgere l'estremità sinistra del collare attorno alla parte posteriore del collo e fissarla all'altra estremità.



Tirare la fascia morbida in tessuto dal lato sinistro in modo da sovrapporre e agganciare saldamente la fascia di chiusura. Regolare le chiusure per ottenere una vestibilità salda, ma comoda.



Tenendo il collare saldamente in posizione, sganciare la linguetta della fascia del mento. Stringere o allentare la fascia del mento fino a quando il collare non si adatta comodamente, ma saldamente sotto il mento. Riagganciare la chiusura.

Destinazione d'uso: Utilizzare solo se prescritto dal medico: nervi compressi o tensione al collo, comfort dopo una lesione da colpo di frusta.

Composition: Polyurethane, Modal Acrylic, Nylon, Cotton, Polyester.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionist sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Pioltello MI
www.3mitalia.it/futuro