



# FUTURO™ NISKATUKI

09027



HENGITTÄVÄ  
MATERIAALI

Helpottaa oloa ja auttaa tukemaan jäykkää tai vahingoittunutta niska.

## KÄYTTÖTARKOITUS:

Käytetään lääkärin ohjeen mukaisesti: hermopinteet ja jäykkyys niskassa, olon helpottaminen retkahdusvamman jälkeen.

## OMINAISUUDET:


- 1 Sekä ympärysmittaa että korkeutta voidaan säätää hyvän istuvuuden löytämiseksi.
- Sopii sekä päivä- että yökäyttöön.

## KOKO:



Tuotekoodi	CM
09027	ympärysmitta 27.9-50.8 korkeus 6.35-12.7

## TUEN ASETTAMINEN:

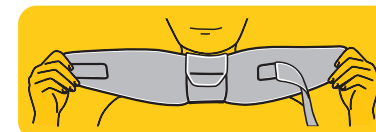

Pitele tukea molemmilla käsillä niin että keskimmäisen leukahihnan läppä on sinusta pois päin ja koukunauha on oikeassa kädessäsi osoittaen kauluksen ulkoreunalle. Aseta kaulus kaulallesi niin että leukahihna on keskellä leukaasi.



Kiedo kauluksen vasen reuna niskasi ympärille ja kiinnitä se kauluksen toiseen reunaan.



Vedä sitten vasemman reunan pehmeä nukkaliuska vastakappaleen yli ja kiinnitä koukunauha tukevasti. Säädä kiinnikkeitä, kunnes tuki asettuu lujasti mutta mukavasti.



Pitele kaulusta tiukasti paikallaan ja irrota leukahihnan läppä. Kiristä tai löysää leukahihnaa, kunnes kaulus asettuu mukavasti mutta tiukasti leuan alle. Kiinnitä sitten kiinnike uudelleen.

Käyttötarkoitus: Käytetään lääkärin ohjeen mukaisesti: hermopinteet ja jäykkyys niskassa, olon helpottaminen retkahdusvamman jälkeen.

Koostumus: polyuretaani, modaalinen akryyli, nailon, puuvilla, polyesteri.  
Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.  
3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Suomen 3M Oy,  
Keilaranta 6,  
02150 ESPOO

