



FUTURO™ CERVICALE KRAAG

09027



ADEMEND
MATERIAAL

Biedt comfort en ondersteuning bij een stijve of geblesseerde nek.

IDEAAL VOOR:

Bij gebruik zoals voorgeschreven door uw arts: afgeknelde zenuwen of stijfheid in de nek; verlichting na een whiplash.

HOOFDKENMERKEN:


- 1 In omtrek en hoogte verstelbaar voor een pasvorm op maat.
- Comfortabel bij dag - en nachtgebruik.

MAAT:



Referentie	CNK	CM
09027	2716074	Omtrek: 27.9-50.8 Hoogte: 6.35-12.7

DRAAGINSTRUCTIES:

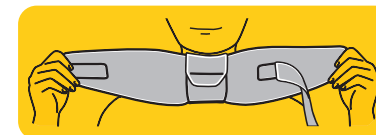

Houd in beide handen vast met de overslag van de kinriem van u af en het klittenband in uw rechterhand aan de buitenkant van de kraag. Breng de kraag aan op de hals en de kinriem in het midden onder uw kin.



Wikkel het linkeruiteinde van de kraag om uw nek en bevestig het aan het andere uiteinde.



Sla de zachte strook over de linkerkant om te overlappen en druk het klittenband stevig aan. Verstel het klittenband totdat de stabilisator strak maar comfortabel zit.



Terwijl u de kraag stevig op zijn plaats houdt, maakt u de overslag van de kinriem los. Haal de kinriem aan of maak deze losser totdat de kraag comfortabel maar met stevige steun onder de kin past. Herbevestig het klittenband.

Beoogd gebruik: Bij gebruik zoals voorgeschreven door uw arts: afgeknelde zenuwen of stijfheid in de nek, verlichting na een whiplash.

Samenstelling: Polyurethaan, Modacryl, Nylon, Katoen, Polyester.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

