



FUTURO™ HALSKRAVE

09027



MODERAT
STØTTE



ÅNDBART
MATERIALE

Giver komfort og hjælper med at støtte en stiv og skadet nakke.

VELEGNET TIL:

Når den bruges som ordineret af din læge: klemte nerver eller stivhed i nakken; komfort efter et piskesmæld.

NØGLEFUNKTIONER:


- 1 Justerbar både i omkreds og højde for brugertilpasset pasform.
- Behagelig at have på både om dagen og natten.

STØRRELSESVALG:



Varenr	CM
09027NORD	Omkreds: 27.9-50.8 Højde: 6.35-12.7

SÅDAN BRUGES DEN:

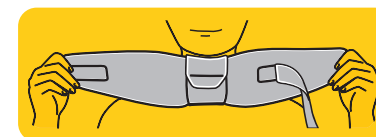

Nakkestøtten påsættes ved at holde den i begge hænder med flappen af den midterste hagestroop vendt væk fra dig og kroglukningen i højre hånd vendt mod kravens yderside. Anbring kraven på halsen med hagestroppen placeret centralt under hagen.



Sæt den venstre ende af kraven omkring nakken, og fastgør til den modsatte ende.



Træk herefter i den bløde fleecestroop fra venstre side, så den overlapper, og sæt den godt fast i kroglukningens stroop. Juster lukningerne, indtil den sidder fast, men alligevel føles behagelig.



Hold kraven på plads, og luk hagestroppens flap op. Stram eller løs hagestroppen, indtil kraven giver en fast støtte under hagen, men stadig er behagelig at have på. Sæt lukningen fast igen.

Tilsigtet anvendelse: Når den bruges som ordineret af din læge: klemte nerver eller stivhed i nakken, komfort efter et piskesmæld.

Materialesammensætning: Polyurethan, Modal Akryl, Nylon, Bomuld, Polyester.

Hvis du oplever ubehag eller smerter som følge af brug, og hvis smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

