



FUTURO™ HALSKRAVE

09027



MODERAT
STØTTE



PUSTENDE
MATERIALE

Gir komfort og støtte til stiv og skadet nakke.

IDEELL FOR:

Ved bruk slik som foreskrevet av lege: klemte nerver eller stivhet i nakken; støtte etter en nakkeslengskade.

NØKKELEGENSKAPER:


- 1 Justerbar i både omfang og høyde for tilpasningsmuligheter.
- Komfortabelt å bruke om dagen eller natten.

STØRRELSER:



Category Number	CM
09027	Omkrrets: 27.9-50.8 Høyde: 6.35-12.7

VED BRUK:

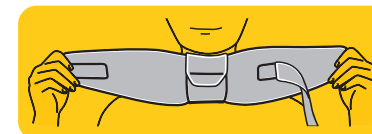

Hold i begge hender med fliken på den midtre hakestroppen vekk fra deg, og burrelåsen i høyre hånd vendt mot "utsiden" av kragen. Plasser kragen mot nakken, med hakestroppen sentrert under haken.



Vikle den venstre enden av kragen rundt baksiden av nakken, og fest til motsatt ende.



Trekk deretter den myke strimmelen fra venstre siden slik at den overlapper, og fest strimmelen med burrelås forsvarlig. Juster festene til det føles stramt, men komfortabelt.



Løsne fliken på hakestroppen mens du holder kragen fast på plass. Stram eller løsne hakestroppen til kragen sitter komfortabelt, men med fast støtte under haken. Sett deretter på festet igjen.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

3M

Tiltent bruk: Ved bruk slik som foreskrevet av lege: klemte nerver eller stivhet i nakken, støtte etter en nakkeslengskade.

Composition: Polyurethane, Modal Acrylic, Nylon, Cotton, Polyester.

Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.