



FUTURO™ DELUXE TOMMELSTABILISATOR

45841-42



PUSTENDE
MATERIALE

Tiltentkt bruk: Støtte for stiv, svak eller skadet tommel.

Composition: Urethane Foam, Polyester, Elastane, Plastic (Polyacetal), Nylon.
Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Stabiliserer og støtter sår, svak eller skadet tommel.

IDEELL FOR:

Hverdagsaktiviteter, generell støtte og håndarbeid

NØKKELEGENSKAPER:


- 1 To fester for tommelens stabilitet .
- 2 Justerbar stropp for håndledd gir ekstra støtte.
- 3 Tillater fri bevegelse av de øvrige fingrene.

STØRRELSER:


Category Number	Størrelse	CM
45841	S/M	Tommel: 5.1-6.4 Vrist: 12.7-19.1
45842	L/XL	Tommel: 6.4-7.6 Vrist: 17.8-22.9




VED BRUK:

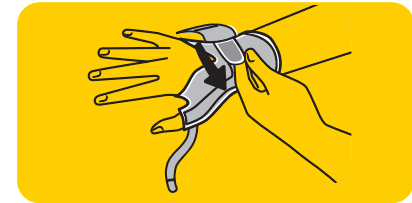

Åpne alle borrelåser og stikk tommelen inn i tommelhullet. Vikle stabilisatoren rundt hånden og sikre festet nederst på håndleddet.

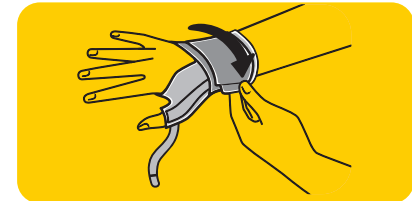

Vikle den lange stroppen rundt håndleddet og fest. Juster begge festene til det føles stramt, men komfortabelt.

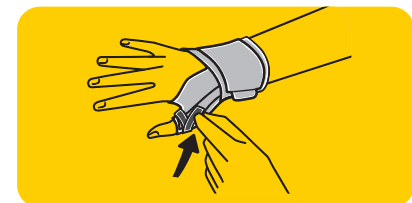

Vikle og fest tommelstroppen rundt tommelen for bedre passform, eller langs tommelroten for økt stabilitet.

Støttene kan justeres til anbefalt posisjon, eller fjernes helt for moderat støtte.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

