



# FUTURO™ COMFORT STABILISERENDE HÅNDEDDSTØTTE

47853-55

 MODERAT  
STØTTE



PUSTENDE  
MATERIALE

Tiltenkt bruk: Støtte for stivt, svakt eller skadet håndledd.

\*Leger anbefaler ofte bruk av en stiv håndleddstøtte ved behandling av karpaltunnelsyndrom og andre smertefulle håndleddstilstander.

Composition: Urethane Foam, Aluminium, Polyester, Nylon, Urethane Adhesive.

Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

**Stabiliserer og støtter sårt, svakt eller skadet håndledd.**

## IDEELL FOR:

Støtte ved vanlige skader som forstuinger, forstrekninger og symptomer på karpaltunnelsyndrom\*

## NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Reversibel splint for høyre eller venstre hånd.
- 2 Hylsesystem med tre stropper gir tilpasningsmuligheter.
- 3 Håndflatestabilisator bidrar til å gi moderat stabilitet.

## STØRRELSER:

Category Number	Størrelse	CM
47853	S	12.7-15.9
47854	M	15.9-19.0
47855	L	19.0-22.9



Passer venstre eller høyre håndledd.

## VED BRUK:



Åpne festene. Stikk hånden inn i støtten med metallsplinten langs håndflaten.



Lukk midtstroppen og deretter stroppene ved siden av.



Fest tommelstroppen på motsatt side av hånden. Juster alle stroppene til det føles stramt, men komfortabelt.



Til bruk på venstre hånd: Skyv splinten ut av sporet. Hold splinten klar, roter bandasjen og skyv splinten inn i motsatt sporåpning. Sett enden av splinten inn i lommen. Følg instruksjonene for bruk ovenfor.

3M Norge AS  
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm  
Tlf: 06384

**3M**