



# FUTURO™ WRAP AROUND ANKELSTØTTE

47874-76



PUSTENDE  
MATERIALE

Tiltenkt bruk: Støtte for stiv, sår eller skadet ankel.

**FORSIKTIG: Produktet inneholder naturgummilateks, som kan forårsake allergiske reaksjoner.**

Composition: Nylon, Rubber, Polyester, Spandex.

Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Gir støtte for stiv, sår eller skadet ankel.

## IDEELL FOR:

Generell støtte, spasering, løping, styrketrening, fotturer

## NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Justerbar stropp gir tilpasset passform og støtte.
- Løfter og støtter fotbuen.
- Får lett plass i sko.

## STØRRELSER:

Category Number	Størrelse	CM
47874	S	17.8-20.3
47875	M	20.3-22.9
47876	L	22.9-25.4



## VED BRUK:



Skyv foten inn i den elastiske delen. Se diagram for venstre ankel (for høyre ankel, snu støtten med innsiden ut).



Vri stroppen rundt ankelen som vist på bildene 2 og 3.



Fest borrelåsen på bandasjen, juster stroppen til ønsket komfort. Unngå å feste borrelåsen på vrangen, da dette kan forårsake irritasjon når du bruker sko.

3M Norge AS  
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm  
Tlf: 06384

