



# FUTURO™ PLANTAR FASCIITIS NATTSTØTTE

48507



FUKTRANSPORTERENDE



PUSTENDE  
MATERIALE

Støttebandasje til føtter med symptomer på plantar fasciitis.

## IDEELL FOR:

Perfekt som støtte mens du sover

## NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Utviklet for å holde foten komfortabelt ved anbefalt posisjon.
- 2 Komfortabel, justerbar passform.
- 3 Justerbar stropp for foten.

## STØRRELSER:

Category Number	CM
48507	20.3-38.1




Justerbare.  
Passer venstre eller høyre fot.  
Mål omkretsen rundt 5 cm over ankelbenet.

## VED BRUK:



Løsne festene på leggen og fotreimene. Før foten igjennom leggstroppen slik at støtten hviler oppå foten.

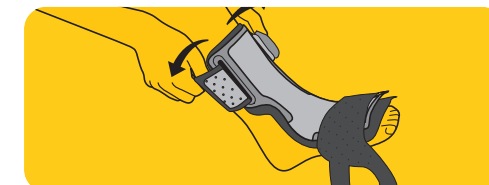

Juster posisjonen til støtten slik at leggstroppen er rundt 5 cm over ankelbenet. Juster leggstroppen fra begge sider slik at du får en fast, men komfortabel passform.



Midtstill den brede delen på fotreimen under fotballen. Lås festene på den brede enden av fotreimen til toppen av støtten.



Trekk tærne opp, vikle resten av reimene rundt foten og dra festene på plass.

Tiltenkt bruk: For å støtte foten, fotbuen og hælen.

**Kontraindikasjoner:** Dette produktet anbefales ikke for personer med diabetes, nevropati eller karsykdommer. Produktet er ikke beregnet for bruk når man bærer tungt. Kontakt lege før bruk.

Composition: Polypropylene, Polyurethane, Nylon, Polyester, Thermoplastic Elastomer, Spandex.

Hvis det oppstår ubehag eller smerter, vedvarende eller økende, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Norge AS  
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm  
Tlf: 06384

**3M**