



FUTURO™ TERAPEUTISK FOTBUESTØTTE

48510



Gir hjelp og støtte til føtter med symptomer på plantar fasciitis.

IDEELL FOR:

Perfekt for støtte i løpet av dagen under sports- og hverdagsaktiviteter

NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Tilpasset støtte med uttakbare hælfotinnlegg.
- Tynn profil – kan brukes med eller uten sokker og/eller sko.
- Gir kompresjon, støtte og demping.

STØRRELSER:

Category Number	CM
48510	21.6-30.5



Justerbare.
En støtte for hver fot.
Mål omkretsen på vristen.



PUSTENDE
MATERIALE

Tiltenkt bruk: For å støtte foten, fotbuen og hælen.

Composition: Thermoplastic Elastomer, Polypropylene, Nylon, Polyester, Polyurethane, Spandex.
Hvis det oppstår ubehag eller smerter, vedvarende eller økende, må du avslutte bruken og kontakte lege.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.


VED BRUK:



Åpne stroppen med borrelås og sett støtten slik at den sitter behagelig under fotbuen (fotikonene skal settes mot innsiden av buen).



Fest støtten på foten med krokfestet. Bruk krokfestet til å trekke støtten opp og rundt fotbuen.

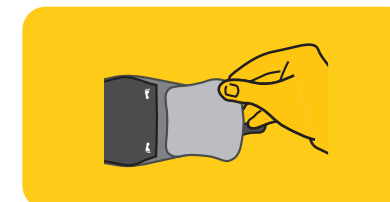

Fotsymbolet på stroppen skal stemme med fotsymbolet i innlegget.

Vi anbefaler at du bruker fotbuestøtten i 4 timer den første dagen og gradvis øker bruken med 1 til 2 timer per dag etter det. Hvis du føler at du trenger mer støtte etter 1 uke, bytter du til det mørkeblå innlegget og gjentar anbefalt gradvis brukstid. Fotbuestøtten bør brukes på begge føttene for å sikre riktig kroppsholdning.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

