

División Soluciones de Cuidado Oral
3M



Clinpro™ White Varnish

02/25/2016

Ficha Técnica



Descripción

Clinpro® White Varnish es un barniz blanco de fluoruro de sodio al 5%, que ayuda a la prevención de caries y remineralización del esmalte en los dientes al ponerse en contacto con saliva. Su contenido de 22,600 ppm de ión flúor y TCP (Tri Fosfato de Calcio) ayudan a la liberación prolongada de flúor, calcio y fosfato por 24 horas para brindar una máxima protección a los dientes.

Características y Beneficios

- Efecto protector contra el desgaste y la erosión ácida.
- Alivio inmediato a la hipersensibilidad cuando es aplicado sobre la dentina expuesta y la superficie radicular (24 horas).
- Proceso inmediato de remineralización con TCP después del contacto con saliva.
- Apariencia y textura biocompatibles para el paciente color blanco.
- Suministro en unidosis que asegura una aplicación higiénica para el paciente y disminución de desperdicios.
- Es un barniz que contiene flúor para ayuda en la prevención de caries.
- Ayuda a remineralizar el esmalte de los dientes.
- Crea una barrera física cubriendo y ocluyendo tóbulos dentinales.
- Contiene 22.600 partes por millón de flúor en un sistema solvente único.
- Está disponible en sabor de menta.
- Migra a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar.
- Contiene Xilitol.
- Se adhiere a los dientes a los cuáles se ha aplicado. Libera flúor, calcio y fosforo.

Composición:

Glicerol pentaeritritol éster de resina colofonia, N-hexano, Alcohol etílico, Fluoruro de sodio, Potenciador de sabor, adelgazante, saborizante de grado alimenticio, fosfato tricálcico modificado



Usos y aplicaciones

- Trata la hipersensibilidad de los dientes.
- Trata la dentina expuesta y la sensibilidad de la superficie radicular.
- Prevención de caries.

Instrucciones generales de aplicación:

1. La superficie del diente(s) a ser tratada debe ser mínimamente limpiada con un “cepillo de dientes”. No se requiere un tratamiento profiláctico.
2. Abra el paquete de la monodosis de barniz blanco Clinpro y dispense el contenido completo en la guía de aplicación redonda de la parte posterior de la bolsa de papel de aluminio o en uno de los adhesivos de guía de aplicación que se proporcionan en la caja.
3. **IMPORTANTE:** Use el pincel aplicador para mezclar bien el barniz blanco Clinpro ya que los componentes de todos los barnices de fluoruro de sodio pueden separarse durante el almacenamiento. Mientras mezcla, mantenga el material distribuido uniformemente dentro del círculo interno de la guía de aplicación.
4. Puede que sean suficientes una o dos cargas de cepillo de barniz blanco Clinpro para un cuadrante completo cuando se utiliza para una aplicación de rutina en visitas de revisión. Para tratamientos más extensos, consulte las cantidades máximas sugeridas en las recomendaciones de aplicación que se encuentran más adelante.
5. Utilice la guía de aplicación aplicando el material dentro de la mitad superior del círculo hacia abajo hasta la línea que indica la cantidad máxima.

Directrices para aplicaciones máximas:

Dosis de 0,25 ml (aplicar material desde la parte superior del círculo interior hasta la línea que indica 0,25 ml)

* Para usar en el tratamiento de pacientes con dentición primaria.

* Para usar en el tratamiento de pacientes que requieran un cobertura de superficie dental limitada.

Dosis de 0,40 ml (aplicar material desde la parte superior del círculo interior hasta la línea que indica 0,40 ml)

* Para usar en el tratamiento de pacientes con dentición mixta que requieran una cobertura de superficie dental extensa.

NO use esta cantidad para tratar pacientes con dentición primaria únicamente. Siga las directrices mostradas a continuación.

Dosis de 0,50 ml (aplicar material desde la parte superior del círculo interior hasta la línea que indica 0,50 ml)

* Para usar en el tratamiento de pacientes con dentición permanente que requieran una cobertura de superficie dental extensa.

NO use esta cantidad para tratar pacientes con dentición primaria únicamente. Siga las directrices mostradas a continuación.



NOTA: Si se utiliza la cantidad máxima (0,50 ml), no es necesario dispensar el barniz blanco Clinpro en la guía de aplicación. Puede usarse un bloque de mezcla u otra superficie.

6. El barniz blanco Clinpro se fijará a la dentición en presencia de saliva. Para obtener los mejores resultados, se debe retirar el exceso de saliva antes de la aplicación usando un material absorbente en la(s) superficie(s) del diente. Para evitar el endurecimiento prematuro del barniz sobre las cerdas, evite pasar el cepillo aplicador a través de la saliva acumulada. Aplique el barniz blanco Clinpro uniformemente en una capa fina sobre las zona(s) de tratamiento(s). Para zonas de superficie mayor, aplique el barniz blanco Clinpro con brochazos de barrido horizontal a través de los múltiples dientes.
7. Después de aplicar, indique al paciente que cierre la boca para que se endurezca el barniz blanco Clinpro. No se recomienda lavar ni aspirar inmediatamente después de aplicar. Puede ver una fina capa en los dientes. El paciente puede sentir una fina capa al rozar la zona tratada con la lengua.
8. El período de tratamiento para el barniz blanco Clinpro es de 4 horas como mínimo, preferiblemente toda la noche.
9. Durante el período de tratamiento, indique al paciente que debe evitar los alimentos duros o pegajosos, los productos con alcohol (bebidas, enjuagues bucales, etc.), las bebidas calientes, lavarse los dientes y utilizar seda dental.
10. Tras el período de tratamiento, el paciente puede retirar el barniz blanco Clinpro al cepillar y pasar la seda dental, o puede esperar hasta que la capa se desgaste de forma natural (dentro de las 24 horas).

Precauciones y advertencias

CONTRAINDICACIONES: Estomatitis y gingivitis ulcerosas

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Guardar lejos de / chispas / llamas al descubierto / superficies calientes. - No Fumar. No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lávese completamente después del manejo. Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar el contacto con agentes oxidantes (ej. cloro, ácido crómico, etc.). Utilice equipo de protección personal (guantes, mascarillas, etc.) según se requiera. Para minimizar el riesgo de ignición, determinar las clasificaciones eléctricas aplicables para el procesar el uso de este producto y seleccione equipos específicos ventilación local para evitar la acumulación de vapores inflamables.

Almacenamiento y vida útil

Condiciones de almacenamiento:

Este producto ha sido diseñado para almacenarse y usarse a temperatura ambiente. La vida útil a temperatura ambiente es de 24 meses. Una temperatura ambiente continuamente superior a 27°C/80°F, o inferior a 10°C/50°F puede reducir la vida útil. Consulte la fecha de vencimiento en el envase externo.



Disposición final

Métodos de eliminación de residuos:

Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales. Producto en forma original Incinere el producto no curado en un incinerador aprobado para residuos peligrosos. Como alternativa de disposición, disponga el residuo del producto en instalaciones de residuos peligrosos autorizadas. Instrucciones especiales para eliminación Puesto que las regulaciones varían, consulte las normas aplicables o a las autoridades pertinentes antes de desecharlo.

EPA Número de Residuos Peligrosos (RCRA): D001 (Inflamable).

Notas:	Datos Técnicos:	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo no implican garantía alguna.
	Uso del producto:	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES
	Indemnizaciones:	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Límite de la responsabilidad:	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal. Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M



Avenida El Dorado No. 75-93
(571) 4161666 PBX
(571) 4161677 Fax
Bogotá

Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co
Contáctenos
email: 3mcontacto@mmm.com
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá
01-8000-113636 Resto del País