



Tegaderm™

Lösungen beim I.V. Management



3M™ Tegaderm™ Film Transparentverband

Produktbeschreibung

Tegaderm Film ist ein transparenter, steriler und elastischer Polyurethanfilm, der mit einem latexfreien, hypoallergenem Polyacrylatkleber beschichtet ist.

Anwendungsgebiete

Tegaderm Film kann zum Schutz und zur Abdeckung von Wunden und Kathetereinstichstellen verwendet werden. Er unterstützt als Sekundärverband die feuchte Umgebung bei der Wundheilung und das autolytische Debridement. Als Primärverband kann er zur Fixierung von Medizinprodukten wie zum Beispiel Venenverweilkanülen, zum Schutz gefährdeter Haut, als schützende Augenabdeckung und zur Abdeckung von Verbrennungen ersten und zweiten Grades verwendet werden. Er ist kein Ersatz für Nähte und andere primäre Wundverschlussmethoden.

Produktmerkmale

- Ist Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit
- Bietet eine effektive Barriere gegen externe Kontamination einschließlich Flüssigkeiten (wasserdicht), Bakterien, Viren* und Hefepilzen.
- Kann bis zu 7 Tage auf der Haut verbleiben
- Steril
- Frei von PVC, Kolophonium und Naturkautschuklatex
- Sanft zur Haut
- Leicht mittels Stretchtechnik zu entfernen
- Kann beim Duschen oder Baden getragen werden

*In-vitro-Tests belegen, dass der transparente Film des Verbands eine Barriere für Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer bildet, solange der Verband intakt ist.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1622W	rechteckig	4,4 × 4,4 cm	100 Stück	02094790	2992224	1639017	35.05.10.01.1
1623W	rechteckig	6 × 7 cm	100 Stück	02105513	*	1639023	35.05.10.01.1
1624W	rechteckig	6 × 7 cm	100 Stück	02097989	1155526	1008386	35.05.10.01.1
1626W	rechteckig	10 × 12 cm	50 Stück	02098411	1077619	1128707	35.05.10.03.1
1627	rechteckig	10 × 25 cm	20 Stück	02100361	1355610	2614083	35.05.10.04.1
1628	rechteckig	15 × 20 cm	10 Stück	02100378	2022916	1128713	35.05.10.05.1
1629	rechteckig	20 × 30 cm	10 Stück	02105542	1557124	1352190	35.05.10.05.1
1630W	oval	10 × 11,5 cm	50 Stück	02102880	2992230	4132678	35.05.10.03.1

* Produkt im Land nicht erhältlich

3M Medica Zweigniederlassung

der 3M Deutschland GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • 3Mmedica.de@mmm.com • www.3M.de/medicalsolutions

3M Österreich GmbH • Telefon +49 2131 14 48 18 • Medizin-at@mmm.com • www.3Maustria.at/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH • Telefon +41 44 724 90 90 • Innovation.ch@mmm.com • www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions