

Proteja su piel

Sin disminuir la eficiencia de su respirador tipo N95

Paso 1

Aplique 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor en presentación hisopo o toalla 1ml, sobre piel limpia y seca.

- Deje secar por 90 segundos.
- No usar alrededor o dentro de los ojos.



Paso 2

Coloque el respirador tipo N95, según indicaciones del fabricante.



Paso 3

Verifique el sellado de su respirador tipo N95, según indicación del fabricante.



3M no recomienda el uso de cremas densas, ungüentos, vaselinas, espumas de poliuretano, hidrocoloides u otros productos, ya que pueden interferir con el ajuste y sello adecuado de su respirador 3M tipo N95, disminuyendo la eficiencia y el nivel de protección otorgada por su elemento de protección respiratoria.