

3M**Cavilon™**

Skin Care Solutions



Protege tu piel mientras utilizas el Equipo de Protección Personal (EPI).

Eligiendo el producto para la protección de la piel.

El punto clave para determinar cómo ayudar a proteger la piel mientras se usa el EPI es asegurándonos que el producto de protección para la piel no interfiere con las funcionalidades del EPI. Esto significa escoger un producto para la protección de la piel que:

- ▶ No interfiera con el sellado del respirador y/o con el ajuste de otro EPI
- ▶ No se transfiera de la piel al EPI
- ▶ Proteja la piel de la fricción y la humedad (a prueba de agua)
- ▶ Sea transpirable, permitiendo que la humedad se evapore de la piel
- ▶ No requiera ser removida o lavada
- ▶ Tenga una baja probabilidad de provocar dermatitis

Debido a la posibilidad de interferir con el sellado y/o el proceso de filtrado de cualquiera de los respiradores 3M, 3M aconseja no utilizar vaselina, ungüentos, cremas espesas o apósitos como espumas de poliuretano e hidrocoloides.

**3M™ Cavilon™
Película
Barrera No
Irritante**



**Protector cutáneo
3M™ Cavilon™ Advanced***

Protección proactiva de la piel.

La 3M™ Cavilon™ Película Barrera No Irritante ayudará a proteger la piel sana de humedad y fricción y, si se usa apropiadamente, no debería esperarse que interfiera con el ajuste de los respiradores 3M.

Instrucciones para su aplicación

- 1 Use la toallita de espuma de 1mL o el aplicador de esponja 1mL.
- 2 Aplique el producto en la piel limpia y seca, sobre todas las áreas donde el respirador posiblemente ocasione fricción y/o donde la humedad pueda acumularse, por ejemplo, el puente de la nariz, las mejillas, la parte superior de las orejas o la frente, etc. Puede utilizarse en la cara, pero no debe usarse en ojos o en párpados.



- 3 Deje secar el producto completamente (espere por lo menos 90 segundos) antes de colocarse el respirador. Esto permite que el líquido se seque y los vapores se disipen. **Tras su aplicación, puede que note un olor mientras el ingrediente solvente se evapora.**
- 4 Se recomienda comenzar con la aplicación una vez al día. Si se produce una acumulación del producto, reduzca la frecuencia de aplicación por ejemplo a 3 veces por semana.
- 5 3M Cavilon Película Barrera No Irritante puede removerse con un removedor de adhesivo de grado médico.



Las personas que usan respiradores deben seguir siempre las instrucciones específicas de uso del modelo, incluyendo el cumplimiento de la verificación del sellado cada vez que se coloca el respirador.

Consulte el prospecto del producto (instrucciones de uso) para indicaciones completas e instrucciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias.

Proactivo ante la piel dañada.



El Protector cutáneo 3M™ Cavilon™ Advanced puede usarse para ayudar a proteger la piel lesionada, por ejemplo, las abrasiones causadas por fricción u otras lesiones superficiales de la piel.

Instrucciones para su aplicación

- 1 Se recomienda el aplicador de 0.7mL.
- 2 El producto puede aplicarse en áreas enrojecidas o en piel superficialmente lesionada, por ejemplo, el puente de la nariz, las mejillas, la parte superior de las orejas o la frente, etc. El producto no debe aplicarse en los ojos o cerca.
- 3 El producto debe aplicarse en una capa fina.




- 4 Deje secar el producto completamente (espere por lo menos 90 segundos) antes de colocarse el respirador. **Esto permite que el líquido se seque y los vapores se disipen. Tras su aplicación, puede que note un olor mientras el ingrediente solvente se evapora.**
- 5 Se recomienda comenzar con 2-3 aplicaciones por semana. Si el usuario nota la acumulación de producto, reducir la frecuencia de aplicación, por ejemplo, a 1-2 veces por semana.
- 6 El Protector cutáneo 3M™ Cavilon™ Advanced no requiere ser removido, pero puede removerse con un removedor médico de adhesivo que contenga hexametildisiloxano o silicona.

Nota

Si se usa el aplicador de 2.7mL, se recomienda seguir los siguientes pasos para minimizar el goteo o derrame de líquido durante su aplicación:

- 1 Abrir y tener el empaque cerca.
- 2 Active el aplicador y deje que la esponja se impregne.
- 3 Presionar la esponja del aplicador contra la solapa blanca del empaque para eliminar el exceso de líquido.

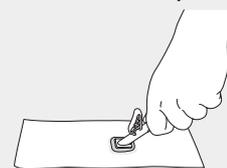

- 4 Luego, aplique como se indica.



Las personas que usan respiradores deben seguir siempre las instrucciones específicas de uso del modelo, incluyendo el cumplimiento de la verificación del sellado cada vez que se coloca el respirador.

Consulte el prospecto del producto (instrucciones de uso) para indicaciones completas e instrucciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias.

3M Iberia S.L.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid
España
0034 917 224 059

For more information visit:
www.3M.com.es/Covid

*Single-use only.
3M and Cavilon are trademarks of 3M Company.
© 3M 2020. All rights reserved. OMG90568.

