


Impregum Soft Consistencia Mediana para la técnica de impresión de un paso/monofásica.

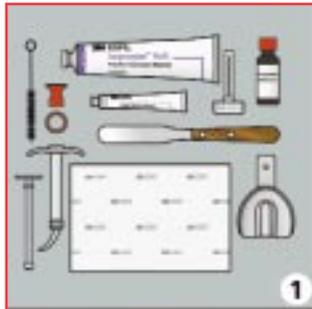


1. Prepare todos los instrumentos necesarios para una impresión con Impregum Soft.




2. Aplique adhesivo para poliéter en el porta-impresiones/cubeta.




3. Dispense cantidades iguales de pasta base y de catalizador sobre el block de mezcla. Para una arcada completa superior aplique una longitud promedio de 2.5 de cada pasta si es necesario. Para una arcada completa inferior es necesario un promedio de 2 longitudes.

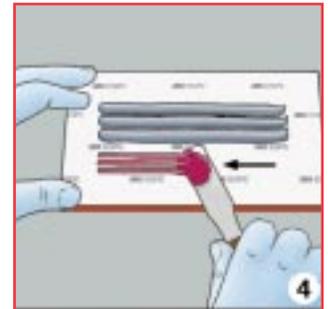


4. Tome la pasta catalizadora con la espátula elastomérica.

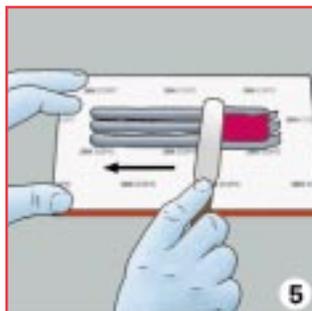


5. Aplique el catalizador sobre la pasta base.

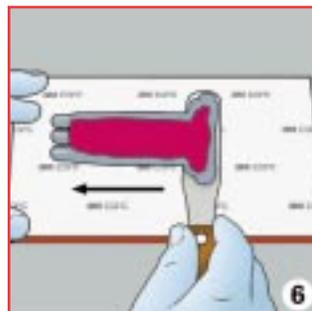


6. Tome la pasta base con la espátula elastomérica.

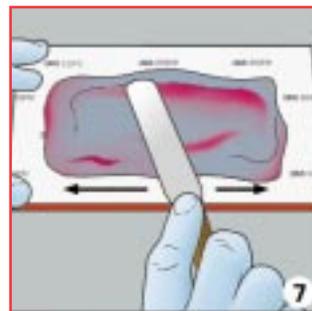


7. Mezcle en forma homogénea la pasta base y catalizador.

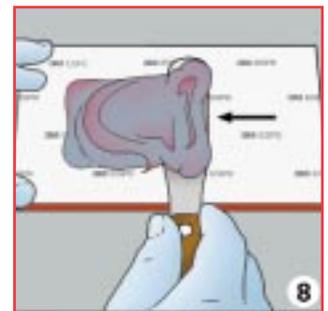


8. Tome la pasta mezclada casi por completo en forma homogénea.

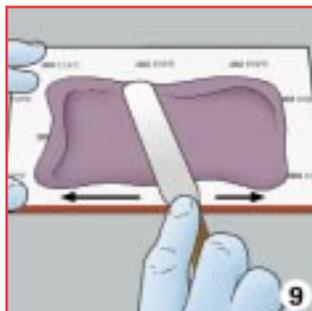


9. Extienda nuevamente la pasta mezclada casi por completo en forma homogénea.

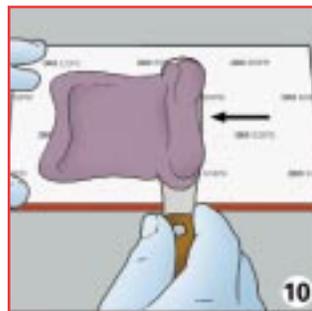


10. Tome con la espátula un poco de material para la jeringa elastomérica.

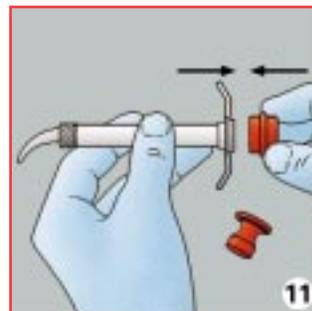


11. Coloque el dispositivo de llenado sobre la jeringa.

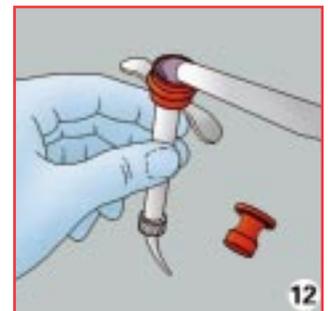


12. Coloque dentro del dispositivo de llenado el material completamente mezclado.

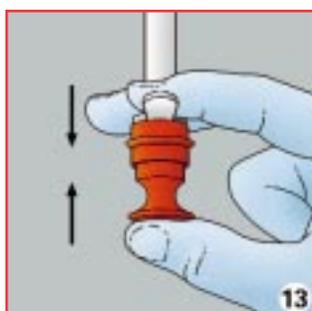


13. Presione el material dentro de la jeringa elastomérica con el dispositivo de avance de llenado.

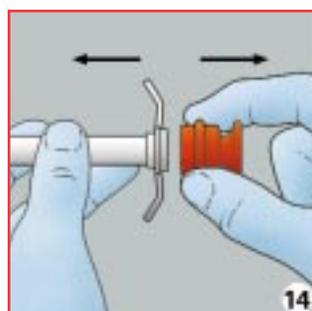

14. Remueva el dispositivo de llenado.

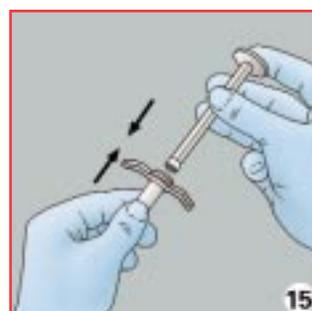

15. Inserte el émbolo dentro de la jeringa elastomérica.

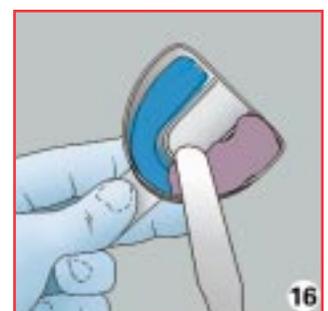

16. Llene el porta-impresiones/cubeta con el material mezclado.




17. Llene el porta impresiones/ cubeta.






18. Inyecte el material de impresión alrededor del diente.




19. Coloque el porta impresiones/ cubeta en la boca.

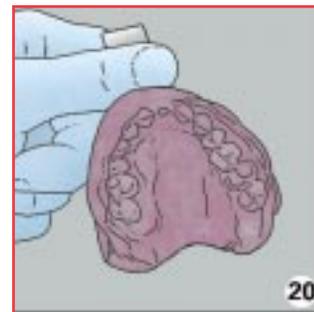

20. Impresión terminada.

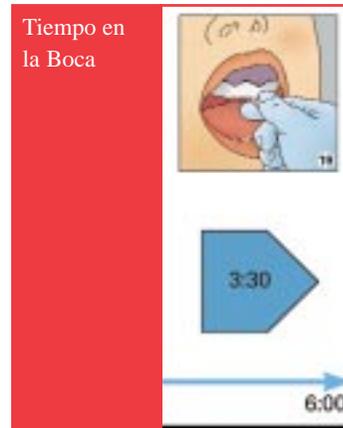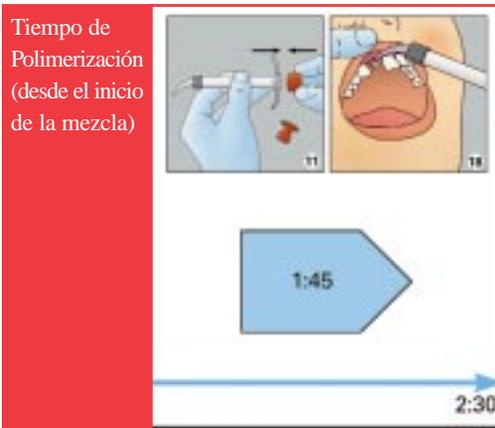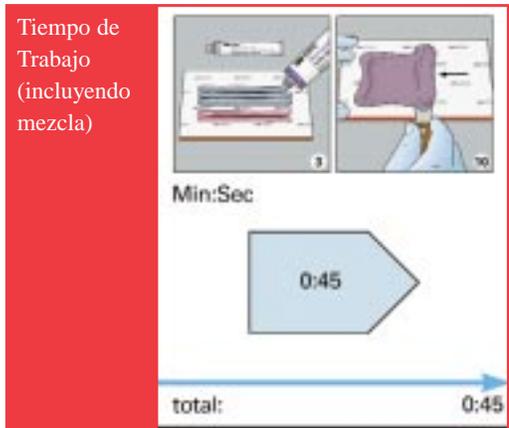

Impregum Soft Consistencia Pesada/Consistencia Liviana para la técnica de impresión de un paso/dos viscosidades simultáneas.

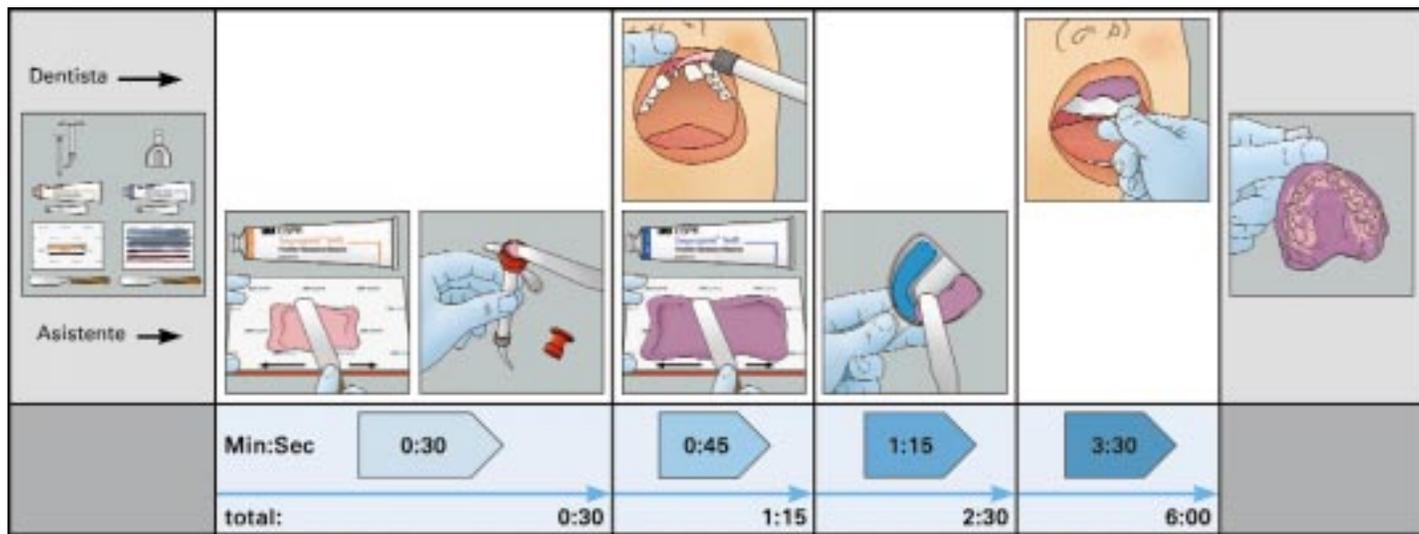

3M ESPE

Dental Products

3M Center
Building 275-2SE-03
St. Paul, MN 55144-1000

Por favor, lea las instrucciones para mayores informaciones y precauciones, así como también los datos sobre la garantía. 3M, ESPE e Impregum son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG. © 2002 3M 70-2009-3520-6

www.3MESPE.com/LA_dental