



NEW

クリンプロ™ ホワイトバーニッシュF

知覚過敏抑制材 保険適用

クリンプロ™ 製品シリーズに
フッ化物配合のコーティング材が新登場！

フッ化ナトリウム、リン酸三カルシウム (fTCP^{※1}) を含む知覚過敏抑制材です。

アメリカで
10年以上実績のある、
フッ化物バーニッシュ材
(知覚過敏抑制材)



※1. fTCPはフッ素の有効性を阻害しない有機物を配合したfTCPです。TCP(tricalcium phosphate)とは、リン酸三カルシウムの略称です。

フッ化ナトリウム、リン酸三カルシウム (fTCP) を

選べる3種類のフレーバー

チェリー、メロン、ミントの3種類のフレーバーから患者さんのお好みに合わせてお選びいただくことが可能です。




わたしは
「チェリー」で
お願いします。



個包装で衛生的

ブラシとバーニッシュ材が1つのパッケージに入っていることで、持ち運びが簡単。また、個包装で患者さんごとの使用が可能のため、医院、患者さんにとってとても衛生的な製品です。

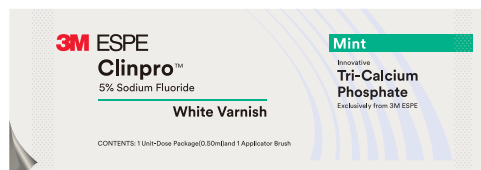



保管時の冷蔵不要

個包装だから感染の
リスクも少なくて
安心♪



水洗・乾燥不要のシンプルな使用方法

筆で塗布でき、塗布後、歯面の乾燥や洗口が不要なシンプルな使用方法です。
保管時の冷蔵も不要です。

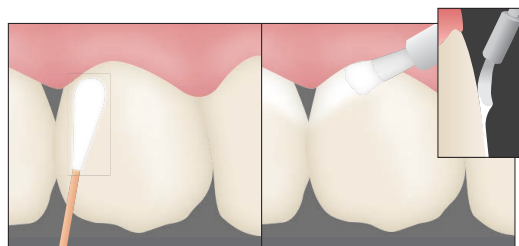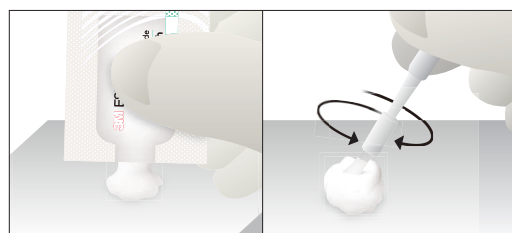

1. 歯面清掃後、パウチを開封し、全量を取り出す。
付属の applicator ブラシで均一になるまで
混和する。

2. 水分を除去して必要量を採取し、applicator
ブラシを用いて歯面に薄く塗布する。

塗られた感じは
するけど、そこまで
気にならないわ




水洗不要





乾燥不要

含む知覚過敏抑制材です

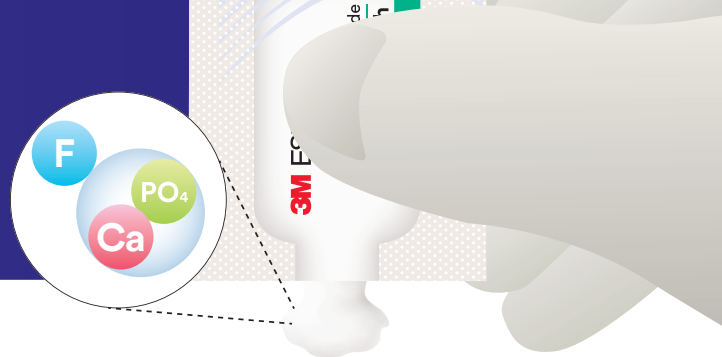

“滞留性”と“耐酸性”を併せ持つペースト

滞留性のあるフッ化ナトリウムを含むコーティングにより象牙細管を封鎖し、知覚過敏を抑制します。
また、フッ素を最大 24 時間継続的に放出し耐酸性が向上するため、歯面の表面硬さも向上します。

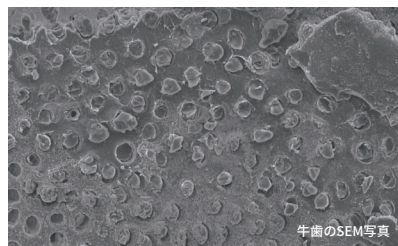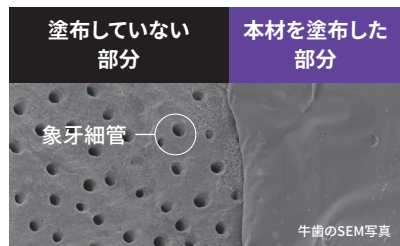


塗布した部分において、歯面の表面から取り除かれた後も象牙細管は封鎖されている

出典：3M 社内データ




Ca カルシウム PO₄ リン酸 F フッ素

フッ素の徐放量

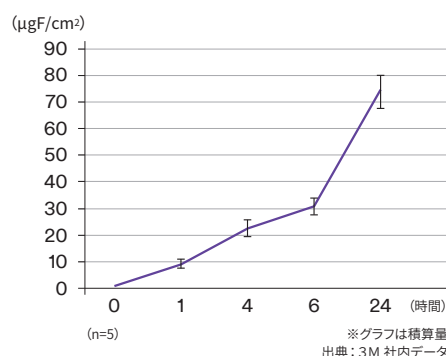


カルシウム、リンの徐放量

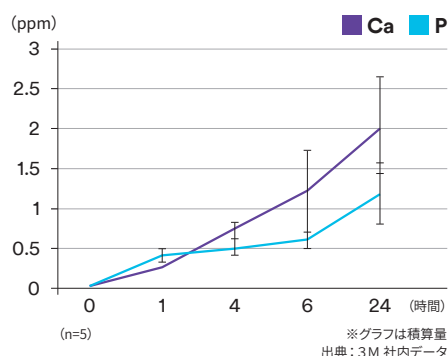

根面象牙質への耐酸性効果

牛歯根面象牙質を本品で処理し脱灰液に24時間浸漬したあとのピッカース歯面硬度

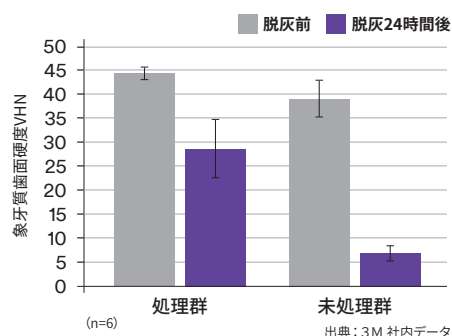

幅広い症例に適応

露出根面、初期う蝕、酸蝕傾向のあるう蝕リスクの高い部位などの知覚過敏にお使いいただけます。



露出した根面*



矯正ブラケットの周囲



萌出途中



酸蝕症



歯列不正 (叢生)

※象牙質や根面の露出原因

- ・加齢
- ・歯周病
- ・歯周外科治療後
- ・強すぎるブラッシング圧
- ・ブラキシズム
- ・補綴治療後 (マージン)
- ・鉤歯 など

口腔乾燥

写真提供：神奈川県 伊藤 直人 先生 (写真a, c, d, e)、歯科衛生士 土屋 和子 先生 (写真b)

クリンプロ™ ホワイト バーニッシュ F

25 個入り

内容：25個
(0.5ml・アプリケーターブラシ×各25個)

製品番号：12246C(チェリー)
12246L(メロン)
12246(ミント)

希望医院価格：9,500円

50 個入り

内容：50個
(0.5ml・アプリケーターブラシ×各50個)

製品番号：12247C(チェリー)
12247L(メロン)
12247(ミント)

希望医院価格：17,500円



う蝕管理プログラムの具体的な流れ

う蝕管理を継続するには、患者さんのご理解とご協力が不可欠です。
積極的にご協力いただけるよう、様々なコミュニケーションツールをご用意しました。



セルフケア製品

クリンプロ™ 歯みがき ペースト F1450

内容：90g
内装入数：6本
製品番号：8211(ソフトミント)、8212(シトラスミント)
希望医院価格：1,030円/本
参考患者価格：1,408円(税込)/本
※販売単位は1箱(6本入)です。

薬用歯みがき 医薬部外品 歯科医院専売品 フッ素濃度1450ppm
6歳未満にはお使いいただけません。

クリンプロ™ 歯みがき ペースト

内容：90g
内装入数：6本
製品番号：8251 DEN(ソフトミント)、8253(シトラスミント)
希望医院価格：950円/本
参考患者価格：1,298円(税込)/本
※販売単位は1箱(6本入)です。

薬用歯みがき 医薬部外品 歯科医院専売品 フッ素濃度950ppm

クリンプロ™ デンタル フロス 個装タイプ

内容：32本/袋
内装入数：3袋
製品番号：8263
希望医院価格：430円/袋
参考患者価格：594円(税込)/袋
※販売単位は1パック(3袋入)です。

プロフェッショナルケア製品

クリンプロ™ クリーニングペースト PMTC用

■1本
内容：50g×1本
製品番号：8241
希望医院価格：1,680円


■ダブルパック
内容：50g×2本
製品番号：8241W
希望医院価格：3,180円

クリンプロ™ シーラント

内容：シリンジ 1.2mL×1本
チップ×10個
製品番号：12627
希望医院価格：4,400円

クリンプロ™ XT バーニッシュ

内容：5g×1本
練板紙×1冊
製品番号：12248S
希望医院価格：9,500円

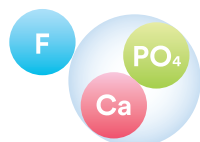

3M独自のfTCPテクノロジー

再石灰化に着目し、フッ素、カルシウム、リン酸を3M独自のfTCPテクノロジーにより同時配合に成功！
フッ化物とfTCPがそれぞれの歯の表面に接触し、フッ化物イオン濃度(フッ化物の効果)は維持されます。

※fTCPはフッ素の有効性を阻害しない有機物を配合したβTCPです。TCP(tricalcium phosphate)とは、リン酸三カルシウムの略称です。

販売名：クリンプロ ホワイト バーニッシュ F 認証番号：301AKBZX00060000 / 販売名：クリンプロ トゥース クリーム αs(ソフトミント フレーバー)、クリンプロ トゥース クリーム αc(シトラスミント フレーバー)(医薬部外品)
販売名：クリンプロ トゥース クリーム s(ソフトミント フレーバー)、クリンプロ トゥース クリーム c(シトラスミント フレーバー)(医薬部外品) / 販売名：クリンプロ クリーニングペースト PMTC用 届出番号：13B1X10109000259
販売名：クリンプロ シーラント 認証番号：222AKBZX00098000 / 販売名：クリンプロ XT バーニッシュ 認証番号：221AKBZX00082000

3M、クリンプロは、3M社の商標です。

※掲載の内容および希望医院価格は、2021年4月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜基本価格です。

Web

3M 歯科



スリーエム ジャパン株式会社

歯科用製品事業部

<https://www.3mcompany.jp/dental>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
DEN-1682-CJ (0421) PN/e.

3M コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00 / 月~金(土日祝年末年始は除く)
フリーダイヤルが繋がらない場合は、
03-6409-3157をご利用ください。