



# Cavilon™

Skin Care Solutions



## 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

### Produktbeschreibung

Cavilon Reizfreier Hautschutz ist eine klinisch geprüfte schnelltrocknende Flüssigkeit, die einen hauchdünnen, wasserdampfdurchlässigen, transparenten Acrylat-Terpolymerfilm auf der Haut bildet.

### Anwendungsgebiete

Schutz intakter und geschädigter Haut vor Flüssigkeiten und Reizstoffen (z. B. Stuhl, Urin, Wundexsudat, Trachealsekret, Klebstoffen), vor Reibung, vor Inkontinenz-Assoziierter Dermatitis (IAD), vor Nässe bei Intertrigo in Hautfalten, vor Hautschäden durch Pflasterklebstoffe sowie als Wundrandschutz und peristomaler Hautschutz.

### Eigenschaften

- Schützt zuverlässig bis zu 72 Stunden
- Alkoholfrei, kann auch auf geschädigter Haut schmerzfrei angewendet werden
- Atmungsaktiv, transparent und wasserfest
- Enthält keine Duft- und Konservierungsstoffe
- Einzigartige Peel open Verpackung zur sterilen Entnahme
- Gute Grundlage für Pflaster und klebende Verbände
- Hochwirksam und verträglich – klinisch geprüft

### Hinweise

- Haut muss trocken und fettfrei sein
- Nicht auf infizierter Haut (z. B. Mykose) verwenden
- Nicht gleichzeitig mit Cremes oder ähnlichen Substanzen verwenden (lösen den Schutzfilm auf)
- Gleichmäßig und einschichtig auftragen und mind. 30 Sekunden trocknen lassen
- Alle 2 – 3 Tage bzw. bei jedem Verbandwechsel erneuern

### Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	St./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇩🇪 Hilfsmittelnummer	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode
3343E	1 ml Schaumstoffapplikator	25	06916734	29.26.10.2013	2219010	1937186
3343E/10	1 ml Schaumstoffapplikator	10	06916711	29.26.10.2013	**	**
3343P	1 ml Schaumstoffapplikator	5	06916728	29.26.10.2013	2855668	2962803
3344E	1 ml Wipe	30	**	**	*	4794830
3345E	3 ml Schaumstoffapplikator	25	06916740	29.26.10.2013	2219027	4132715
3346E	28 ml Sprayflasche	12	06916763	29.26.10.2014	*	1937192
3346P	28 ml Sprayflasche	1	06916757	29.26.10.2014	2245705	3033431

🇩🇪 Außerklinischer Vertrieb durch Fresenius Kabi Deutschland GmbH

\*Produkt erhältlich, keine PZN Nummer verfügbar

\*\*Produkt im Land nicht erhältlich

**3M Medica Zweigniederlassung**

der **3M Deutschland GmbH** • Telefon +49 2131 14 48 18 • 3Mmedica.de@mmm.com • www.3M.de/medicalsolutions

**3M Österreich GmbH** • Telefon +49 2131 14 48 18 • Medizin-at@mmm.com • www.3Maustria.at/medicalsolutions

**3M (Schweiz) GmbH** • Telefon +41 44 724 90 90 • Innovation.ch@mmm.com • www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions