

Applikationsanleitung Tegaderm™ Absorbent Transparenter Hydroaktivverband



Befolgen Sie die Anleitungen Ihres Chirurgen zur Inzisionsüberwachung. Verwenden Sie dieses Dokument als Leitfaden dafür, was Sie beim Tragen des Verbandes erwartet. Wenden Sie sich mit Fragen zu Ihrer Inzision oder Ihrem Verband an Ihren Chirurgen.

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich sehen, wenn ich den Verband trage?

Ihr Verband besteht aus einem transparenten absorbierenden Acrylkissen mit einem wasserdichten Filmverband. Deshalb können Sie Ihre Inzision sehen. Wenn Sie den Verband tragen, kann das Acrylkissen mit Blut und Flüssigkeit behaftet sein.

Dies ist in Ordnung und bedeutet nicht, dass Sie den Verband wechseln müssen. Tegaderm Absorbent bietet eine ideale Umgebung zur Wundheilung.¹

Kann ich mit dem Verband duschen oder baden?

Ja. Sie können mit diesem Verband duschen, wenn er fest sitzt und sich die Ränder nicht abgehoben oder aufgerollt haben. Sie sollten jedoch nicht in der Badewanne baden oder sich in einem Whirlpool aufhalten, wenn Sie den Verband tragen.

Befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Chirurgen/Produktherstellers zum Entfernen des Verbandes:

Was kann ich erwarten, wenn ich den Verband trage?

Der Verband ist so konzipiert, dass er länger auf der Wunde bleiben kann als Sie dies vielleicht mit anderen Verbänden erlebt haben. Die nachstehenden Informationen helfen Ihnen zu verstehen, was Sie beim Tragen des Verbandes erwartet.

Wenn Sie Bedenken in Bezug auf Ihre Inzision oder den Verband haben, kontaktieren Sie Ihren Arzt.



Blasen

Blasen können auftreten. Sie entstehen beim Anschwellen des Acrylkissens, wenn Flüssigkeit absorbiert wird.


Belassen Sie den Verband.



Flüssigkeit im Acrylkissen oder ein rissiges Erscheinungsbild

Flüssigkeit oder ein rissiges Erscheinungsbild im Acrylkissen, die Ränder des Verbandes sind jedoch mit der Haut verbunden.

Belassen Sie den Verband.

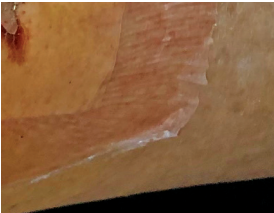

Aufgerollte Ränder

Die Ränder sind aufgerollt, doch der Verband und das Acrylkissen sind noch an Ort und Stelle. Dies ist in Ordnung und erfordert nicht unbedingt, dass der Verband befestigt werden muss.

Belassen Sie den Verband.



Flüssigkeit im Rand des Verbandes

Flüssigkeit und Verfärbungen sind außerhalb des Acrylkissenbereichs zu erkennen, treten aber nicht aktiv aus. Dies ist bei einigen Arten von Inzisionen zu erwarten.

Belassen Sie den Verband.



3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Str. 1

41453 Neuss

Tel.: +49 2131 14 48 18

Fax: +49 2131 14 44 32

3Mmedica.de@mmm.com

www.3M.de/medicalsolutions

3M Archivdaten. EM-05-001314

3M und Tegaderm sind Marken oder eingetragene Marken von 3M. Unbefugte Nutzung verboten. Bitte recyceln. © 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.
DE_70-2011-7931-7