



Curos™

Protector de Puerto
Desinfectante

Instrucciones de uso

Curos™

Tapón Desinfectante para Conectores Luer Macho

Desinfecta en 1 minuto. Protege los conectores machos hasta por 7 días.



Desprenda

Curos™ Tapón Desinfectante de la tira de respaldo de Aluminio.



Empuje y gire

Curos Tapón Desinfectante en dirección a las manecillas del reloj hasta llegar al fondo del conector macho.

- ▶ Si el conector macho se encuentra visiblemente sucio, realice la desinfección activa con alcohol isopropílico (IPA) al 70% antes de usar el Tapón.
- ▶ No use el Tapón si la tira de aluminio está rota, rasgada o perforada, o si el Curos Tapón Desinfectante para Conectores Luer Macho está seco por dentro.
- ▶ El Tapón debe permanecer en el conector macho por lo menos un (1) minuto, y puede mantenerse allí hasta por siete (7) días, siempre que no sea removido.
- ▶ El conector libre de aguja se puede acceder inmediatamente después de retirar Curos Tapón Desinfectante para conectores Luer Macho que ha estado en su lugar por un mínimo de un (1) minuto.
- ▶ Coloque siempre un Curos Tapón Desinfectante para Conectores Luer Macho sobre el conector macho después de cada uso.
- ▶ Deseche el Curos Tapón Desinfectante para Conectores Luer Macho después de cada uso, no la reutilice.

PRECAUCIÓN: Riesgo de asfixia.



Verde significa limpio.

3M

División de Soluciones para
el Cuidado Crítico y Crónico
3M Salud
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144 EUA
1-800-228-3957
www.3M.com/C3SD

Por favor, recicle.
© 3M 2017. Todos los derechos reservados.
3M y Curos son marcas registradas de 3M.
70-2011-5798-2

STERILE R

Ingrediente activo: Alcohol isopropílico (IPA) al 70%. Desechable. Disponible bajo indicación médica. Este dispositivo no está hecho con goma de látex natural ni dietil hexil ftalato (DEHF) plastificante. Consulte las instrucciones de uso, advertencias y detalles del producto en las etiquetas del dispositivo.