


3M

Tegaderm™

Soluciones para el Cuidado I.V.

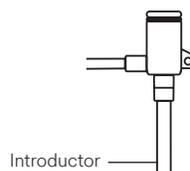

Guía de producto

Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™ I.V.
Aseguramiento Avanzado 1685
para Introductores

Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™ I.V. Aseguramiento Avanzado 1685

El apósito está diseñado para brindar un cuidado excepcional del paciente mediante el aseguramiento avanzado del sitio, estabilización del catéter y remoción gentil con la piel.

También disponible con protección antimicrobiana



Visibilidad del sitio

El apósito transparente permite la identificación temprana de complicaciones en el sitio de inserción.

Aseguramiento del sitio / estabilización del catéter

Diseñado para proteger el sitio de inserción y reducir el movimiento o desplazamiento del catéter.

Aplicación consistente



El diseño del marco permite una correcta, fácil y estandarizada aplicación.

Comodidad del paciente

Se puede usar de manera segura hasta por 7 días, reduciendo potencialmente el número de cambios del apósito y reinserciones no programadas del catéter.

*Las pruebas in vitro muestran que la película provee una barrera contra virus de 27 nm o más de diámetro mientras que el apósito permanece intacto sin fuga de líquido de infusión.

1685

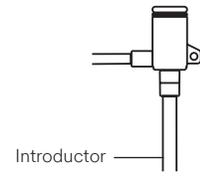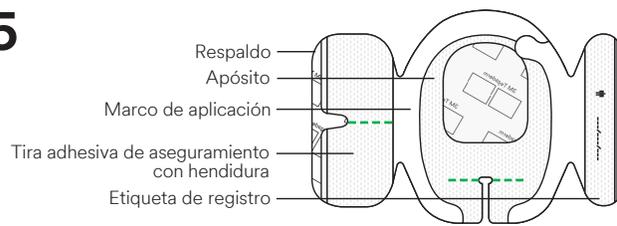

Prepare



Prepare el sitio de acuerdo con el protocolo de la institución. El área debe estar completamente seca. Rasgue las perforaciones precortadas presentes en el corte profundo ampliado antes de retirar el respaldo del apósito. Retire el respaldo del apósito.

Presione



Centre la ventana del apósito en el sitio inserción del catéter. Asegúrese de no estirar el apósito durante la aplicación. Una vez retirado el marco de aplicación, ejerza presión firme sobre el apósito para favorecer la adhesión.

Asegure




Aplique la tira adhesiva de aseguramiento debajo del tubo y superponga la parte trasera sobre el apósito. Retire las pestañas libres de adhesivo.

Asegure



Ubique la etiqueta de registro como se muestra en la imagen. Retire las pestañas libres de adhesivo.

Asegure

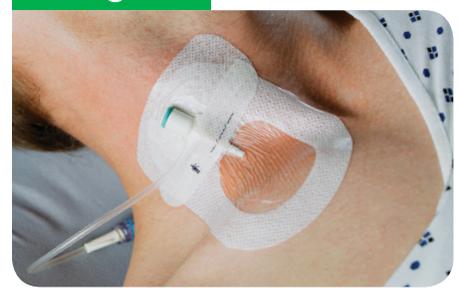

Retire



Rasgue las perforaciones precortadas. Después, sostenga la tira y desprenda el apósito hacia el sitio de inserción del catéter usando una técnica de remoción baja y lenta. Para evitar causar daño a la piel, retire el apósito hacia atrás, nunca hacia arriba.

Para más información, consulte las Instrucciones de uso.

Información para pedido

Producto	Modelo	Tamaño del apósito	Unidades por cajita	Cajitas por case
	1685	8.5 cm x 11.5 cm 3½ in x 4½ in	50	4



3M Cuidado de la Salud
División de Soluciones Médicas
 2510 Conway Ave.
 St. Paul, MN 55144 USA

Por favor recicle.
 3M y Tegaderm son marcas registradas de 3M.
 © 3M 2019. Todos los derechos reservados.
 70-2011-7177-7