



Cavilon™

Soluciones para
el Cuidado de la Piel.

3M™ Cavilon™

Película Protectora Sin Ardor

Reducción del Riesgo de Daño a la Piel por Adhesivos
de Uso Sanitario (MARSI, por sus siglas en inglés), en
accesos vasculares.



Usos clínicos

Reducir riesgo de Lesiones Cutáneas por Adhesivos de Uso Sanitario (MARSI).

Estándares de práctica clínica basados en evidencia, recomiendan el uso de películas protectoras para evitar el riesgo de MARSI en accesos vasculares¹.

Frecuencia de uso recomendada

Antes de aplicar el producto adhesivo

Características 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor Hisopo de 1 ml, código 3343E:

- ☒ Estéril
- ☒ Compatible con Gluconato de Clorhexidina (CHG)
- ☒ Protege la piel del daño por adhesivos
- ☒ Permite la fijación de apósitos y cintas
- ☒ Puede ser aplicada sobre piel intacta e irritada
- ☒ Libre de alcohol, fragancia y látex. No produce ardor y es hipoalergénico, ayudando a reducir el riesgo de dermatitis
- ☒ Forma una capa protectora respirable y flexible, que permite visualizar la piel gracias a su tecnología que combina polímeros, solvente y plastificante
- ☒ Se seca rápidamente (30 segundos)
- ☒ Fácil de usar
- ☒ Evita contaminación. 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor en presentación hisopo de 1 ml, posee un empaque desplegable, fácil de abrir, que permite mantener la técnica aséptica.



¹) Gorski L, Hadaway L, Hagle ME, McGoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion therapy standards of practice. J Infus Nurs. 2016;39 (suppl 1): S 73,8

Guía de Aplicación para el cuidado de la piel alrededor de accesos vasculares

1. **Siga los protocolos de su institución** para la inserción y mantención de los accesos vasculares.
2. **Asepsia de la piel.**
Al aplicar antiséptico, tanto en la inserción como mantención del catéter vascular, deje que seque completamente antes de colocar la película protectora.
3. **Aplique película protectora.**
 - Use el formato estéril en hisopo de 1 ml.
 - Aplique una capa uniforme de 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor sobre el área que quedará bajo el apósito / dispositivo adhesivo.
 - Si se usa el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ CHG para el Aseguramiento del Sitio I.V. con Gluconato de Clorhexidina, no aplique la película sobre la piel donde se ubicará la almohadilla con CHG.
4. **Deje secar por 30 segundos.**
Permita que 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor se seque completamente.

Información de pedido

Código	Descripción	Empaque
3343E	3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor Hisopo de 1 ml	25 unidades /cajita 4 cajitas /caja



División de Soluciones Médicas

2510 Conway Avenue
St Paul, MN 55144 USA
1-800-228-3957
3M.com/Cavilon

3M, Cavilon y Tegaderm son marcas comerciales de 3M.
Por favor recicle. © 3M, 2020. Todos los derechos reservados.