

3M

Curos™

Protector de Puerto
Desinfectante

3M™ Curos™ Stopper

Tapón Desinfectante para Conectores Luer Hembra

Cubra las llaves de tres vías y el cono del catéter con toda confianza.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC), y Joint Commission de Estados Unidos, las llaves de tres vías usadas para administrar medicamentos e infusiones intravasculares y toma de muestras de sangre representan una puerta potencial de entrada para los microorganismos al torrente sanguíneo.^{1,2}

Desinfecte y proteja los conectores luer hembra. Para cumplir con los estándares de alta eficacia de la línea 3M™ Curos™ Protector de Puerto Desinfectante, los tapones 3M™ Curos™ Stopper Tapón Desinfectante para Conectores Luer Hembra utilizan alcohol isopropílico (IPA) al 70% para desinfectar las superficies críticas de los conectores luer hembra antes del acceso a la línea. Estos Tapones brindan una barrera contra la contaminación hasta por 7 días, si no son removidos.

Simplemente desprenda el Tapón de la tira o retire el sello de aluminio. Empuje y gire en el sentido de las agujas del reloj, hasta que esté firme en su lugar.



Utiliza IPA al 70% para desinfectar superficies críticas.



Desinfecta en 1 minuto. Protege luer hembra hasta por 7 días.

Diseño inteligente

3M™ Curos™ Stopper Tapón Desinfectante para Conectores Luer Hembra posee un diseño de rosca tipo Luer-Lock, que se adapta a una amplia gama de llaves de tres vías y en el cono del catéter. El diseño exclusivo del Tapón, mantendrá la presión para mantener el sistema cerrado.

Práctica presentación

3M™ Curos™ Stopper Tapón Desinfectante para Conectores Luer Hembra está disponible en presentación individual o en tiras de cinco unidades. Las tiras permiten que los Tapones estén visibles en el entorno del paciente, facilitando el acceso y proporcionando un recordatorio visual para el cumplimiento.


Color brillante, para una desinfección correcta

3M™ Curos™ Stopper Tapón Desinfectante para Conectores Luer Hembra tiene un color brillante, lo que permite que los profesionales de salud verifiquen rápidamente que los puertos estén cubiertos.

El cumplimiento de los protocolos de desinfección se puede medir de manera fácil y confiable.

3M™ Curoso™ Protector de Puerto Desinfectante redujo 6 microorganismos que suelen asociarse a las CLABSI (Infecciones del Torrente Sanguíneo Asociadas a la Línea Central) hasta en un 99.99%.^{3,4}


La eficacia de los productos 3M™ Curoso™ se sometió a pruebas *in vitro* contra:⁴

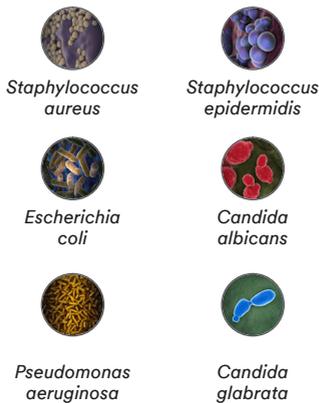

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO:


Todas las muestras de las pruebas excedieron la reducción mínima de 4 log después de un minuto.

Los estudios se llevaron a cabo en laboratorios independientes. Datos de 3M en archivo.

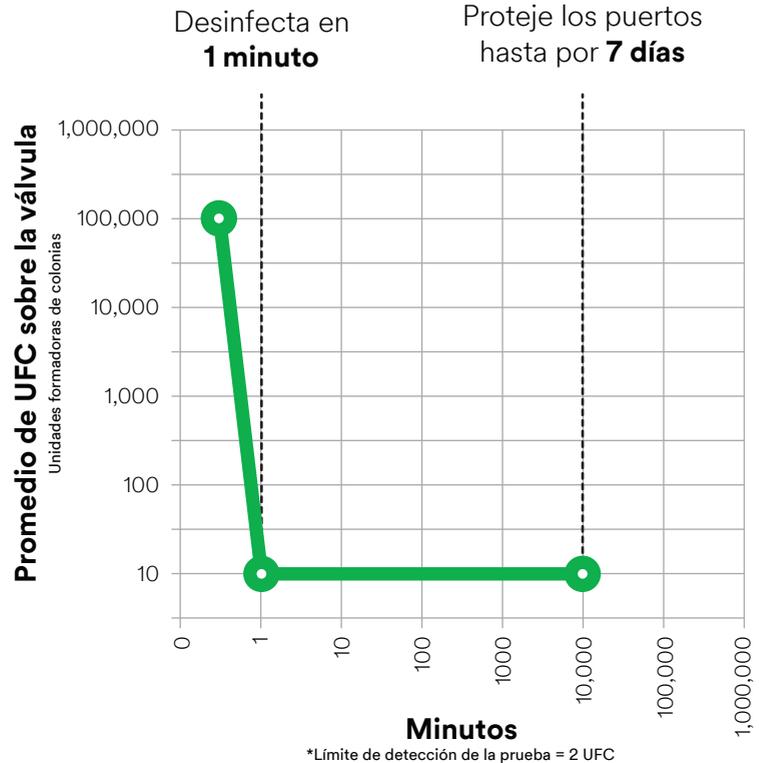

1. CDC: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infection.
2. The Joint Commission. Preventing Central Line-Associated Bloodstream Infections: A Global Challenge, a Global Perspective. Oak Brook, IL: Joint Commission Resources, mayo de 2012. <http://www.PreventingCLABSI.pdf>
3. Para obtener más información sobre los organismos asociados con las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a la línea central, consulte: Sievert, D. M., Ricks, P., Edwards, J. R., Schneider, A., Patel, J., Srinivasan, A., ... Fridkin, S. (2013). Antimicrobial-Resistant Pathogens Associated with Healthcare-Associated Infections: Summary of Data Reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2009–2010. Infection Control & Hospital Epidemiology, 34(01), 1-14. doi:10.1086/668770.
4. Los datos reflejan los hallazgos *in vitro* de 3M™ Curoso™ Protector de Puerto Desinfectante.

Producto	Presentación	Información para pedidos	Cajas por paquete	Unidades por caja	Total de tapones por paquete
3M™ Curoso™ Stopper Tapón Desinfectante para Conectores Luer Hembra	Individual color rojo	CSA1-270	8	270	2,160
	Tiras (5 tapones), color rojo	CSA5-250	8	50 Tiras	2,000

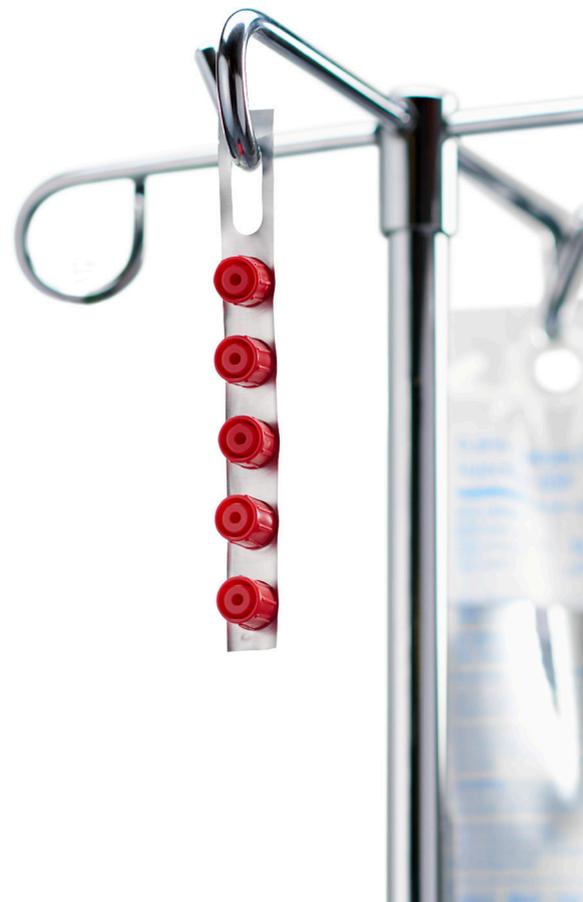

División de Soluciones para el Cuidado Crítico y Crónico
3M Cuidado de la Salud
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144 USA

1800 228-3957
www.3M.com/Curoso

3M y Curoso son marcas comerciales de 3M.
Por favor recicle.
© 3M 2017.
Todos los derechos reservados.

70-2011-6728-8