

3M

Cavilon™

Skin Care Solutions



保护您的皮肤 当使用脸部个人安全防护设备时

选择一款皮肤保护产品

当我们佩戴面部个人安全防护设备时, 保护皮肤的关键考量点是皮肤保护产品不应影响个人安全防护设备及其功能。这意味着选择一款皮肤保护产品时应该包括:

- 不影响口罩的密闭性和/或其他面部个人防护设备的贴合
- 不会从皮肤上脱落并转移到面部个人防护设备上
- 防止皮肤受到摩擦和浸渍(防水)
- 良好的透气性, 湿气不会聚集在皮肤上
- 不需移除或清洗
- 不易产生皮炎

考虑到对于3M过滤式面罩呼吸器(如:N95口罩)密闭性和/或过滤性的潜在影响, 3M不建议使用凡士林油膏、质地稠厚的乳霜或类似泡沫和水胶体之类的敷料。

3M™ Cavilon™
液体敷料



积极地保护皮肤

3M Cavilon液体敷料有助于保护完整皮肤免受潮湿和摩擦的损伤。正确使用时,其不会影响3M过滤式面罩呼吸器(如:N95口罩)的密闭性。



应用指导

- ① 应使用1ml棉片装或1ml棉棒装
- ② 本产品应使用于FFR(过滤式面罩呼吸器)可能导致摩擦力损伤和/或水气聚集的任何清洁、干燥的皮肤部位,例如鼻梁、脸颊、耳背,或者额头。本产品可以用于脸部,但是应避免眼睛及眼睑。



- ③ 在佩戴FFR(过滤式面罩呼吸器)之前,3M™ Cavilon™ 液体敷料应完全待干(至少90秒)。使液体在皮肤上完全干燥,蒸发消散。使用时,当液体溶剂成分蒸发时,可能会有气味。气味会随着本产品的干燥而消失。
- ④ 我们建议该产品起初每日使用一次。如果用户体验到产品的累积作用,请减少使用频次,例如每周三次。
- ⑤ 3M™ Cavilon™液体敷料不需要移除;如需移除,可以使用医用粘胶去除剂移除。



呼吸器佩戴者应始终遵循特定型号的操作手册,包括每次戴上呼吸器时完成密合度检查。

请参阅相关高效保肤剂产品说明书(使用说明),以获得完整的适应症、使用说明、禁忌症、注意事项和警告。