

# Diseño y desempeño superior que minimizan las cortaduras

**3M™ Clipper 9681**  
**Recortadora Quirúrgica de Vello Profesional**



- La hoja 9680 ayuda a evitar que la recortadora pellizque la piel.
- Dado que la hoja está alejada de la piel, se minimiza la probabilidad de cortaduras.
- En los estudios clínicos, 3M™ Clipper 9681, Recortadora Quirúrgica de Vello Profesional mostró un índice de cortaduras de solo el 5 % en comparación con CareFusion® 4406 General Purpose Blade con un 25%, y con Medline™ DYND70850 Universal Blade con un 12,5 %<sup>1</sup>.
- Una misma hoja para procedimientos normales y traumatológicos.
- Elimina todo tipo de vello o cabello en una sola pasada.
- 120 minutos de uso con una recarga de 4 horas.
- Luces LED indican el estado de carga de la batería.

## Información para pedidos

Número de catálogo	Descripción del producto	Artículos por envase	Envases por caja mayorista
9680	Hoja 9680 para 3M™ Clipper 9681, Recortadora Quirúrgica de Vello Profesional.	50	1
9681	3M™ Clipper 9681, Recortadora Quirúrgica de Vello Profesional.	1	1
9682	Soporte Cargador de inserción con cable para 3M™ Clipper 9681, Recortadora Quirúrgica de Vello Profesional.	1	1

## Referencias

<sup>1</sup> Estudio EM-05-012508

# Cómo usar

3M™ Clipper 9681, Recortadora Quirúrgica de Vello Profesional, para usar con hoja 9680

## Cómo cambiar la hoja cortadora



### Cómo colocar la hoja

Quite la parte de atrás del empaque de la hoja. Sin tocar la hoja, sostenga el cuerpo de la recortadora por encima de la hoja y deslícela hacia la posición correcta, hasta que oiga un clic.



### Cómo extraer la hoja

Sostenga la hoja hacia abajo. Con el pulgar, presione el botón para soltar la hoja, que caerá en un recipiente para desechos punzantes y cortantes.

NOTA: Para eliminar la contaminación cruzada, use una hoja nueva para cada paciente.

## Recorte del vello



### Empuje

Coloque la recortadora sobre la superficie de la piel como un lápiz, con la hoja plana o en un ángulo pequeño. Empújela suavemente hacia adelante, contra la dirección en que crece el cabello o el vello del paciente.

NOTA: No presione demasiado al empujar la recortadora sobre la piel del paciente.



### Tire

Coloque la recortadora sobre la superficie de la piel con la hoja plana o en un ángulo pequeño y deslícela suavemente en dirección a usted.

NOTA: No rastrille con la hoja en forma transversal sobre la piel del paciente. La recortadora no cortará bien el cabello o el vello si se la usa en forma incorrecta.

## Limpieza



### Enjuague

Con la recortadora apagada y ya sin la hoja, enjuague la empuñadura bajo agua corriente caliente. Seque completamente antes de volver a cargarla o a usarla.



### Utilice un paño

Con la recortadora apagada y ya sin la hoja, limpie la empuñadura de la recortadora con un paño con alcohol o desinfectante.



### Inmersión

Sumerja la recortadora apagada y ya sin la hoja en una solución desinfectante de alto nivel. Seque completamente antes de volver a cargarla o a usarla.

NOTA: No sumerja la recortadora en agua ni en otra solución que tenga más de 6 pulgadas de profundidad ni por más de 15 minutos.

## Cómo cargar la batería



### Carga

Antes de usarla por primera vez, cárguela durante 3 horas. Cada vez que termine de usarla, guarde la empuñadura apagada en el soporte cargador enchufado. Con una recarga de 4 horas, puede usar la recortadora durante 120 minutos.

Cuando esté totalmente cargada, los tres medidores de luz LED de la parte superior se pondrán verdes y los dos de la parte inferior, amarillos. Si es necesario recargar la batería, la luz LED inferior titilará. Las luces LED titilarán mientras la batería se esté recargando. El nivel de carga puede determinarse por la luz que titile en ese momento.

Para obtener instrucciones más detalladas y conocer las advertencias, consulte el prospecto.

**3M**

3M Health Care  
Medical Solutions Division  
3M Center, Building 275-4E-01  
St. Paul, MN 55144-1000 EE. UU.

3M es una marca comercial de 3M.  
Por favor, recicle. Impreso en EE. UU.  
© 3M 2012. Todos los derechos reservados.

