

Protocolo de cementación directa en ortodoncia

Brackets con revestimiento de Adhesivo 3M™ APC™ Flash-Free

Pasos:

1. Aisle el diente
2. Remueva el bio film
3. Grabe e imprima
4. Coloque el bracket
5. Cure

1

Nota: Antes de empezar:
Asegure una buena higiene oral



Aisle el diente

2



Grabe 15 segundos




Succión y enjuague




Seque con aire

3

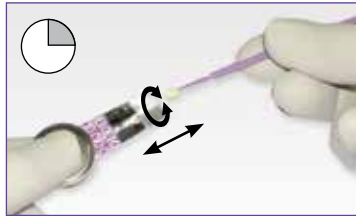

Mezcle por 5 segundos.
Remueva y aplique.

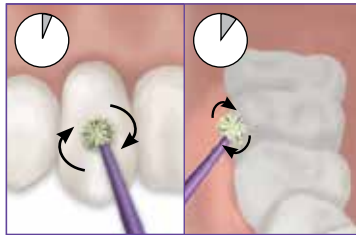

Frote 3-5 segundos

Molares: Considere frotar un tiempo adicional



Uso para un solo paciente

Recargue el aplicador por cada diente



1-2 segundos de una ligera ráfaga de aire

4



Evite tocar la base del bracket



Coloque, posicione, comprima.
No limpie alrededor del bracket.

5



OPCIONAL

Tack gingival - 1 segundo



Cerámica - A través del bracket

3 segundos*



Metal - Mesial y Distal

6 segundos*

*Consulte el gráfico de tiempo de curado

Tiempos de curado recomendados para adhesivos ortodónticos de fotocurado.*

Adhesivo	Aparato/Bracket	Lámpara de Fotocurado Ortholux™ Luminous
APC™ Flash-Free Adhesive Coated Brackets	Brackets metálicos	6 segundos mesiales × 6 segundos distales
	Brackets cerámicos	3 segundos a través del bracket
	Tubos vestibulares (Cementado directo)	6 segundos mesiales × 6 segundos oclusales
Brackets con Revestimiento de Adhesivo APC™ II Brackets con Revestimiento de Adhesivo APC™ PLUS Adhesivo que Cambia de Color Transbond™ PLUS Adhesivo Transbond™ XT	Brackets metálicos	3 segundos mesiales × 3 segundos distales
	Brackets cerámicos	3 segundos a través del bracket
	Tubos vestibulares (Cementado directo)	6 segundos mesiales × 6 segundos oclusales
Adhesivo Transbond™ XT	Tubos vestibulares (Cementado directo)	6 segundos a través de la plantilla
Adhesivo Transbond™ LR	Retenedores linguales	3 segundos mesiales × 3 segundos distales
Adhesivo Transbond™ Plus Band	Bandas molares	12 segundos (3 segundos por cúspide)
Cemento de Banda de Ionómero de Vidrio de Multicurado Unitek™		
Adhesivo de Fotocurado de Baja Viscosidad Transbond™ Supreme LV	Bandejas indirectas (Brackets metálicos)	6 segundos mesiales × 6 segundos distales a través de las bandejas
	Bandejas indirectas (Brackets cerámicos)	6 segundos a través del bracket y de las bandejas
	Accesorios para alineadores	6 segundos a través de la plantilla

*Estos tiempos de curado asumen que el ángulo y la distancia son los adecuados desde la luz de curado a los dientes.



3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55114-1000 USA
Phone 1-800-634-2249
Web 3M.com/ortho

**3M Canada
Health Care Division**
300 Tartan Drive
London, ON 5N1 4M9 Canada
Phone 1-800-443-1661

Refiérase siempre a las instrucciones de uso (IFU) para detalles adicionales de cada producto.

3M, APC, MBT, Ortholux, Transbond y Unitek son marcas registradas de 3M. Usado bajo licencia en Canadá. (c) 3M 2018. Todos los derechos reservados.