

3M**Cavilon™**

Skin Care Solutions



Protégez votre peau durant le port d'équipement de protection individuelle pour le visage (EPI).

Le choix d'un produit de protection cutanée.

La considération la plus importante pour déterminer comment vous pouvez contribuer à protéger votre peau tout en utilisant un équipement de protection individuelle pour le visage, est de veiller à ce que le produit de protection cutanée n'interfère pas avec le dispositif de protection et sa fonctionnalité. Cela signifie que vous devez choisir un produit de protection de la peau qui :

- ▶ n'affecte pas l'étanchéité du masque respiratoire ni l'ajustement des autres dispositifs de protection individuelle pour le visage
- ▶ n'est pas transféré de la peau à l'EPI facial
- ▶ protège la peau contre les frictions et l'humidité (étanche à l'eau)
- ▶ respire de manière à ce que l'humidité de la peau s'évapore
- ▶ n'exige ni enlèvement, ni rinçage

En raison de l'interférence possible avec la fonction d'étanchéité et/ou de filtration des masques respiratoires 3M, 3M conseille de ne pas utiliser de pommades à base de vaseline (également appelée pétrolatum), de crème barrière épaisse ou de pansements tels que les pansements en mousse de polyuréthane et les hydrocolloïdes.

3M™ Cavilon™ Film Barrière Non-Irritant



3M™ Cavilon™ Advanced Protecteur Cutané*

Protection cutanée proactive.

3M™ Cavilon™ Film Barrière Non-irritant aide à protéger la peau intacte de l'humidité et des frottements et, lorsqu'il est utilisé correctement, ne devrait pas interférer avec l'ajustement des masques respiratoires 3M.

Instructions d'utilisation

- 1 Utilisez la lingette 1 ml ou l'applicateur-mousse 1 ml.
- 2 Le produit doit être appliqué sur une peau propre et sèche à tout endroit où le masque respiratoire peut provoquer des frictions et/ou où l'humidité peut s'accumuler, par exemple l'arête du nez, les joues, le haut des oreilles ou le front, etc. Il peut être utilisé sur le visage, mais ne doit pas être utilisé dans l'œil ou sur la paupière.



- 3 Il faut laisser le produit sécher complètement (attendre au moins 90 secondes avant de mettre le masque respiratoire. Cela permet au liquide de sécher sur la peau et aux vapeurs de s'échapper. **Lors de l'application, une odeur peut être détectée lorsque le solvant s'évapore et l'odeur disparaîtra lorsque le produit séchera.**
- 4 Nous recommandons de commencer par une application quotidienne unique. En cas d'accumulation du produit, réduire la fréquence d'application, par exemple 3 fois par semaine.
- 5 Cavilon Film Barrière Non-Irritant peut être enlevé avec un dissolvant d'adhésif de qualité médicale.



Les porteurs de masques respiratoires doivent toujours suivre les instructions d'utilisation spécifiques à chaque modèle, notamment en effectuant un contrôle d'étanchéité à chaque fois qu'un masque respiratoire est mis en place.

Consultez la notice d'information du produit (mode d'emploi) pour connaître les instructions et le mode d'emploi complets, les contre-indications, les précautions et les avertissements.

Protégez la peau endommagée.

3M™ Cavilon™ Advanced Protecteur Cutané peut être utilisé pour aider à protéger la peau endommagée, par exemple contre les frottements ou d'autres dommages superficiels de la peau.



Instructions d'utilisation

- 1 Il est recommandé d'utiliser l'applicateur 0.7ml.
- 2 Le produit peut être appliqué sur les zones de rougeur ou de lésions cutanées superficielles, par exemple le nez, les joues, le haut des oreilles, le front, etc. Le produit ne doit pas être appliqué dans ou près de l'œil...
- 3 Le produit doit être appliqué en fine couche.




- 4 Il faut laisser le produit sécher complètement (attendre au moins 90 secondes) avant de mettre le masque respiratoire. Cela permet au liquide de sécher sur la peau et aux vapeurs de s'échapper. **Lors de l'application, une odeur peut être détectée lorsque le solvant s'évapore et l'odeur disparaîtra lorsque le produit séchera.**
- 5 Nous vous recommandons de commencer par une application 2 à 3 fois par semaine. En cas d'accumulation du produit, réduire la fréquence d'application, par exemple 1 à 2 fois par semaine.
- 6 Cavilon Advanced Protecteur Cutané peut être enlevé avec un dissolvant pour adhésif médical contenant de l'hexaméthylsiloxane ou du silicone.



Note

Si l'on utilise l'applicateur* de 2,7 ml, les étapes suivantes sont recommandées pour minimiser l'égouttage ou l'accumulation de liquide pendant l'application :

- 1 Ouvrez l'emballage et gardez-le à portée de main.
- 2 Activez l'applicateur et assurez-vous que le coussin en mousse est bien saturé de liquide.
- 3 Pressez l'applicateur de mousse contre l'emballage blanc pour faire sortir l'excès de liquide.

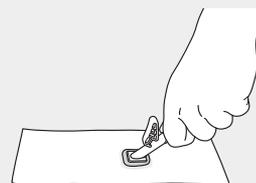

- 4 Ensuite, appliquez comme indiqué.

Les porteurs de masques respiratoires doivent toujours suivre les instructions d'utilisation spécifiques à chaque modèle, notamment en effectuant un contrôle d'étanchéité chaque fois qu'un masque est mis en place.

Consultez la notice d'utilisation du produit (mode d'emploi) pour obtenir les instructions complètes et les consignes d'utilisation, les contre-indications, les précautions et les avertissements.

3M (Schweiz) GmbH
Health Care
Eggstrasse 91
8803 Rüslikon
+41 (0)44 724 90 90
innovation.ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

3M BELGIUM BVBA/SPRL
Hermeslaan 7
1831 Diegem
+32 2 722 5133
3mmmedical.be@mmm.com
www.3Mbelgique.be/medical

Pour plus d'infos:
3Mbelgique.be/Covid
3Mschweiz.ch/fr/Covid

*A usage unique exclusivement

3M, Cavilon et Tegaderm sont des marques déposées de 3M Company.
© 3M 2020. Tous droits réservés. OMG9056B.

