



Filtek™

Bulk Fill
Flowable Restorative

Tekutý bulk-fill materiál, který se snadněji aplikuje.

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable je k dispozici v nové ergonomické stříkačce navržené pro větší pohodlí a snadnější aplikaci. Stříkačka umožňuje lepší kontrolu a přesnou aplikaci do hlubokých kavit.

Zamezuje vzniku bublin a zbytků

Materiál, který je bez bublin a samovolně nevytéká. Lepší kontrola aplikace.

Není třeba hádat

Zelený píst indikuje zbytkové množství materiálu. Jakmile je stříkačka prázdná, viditelná je pouze bílá část.

Dobře se drží

Trojúhelníkové ukončení pístu pod palcem umožňuje rychlé a snadné uchopení.



Ohýbatelná kanyla

Snadné ohnutí kanyly bez rizika zalomení. Lepší přístup do všech míst.



Klíčové výhody

- Prakticky žádné bubliny nebo vytékající materiál
- Snadno ohýbatelná kanyla pro přesnější aplikaci
- Ergonomický design - dobře se drží a používá při aplikaci
- Jednokroková aplikace vstříknutím, a to až do 4 mm
- Vynikající adaptace a nízké polymerační smrštění

Může být zahříván pro techniku vstříkávání

Zahřejte až na 70 °C po dobu až jednu hodinu, a to až 25krát



Jednoduché dostavby v distálním úseku



Preparujte zub a naneste adhezivum, např. 3M™ Singlebond™ Universal.



Naneste až 4 mm materiálu 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable do připravené kavity a polymerujte, např. s 3M™ Elipar™ DeepCure-S polymerační lampou.



Naneste minimálně 2 mm krycí vrstvu estetického kompozitu, např. 3M™ Filtek™ Universal a polymerujte.

Fotografie: Dr. Reich, Seefeld, Německo

Indikace

(vrstva až 4 mm)



Báze (třída I-II)



Podložka (třída I-II)



Minimálně invazivní stomatologie (MID)¹



Třída III



Třída V



Oprava nepřímé náhrady (malé defekty)



Opravy²



Vyblokování podsekřivín



Pečetění



Dostavby pilířů³

Viz. návod k použití pro úplný seznam indikací.

Objednací informace



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable - doplňkové balení

Obsah:

2 × 2 g stříkačka, 20 aplikačních kanyl.

| ODSTÍN | OBJ. Č. |
|-----------|---------|
| A1 | 4862A1 |
| A2 | 4862A2 |
| A3 | 4862A3 |
| Universal | 4862U |

| OBJ. Č. | PRODUKT |
|---------|---|
| 3740T | 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable, aplikační kanyly 20G, zelené, 20 ks |



3M

3M Oral Care Solutions Division
3M Česko spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
web: www.3M.cz/dental

CHCETE 3M™ FILTEK™ BULK FILL FLOWABLE VYZKOUŠET?

Kontaktujte svého 3M obchodního zástupce
nebo napište na oralcarescz@mmm.com (pro ČR),
nebo na oralcaresk@mmm.com (pro SR).

3M a Filtek jsou ochranné známky 3M.
© 3M 2020. Všechna práva vyhrazena.

¹ Včetně malých, nezatižených okluzálních dostaveb.

² Opravy provizorních akrylátových a kompozitních materiálů.

³ Kde zůstává minimálně polovina korunky jako podpůrná struktura.