



有效使用膠布的方法

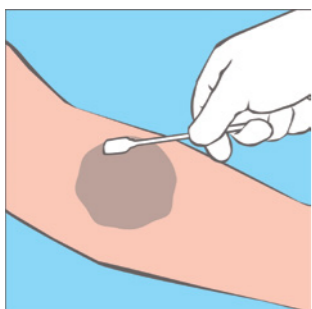


1. 乾淨皮膚：要令膠布貼得穩妥，使用膠布前先清潔及弄乾皮膚。


*遇到極脆弱皮膚時，可使用3M加膚康無痛皮膚保護膜 (Cavilon™ No Sting Barrier Film)，避免黏貼後帶來紅損 (但不適合於溫和剝離砂膠帶)

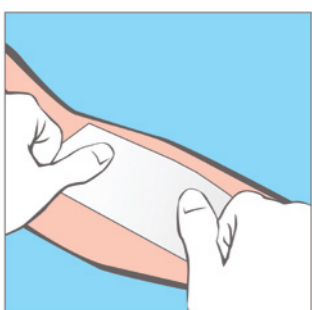

2. 穩定施壓：使用時切勿用力拉扯膠布。用拇指穩定地在膠布背面輕輕施壓，令膠布貼得更牢固。

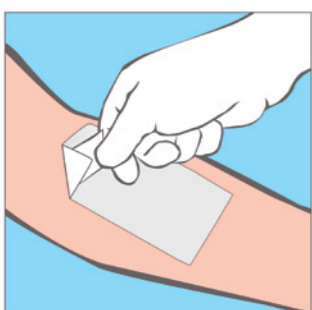

3. 角尖撕起：除下膠布時，可用一小片新膠布將其中一角扯起。

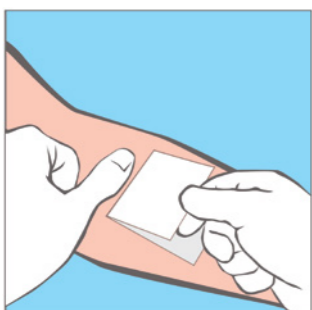

4. 慢慢移除：一手壓著黏膠邊的皮膚，另一手則慢慢把膠布向後、貼著膠布背面拉開。

口訣：Low & Slow



堅持我們

60 年來
擅長的事情
3M™ 醫用膠帶

當年 → 今日



你的專業精神。我們的創新。
3M醫用膠帶為世界各地的臨床醫生提供更多膠帶選擇。
每個需要，每次應用，每個地方。

3M™ Micropore™ S 醫療膠帶 (2770S-1, 2770S-2, 2775-1, 2775-2)

- 前身為Kind Removal Silicon Tape (KRST) / 溫和剝離矽膠帶

極溫和的矽膠帶，脆弱皮膚也適用

- 極體貼的醫療膠帶：體貼、撕除時不傷害皮膚
- 獨特矽膠技術，舒適不過敏，高透氣度

建議用法

- 固定脆弱皮膚部位的敷料或造口工具



👍 最溫和之選


3M™ Transpore™ 易撕透明膠帶 (1527-0, 1527-1, 1527-2, 1527-3)

透明、容易撕開的膠帶

- 透明
- 特殊小孔PE材質，透氣性佳，皮膚不易浸潤
- 不易沾黏手套

建議用法

- 靜脈留置導管(IV)固定
- 血液透析管路(A-V Shunt) 固定
- 手術中管路固定

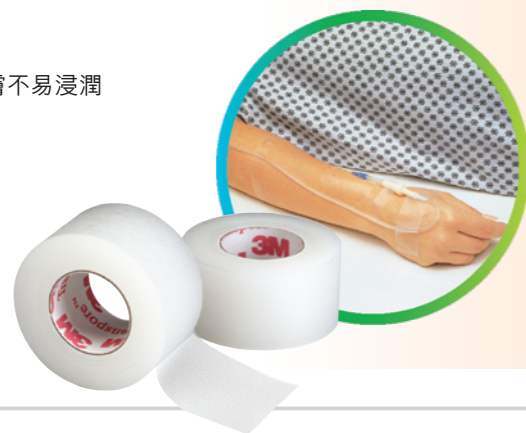

3M™ Transpore White™ 易撕紙膠帶 (1534-0, 1534-1, 1534-2, 1534-3)

白色、容易撕開的透氣紙質膠帶

- 黏貼力較強
- 不刺激皮膚
- 佩戴手套時也可使用

建議用法

- 固定較幼嫩皮膚上的靜脈注射導管及厚重的敷料



👍 經濟萬用之選

3M™ Multipore™ Dry 防水型管路固定膠帶 (3730-12.5, 3730-25, 3730-50, 3730-75)

最適合潮濕環境下使用的膠帶

- 潮濕狀態下，仍可以穩固地固定導管或小型儀器
- 特殊雙層結構背襯，水份速變乾
- 超強彈性減少對皮膚的張力傷害

建議用法

- 靜脈導管固定
- 濕潤面部的關鍵喉管固定



👍 最防水、穩妥之選


3M™ Durapore™ 絲質膠帶 (1538-0, 1538-1, 1538-2, 1538-3)

質料如絲，黏貼力強的布質膠帶

- 黏貼力特強
- 質料柔軟、堅韌

建議用法

- 固定厚重的敷料
- 固定關鍵的靜脈、引流導管

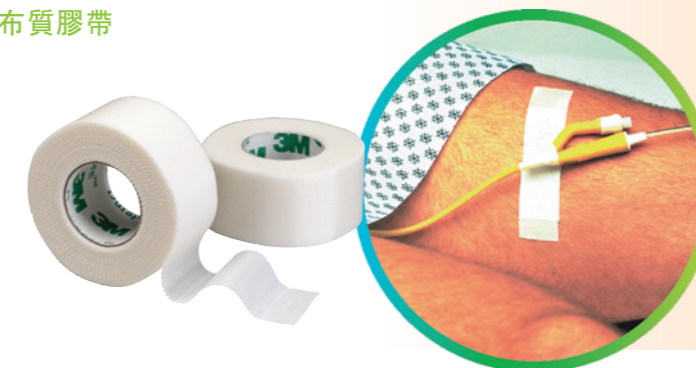

3M™ Microfoam™ 海綿質膠帶 (1528-1, 1528-2, 1528-3)

可拉伸和緩衝的海綿膠帶，關節和褶皺也適用

- 可多方向拉伸
- 安全粘附在身體移動的部位
- 防水

建議用法

- 固定壓迫療法的敷料
- 阻隔強光線
- 緩衝作用 (Cushion Effect)



3M™ Blenderm™ 膠質密封膠布 (1525-0, 1525-1, 1525-2, 1525-3)

磨沙半透明的全膠質膠帶

- 低透氣度
- 高防水
- 有效阻隔外來物

建議用法

- 蓋在有全密封需要的傷口敷料
- 配合皮膚科測試使用
- 美容化妝用

