



Filtek™

One  
Resina Bulk Fill

# Reemplazo de Restauración Clase I en resina compuesta

Caso clínico gentilmente cedido por Dr. Maciel Júnior

## Sobre el caso:

Paciente presentaba restauración en resina compuesta insatisfactoria en el diente 16 que necesitaba ser cambiada.

## Desafío:

Realizar una restauración de forma rápida y eficiente con un único incremento.



**Fig. 1:** Aspecto inicial insatisfactorio de restauración en resina compuesta de diente 16.



**Fig. 2:** Después del aislamiento absoluto, la restauración fue removida y se realizó acondicionamiento selectivo del esmalte.



**Fig. 3:** Aplicación de Single Bond Universal durante 20s. Evaporación del solvente\* y fotopolimerización por 10s con Elipar™ DeepCure-L.



**Fig. 4:** Medición de la profundidad de la cavidad, con el fin de confirmar si es posible realizar un incremento único.



**Fig. 5:** Inserción de Filtek™ One Resina Bulk Fill.



**Fig. 6:** Condensación de resina Filtek™ One Bulk Fill en la cavidad.



**Fig. 7:** Escultura regresiva de la restauración y fotopolimerización\*.



**Fig. 8:** Restauración final después del acabado y pulido.

\* De acuerdo a las instrucciones de uso de fabricante