

3M™ テガダーム™

I.V. コンフォート フィルム ドレッシング
(小児用)



「カテーテルの確かな固定」と 「肌へのやさしさ」の両立。

小児のカテーテル固定では、留置針がしっかり固定されること、ドレッシング材が浮かず剥がれにくいこと、肌への負担が少ないことが重要です。

3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシングが医療従事者の皆様と一緒に患者様を支えます。



カテーテルの確かな固定

荷重に強くしっかり固定し、抜去リスクを低減

1 荷重を分散させる切り込み


切り込みによってドレッシング材の中央で引っ張る力を分散させるため、しっかりとした固定が可能です。



耐荷重データ

切り込みのないフィルムドレッシング材との耐荷重の比較。
カテーテルを引き抜いた時の最大荷重。

末梢静脈カテーテル固定

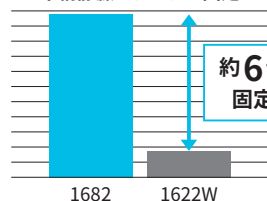

約6倍の
固定力

テガダーム™
I.V. コンフォート フィルム
ドレッシング 1682

テガダーム™
トランスペアレント
ドレッシング 1622W

※弊社社内試験であり、当該製品の規格を保証するものではありません。

ドレッシング材全体の浮きや剥がれを低減


2 高水蒸気透過性フィルム、 パターンコーティング粘着剤

高水蒸気透過性フィルムにアクリル系粘着剤を独自の技術でパターンコーティングしました。パターンコーティングにより、粘着力を保ちつつドレッシング全体の水蒸気透過性の向上を実現しました。



水蒸気透過性データ

従来のフィルムドレッシング材との水蒸気透過性の比較。(透明フィルム部分)
JIS L 1099 Inverted Water 法 準拠

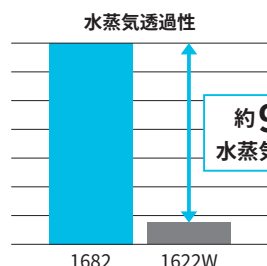

約9倍の
水蒸気透過性

テガダーム™
I.V. コンフォート フィルム
ドレッシング 1682

テガダーム™
トランスペアレント
ドレッシング 1622W

※弊社社内試験であり、当該製品の規格を保証するものではありません。

3 周囲補強用 不織布テープ

ドレッシング材周囲の浮きや剥がれを低減し、貼付中の固定性を高めます。



4 固定用テープ2本、 記録用ラベル1枚 (いずれも滅菌済み)

カテーテルやラインの固定に使用できます。滅菌されているためドレッシング材貼付前に留置針をテープで固定することも可能です。



3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング (小児用)

固定用テープ2本、
記録用ラベル1枚
(いずれも滅菌済み)

高水蒸気透過性フィルム、
パターンコーティング粘着剤

周囲補強用不織布テープ

荷重を分散させる切り込み


フレームデリバリー

肌へのやさしさ

汗による皮膚の蒸れを抑え、剥がす際の皮膚への負担を軽減

2 高水蒸気透過性フィルム、 パターンコーティング粘着剤

透明フィルムおよび周囲補強用不織布テープの粘着剤をパターンコーティングすることで肌へのやさしさを追求しました。

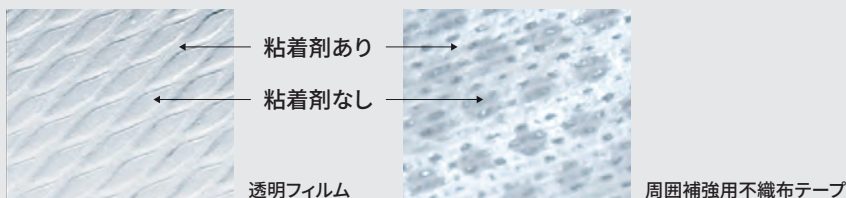

ドレッシング材貼付後の皮膚のつっぱり感を軽減

3 周囲補強用不織布テープ

周囲補強用不織布テープの外縁に細かいスリットがあるため、貼付後に皮膚の動きに追従しつっぱり感を低減します。



貼りやすさ

手袋装着時でも貼付が容易

5 フレームデリバリー

手袋装着時に粘着面に触れにくく、片手でカテーテルを保持しながら貼付できます。



ライナー紙(裏面)を剥がした後、接続部分が切り込みから出るように位置を合わせます。



ドレッシング材の上から、カテーテル周囲をつまみ、よく密着させます。



フィルムを皮膚に密着させるように空気を押し出しながら全体をしっかりと貼付した後、ドレッシング材を押さえながら、ゆっくりとフレーム部分を剥がします。



原寸大*

※このページをA4サイズで表示した場合



原寸大*



3M™ テガダーム™ I.V.コンフォート フィルム ドレッシング (小児用)

ガンマ線滅菌

一般医療機器／カテーテル被覆・保護材 届出番号：13B1X10109000232 販売名：テガダーム I.V.コンフォート フィルム ドレッシング

製品番号	形状／サイズ (cm)	主な用途	付属品	枚／箱
1680	 3.8×4.5	各種カテーテル固定	固定用テープ 2本 記録用ラベル 1枚 [滅菌済み]	100
1682	 5×5.7		固定用テープ 2本 記録用ラベル 1枚 [滅菌済み]	100

カテーテル管理をサポートする関連製品

3M™ キュロス™ プロテクタ

ニードルレスコネクタおよびオスルアーロックコネクタにはめて、汚染防止・保護に用いるキャップです。手順の「標準化」と清潔管理の「見える化」を実現します。

3M™ キュロス™ プロテクタ (ニードルレスコネクタ用) 火気厳禁

一般医療機器 保護栓 届出番号：13B1X10109000262
販売名：キュロス™ プロテクタ

 CFF10-250R	製品番号	仕様	入れ目	
			個／箱	本／箱
	CFF1-270R	単品タイプ	270	—
	CFF10-250R	10連タイプ	250	25

3M™ キュロス™ プロテクタ (オスルアーロックコネクタ用) 火気厳禁

一般医療機器 保護栓 届出番号：13B1X10109000262
販売名：キュロス™ プロテクタ

 CM5-200R	製品番号	仕様	入れ目	
			個／箱	本／箱
	CM5-200R	5連タイプ	200	40

添付文書をよく読んでからご使用下さい。

3M、テガダーム、キュロスは、3M社の商標です。

スリーエムヘルスケアジャパン合同会社
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2023. All Rights Reserved.
 HPM-965-B(1123)SE

2023年11月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-000-470**

9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）