

Protocolo de colagem direta em Ortodontia

Brackets revestidos com sistema 3M™ APC™ Flash-Free

Passos:

1. Isole o dente
2. Remova o biofilme
3. Aplique adesivo autocondicionante
4. Posicione o bracket
5. Fotopolimerize

1

Nota: Antes de começar:
Garanta uma boa higiene bucal



Isole o dente

2



Aplique ácido por 15 segundos




Enxague




Seque

3

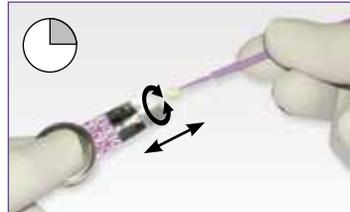

Após correta manipulação, gire o microbrush para terminar de misturar o conteúdo e remova-o do blister.

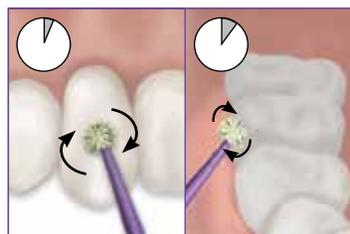

Friccione por 3 a 5 segundos

Obs: Em molares, considere friccionar por um tempo extra.



Uso para um único paciente

Recarregue a cada dente



Secar durante 1-2 segundos

4



Evite tocar a base do bracket



Posicione o bracket e faça o assentamento. Não limpe ao redor do bracket.

5



Fotopolimerize parcialmente por cervical - 1 seg.



3 segundos*



6 segundos*

* Veja o gráfico do tempo de fotopolimerização

Sistemas de Colagem	Bracket	Fotopolimerizador (mais de 1000 mW/cm ²)
Brackets revestido com Sistema APC™ Flash-Free	Brackets de metal	6 segundos mesial × 6 segundos distal
	Brackets cerâmicos	3 segundos através do bracket
	Tubos (colagem direta)	6 segundos mesial × 6 segundos oclusal
Resina Transbond™ PLUS Color Change Resina Transbond™ XT	Tubos (Colagem direta)	6 segundos mesial × 6 segundos oclusal
Resina Transbond™ XT	Acessórios para alinhadores	6 segundos através do modelo
Resina Transbond™ Plus Band	Bandas	12 segundos (3 segundos por cúspide)
Ionômero de vidro Multi-cure		
Resina de baixa viscosidade Transbond™ Supreme LV	Moldeiras indiretas (bracket de metal)	6 segundos mesial × 6 segundos distal através das moldeiras
	Moldeiras indiretas (brackets cerâmicos)	6 segundos através do bracket e das moldeiras
	Acessórios para alinhadores	6 segundos através das moldeiras

*Os tempos de fotopolimerização assumem que o ângulo e a distância são adequados.



Fale com a 3M

0800-0132333

www.3M.com.br

falecoma3M@mmm.com

www.3M.com.br/ortodontia



Siga-nos

3moralcarebrasil

Sempre consulte as Instruções de uso (IFU) para obter detalhes adicionais sobre cada produto.

3M, 3M ciência aplicada à vida, APC, Clarity, Transbond e Victory Series são marcas registradas da 3M.

Todos os direitos reservados.