



Handleiding

Uw chirurg heeft een 3M™ Tegaderm™ Absorberend transparant acrylverband op uw incisie aangebracht.

Volg de instructies van uw chirurg voor het controleren van de incisie. Gebruik dit document als handleiding voor wat u kunt verwachten bij het dragen van het verband. Neem contact op met uw chirurg als u vragen heeft over de incisie of het verband.

Veelgestelde vragen

Wat kan ik zien als ik het verband draag?

Uw verband heeft een transparante absorberende pad met een waterdichte deklaag. Hierdoor kunt u uw incisie zien. Als u het verband draagt, kan de pad door bloed en vocht vuil worden.

Dit is OK en het betekent niet dat u het verband dient te verwijderen. Het blijven dragen van het verband zorgt voor een helende omgeving.¹

Kan ik douchen of baden met het verband?


Ja. U kunt douchen met het verband als het stevig op zijn plaats zit en de randen niet omhoog komen of rollen. Niet in bad of whirlpool onderdompelen, terwijl u het verband draagt.

Volg de aanbevelingen voor het verwijderen van het verband van uw chirurg/zorgprofessional:

Wat kan ik zien als ik het verband draag?

Het verband is ontworpen om langer op zijn plaats te blijven dan u wellicht bij andereverbanden heeft ervaren. De onderstaande informatie kan u helpen te begrijpen wat u kunt verwachten, terwijl u het verband draagt.

Als u zich zorgen maakt over uw incisie of verband, bel dan met uw chirurg.

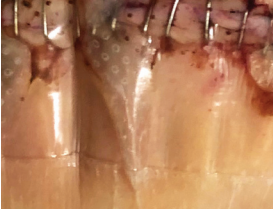

Luchtballen

Er komen luchtballen als de pad opzwellt om vloeistof te absorberen en vast te houden.


Blijf het verband dragen.



Vloeistof in de pad of een gebarsten uiterlijk

Er komt vloeistof in de pad of deze heeft een gebarsten uiterlijk, maar de randen van het verband blijven op de huid vast zitten. Dit kan voorkomen.


Blijf het verband dragen.

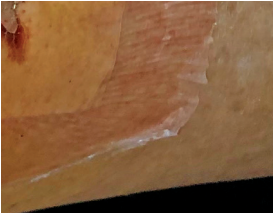

Opgesloten randen

De randen rollen op, maar het verband en de pad zitten nog op hun plaats. Dit is OK en het hoeft niet noodzakelijk versterkt te worden.

Blijf het verband dragen.

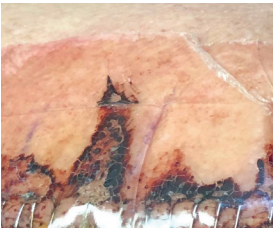

Vloeistof aanwezig in de verbandrand

Vloeistof of vlekken buiten het padgebied, maar de pad lekt niet actief. Dit kan bij sommige soorten incisie voorkomen.

Blijf het verband dragen.



3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft – Nederland
Tel: +31 (0) 15 782 23 33
Fax: +31 (0) 15 782 23 30
3m_email_healthcare_be@mmm.com
<http://www.3m.nl/medical>

¹Gegevens geregistreerd bij 3M. EM-05-001314

3M en Tegaderm zijn merken en/of geregistreerde handelsmerken van 3M. Onrechtmatig gebruik is verboden. Recycle dit product.
© 3M 2020. Alle rechten voorbehouden.
NL_NL_70-2011-7931-7