

SNAP™ System Überblick

SNAP™ Therapiekartusche:

60 mL Aufsatz zur Mengenbestimmung, hält Wundflüssigkeit und infektiöses Material vom Wundbett fern

SNAP™ Therapiehalterung



SNAP™ Advanced Dressing:

Das Hydrokolloid-Dressing erhält die Abdichtung in Verbindung mit Exsudat und Schweiß aufrecht und reduziert die Mazeration des umliegenden Gewebes




SNAP™ SecurRing™ aus Hydrokolloid:

erleichtert das Versiegeln auch auf unebenen Hautbereichen und an anatomisch schwierigen Stellen



Individuell anpassbare Schläuche

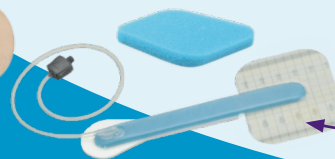

SNAP™ Bridge Dressing



Für die Grundtherapie benötigen Sie:




Als Zubehör benötigen Sie gegebenenfalls:



Zusammenfassung

Das SNAP™ Therapy System ist ein tragbares dNPWT-Gerät, das die einfache Handhabung moderner Wundauflagen mit der erwiesenen Wirksamkeit der Vakuumtherapie verbindet. Das dezente Design trägt zum Erhalt der Lebensqualität des Patienten bei.¹ Das SNAP™ Therapy System kombiniert die einfache Handhabung moderner Wundauflagen mit den Vorteilen der Unterdrucktherapie in einem diskreten Design.

- Mechanisch betrieben und tragbar, ermöglicht dem Patienten noch mehr Mobilität
- Ermöglicht eine kontinuierliche Unterdruck-Wundtherapie bei -125 mm/Hg
- Indikationen entsprechen denen der V.A.C.® Therapy
- Das kleine und leichte Einwegprodukt lässt sich diskret unter der Kleidung tragen
- Geräuschloser Betrieb für einen ungestörten Schlaf

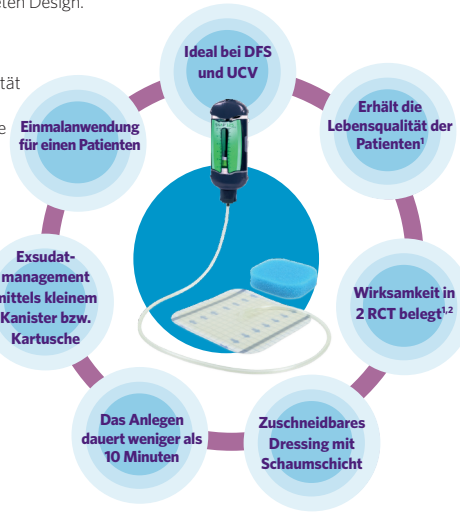

HINWEIS: Für KCI-Produkte sind möglicherweise spezifische Indikationen, Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen zu beachten. Sprechen Sie bitte vor dem Anlegen des Verbands mit einem Arzt oder Pfleger und lesen Sie die Produktbeschreibung. Verschreibungspflichtig.

© Wounds International 2020

Supported by KCI
PRA-PM-DE-00016 (05/20)
snaptherapysystem.com/de

©Copyright 2020 3M. All rights reserved. 3M and the other marks shown are marks and/or registered marks. Unauthorized use prohibited.

3M + KCI
United by purpose.

KURZER LEITFADEN

SNAP™ THERAPY SYSTEM



Wounds
INTERNATIONAL

SNAP™ System – Klinischer Leitfaden

Umfassende Beurteilung von Patient und Wunde

Ist angesichts der Art der Wunde eine NPWT-Therapie ohne Gegenanzeigen indiziert?

Das SNAP™ Therapy System ist indiziert zur Entfernung kleiner Exsudatmengen aus:

- Chronischen, akuten, traumatischen, subakuten und dehiszenten Wunden
- Ulzerationen (u. a. diabetische, venöse oder Druckulzera)
- Chirurgisch verschlossenen Inzisionen
- Gewebelappen und Transplantaten

NEIN

JA

Wundeigenschaften, bei denen das SNAP™ System angezeigt sein könnte

- Wundheilung langsamer als bei diesem Wundtyp erwartet
- Geringe bis mäßige Exsudatmenge
- Exsudat von geringer bis mittlerer Viskosität
- Keine Granulation des Wundgrundes
- Granulation des Wundgrundes ohne Epithelisierung
- Wundhöhle geringer Tiefe < 3 cm

NEIN

JA

Merkmale des Patienten, bei welchen der Einsatz eines SNAP™ Systems indiziert ist

- Größe der Wunde < 13 cm x 13 cm
- Exsudatproduktion < 180 ml pro Woche
- Aktive, ambulante oder ältere Patienten
- Patient kann und möchte aktiv an der Behandlung beteiligt sein oder kann auf adäquate Unterstützung bei der Pflege zurückgreifen
- Patient reagiert nicht allergisch auf Hydrokolloid-Auflagen oder Polyurethan

NEIN

JA

Beginnen Sie die Behandlung mit dem SNAP™ Therapy System mit zunächst mindestens zwei Verbandwechseln pro Woche bei starker Exsudatproduktion entsprechend öfter. Wundmanagement wöchentlich bewerten.

Gegenanzeigen:


- Aktive Blutung
- Malignität
- Unbehandelte Osteomyelitis
- Freiliegende Organe, Gefäße, Nerven, Anastomosen
- Fieber
- Aktive Infektion
- Ungenügende Drainage
- Nekrotisches Gewebe

HALTI! MÖGLICHERWEISE SIND ANDERE BEHANDLUNGSMETHODEN ANGEZEIGT


Anwendung des SNAP™ Systems

Bereiten Sie den Wundgrund und die Haut in der Wundumgebung gemäß der Standards in Ihrer Einrichtung vor. Tragen Sie gegebenenfalls einen Hautschutz auf die umliegenden Hautbereiche auf und lassen sie ihn trocknen.

SCHRITT 1: Schneiden Sie den Schaum entsprechend der Größe und Form der Wunde zurecht. Entfernen Sie die Klebeauflagen, legen Sie das SNAP™ Dressing über die Wunde und versiegeln Sie diese.

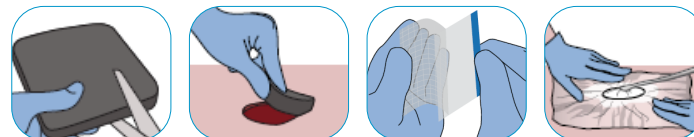

SCHRITT 2: Schneiden Sie gegebenenfalls die Schlauchleitung auf die erforderliche Länge. Stecken Sie das Verbindungsstück vollständig auf die Schlauchleitung.

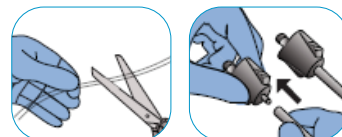


SCHRITT 3: Fixieren Sie die SNAP™ Kartusche auf dem Verbindungsstück und nehmen Sie hierzu beide Hände. Drücken Sie zum Aktivieren der SNAP™ Kartusche den Schlüssel nach unten. Zur Freigabe ziehen Sie ihn anschließend aus der Kartusche wieder heraus. Dieser Vorgang muss je nach Größe der Wundauflage möglicherweise mehrmals wiederholt werden.

HINWEIS: Bewahren Sie den Schlüssel auf. NICHT wegwerfen.



SCHRITT 4: Prüfen Sie, ob Unterdruck aufgebaut ist und hält. Das SNAP™ System funktioniert wie vorgesehen, wenn

- Der grüne Indikator konstant im Fenster auf der Kartusche sichtbar ist
- Die Wundauflage von unten angesaugt scheint
- Sich die Wundauflage bei Berührung fest anfühlt

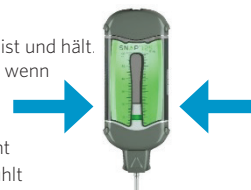


Anlegen der Wundauflage



Hinweis: Verwenden Sie in schwer zu versiegelnden Bereichen den SNAP™ SecurRing™ aus Hydrokolloid.


Anlegen des SNAP™ Advanced Dressing an der Ferse

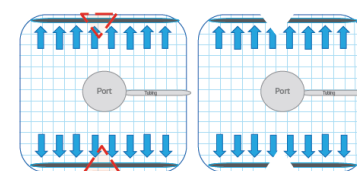

An der Ferse




Anlegen des SNAP™ Advanced Dressing bei Zehenamputation oder Keilresektion

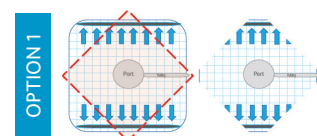

Zehenamputation/
Keilresektion

Option 1

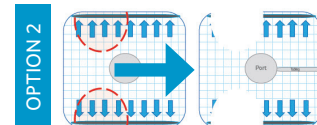

Zehenamputation/
Keilresektion

Option 2



Anlegen der SNAP™ Advanced Dressing nach transmetatarsaler Amputation (TMA)

