

**3M****Cavilon™**

Skin Care Solutions



# Schützen Sie Ihre Haut, wenn Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.

## Wahl des Hautschutzproduktes

Die wichtigste Überlegung bei der Entscheidung, wie Sie Ihre Haut beim Tragen von PSA im Gesicht schützen können, besteht darin, sicherzustellen, dass das Hautschutzprodukt die PSA und ihre Funktionalität nicht beeinträchtigt. Dies bedeutet, dass Sie ein Hautschutzprodukt wählen, das:

- ▶ nicht die Dichtigkeit der Atemschutzmaske und / oder den Sitz anderer PSA im Gesicht beeinträchtigt
- ▶ sich nicht von Ihrer Haut auf die PSA im Gesicht überträgt
- ▶ die Haut vor Reibung und Feuchtigkeit schützt (wasserfest)
- ▶ atmungsaktiv ist, sodass Feuchtigkeit von Ihrer Haut verdunsten kann
- ▶ nicht entfernt oder abgewaschen werden muss
- ▶ ein geringes Dermatitispotential hat

Aufgrund möglicher Probleme bei der Dichtigkeit und / oder Filtrationsfunktion einer der Atemschutzmasken von 3M empfiehlt 3M nicht die Verwendung von Vaseline (auch als Petrolatum bezeichnet), dicken Barrierecremes oder Verbänden wie Polyurethanschäumen und Hydrokolloiden.

**3M™ Cavilon™  
Reizfreier  
Hautschutz**



**3M™ Cavilon™ Advanced  
Skin Protectant**

# Proaktiver Hautschutz

3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz schützt intakte Haut vor Feuchtigkeit und Reibung. Bei sachgemäßer Anwendung ist nicht zu erwarten, dass die Passform von 3M Atemschutzmasken beeinträchtigt wird.

## Anwendungshinweise

- 1 Es sollte das 1 ml Wipe\* oder der 1 ml Applikator verwendet werden.
- 2 Das Produkt sollte auf saubere, trockene Haut in allen Bereichen aufgetragen werden, in denen die Atemschutzmaske wahrscheinlich Reibung verursacht und / oder in denen sich Feuchtigkeit ansammeln kann, z.B. der Nasenrücken, die Wangen, die Ohren oder die Stirn. Es kann im Gesicht angewendet werden, sollte jedoch nicht im Auge oder am Augenlid aufgetragen werden.



- 3 Das Produkt sollte vollständig trocknen (mindestens 90 Sekunden warten), bevor die Atemschutzmaske angelegt (aufgesetzt) wird. Dadurch kann Flüssigkeit auf der Haut trocknen und Dämpfe verdunsten. **Bei der Anwendung kann ein Geruch entstehen wenn der Lösungsmittelbestandteil verdunstet. Der Geruch verschwindet, wenn das Produkt getrocknet ist.**
- 4 Wir empfehlen, mit einer einmal täglichen Anwendung zu beginnen. Wenn die Produktschicht zu dick wird, verringern Sie die Anwendungshäufigkeit, auf z.B. 3 mal pro Woche.
- 5 Cavilon™ Reizfreier Hautschutz kann mit einem medizinischen Klebstoffentferner entfernt werden.



Träger von Atemschutzmasken sollten immer die modellspezifischen Gebrauchsanweisungen befolgen, einschließlich der Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung, jedes Mal wenn eine Atemschutzmaske angelegt wird.

In der Produktbeilage (Gebrauchsanweisung) finden Sie vollständige Indikationen und Gebrauchsanweisungen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

\* Nicht in Deutschland erhältlich.

# Geschädigte Haut schützen.



3M™ Cavilon™ Advanced\* kann zum Schutz geschädigter Haut verwendet werden, z.B. bei Verletzungen durch Reibung oder andere oberflächliche Hautschäden.

## Anwendungshinweise

- 1 Der 0,7 ml Applikator \* wird empfohlen.
- 2 Das Produkt kann in Bereichen mit Rötungen oder oberflächlichen Hautverletzungen aufgetragen werden, z.B. auf dem Nasenrücken, den Wangen, den Ohren oder der Stirn. Das Produkt sollte nicht am oder im Auge angewandt werden.
- 3 Das Produkt sollte in einer dünnen Schicht aufgebracht werden.



- 4 Das Produkt sollte vollständig trocknen (mindestens 90 Sekunden warten), bevor die Atemschutzmaske angelegt (aufgesetzt) wird. Dadurch kann Flüssigkeit auf der Haut trocknen und Dämpfe verdunsten. Bei der Anwendung kann ein Geruch entstehen, wenn der Lösungsmittelbestandteil verdunstet. Der Geruch verschwindet, wenn das Produkt getrocknet ist.
- 5 Wir empfehlen, mit 2–3 Anwendungen wöchentlich zu beginnen. Wenn die Produktschicht zu dick wird, verringern Sie die Häufigkeit der Anwendung, auf z.B. 1–2 mal pro Woche.
- 6 Cavilon Advanced kann mit einem medizinischen Klebstoffentferner entfernt werden, der Hexamethyldisiloxan oder ein Silikon enthält.

## Hinweis

\* Wenn der 2,7-ml-Applikator verwendet wird, werden die folgenden Schritte empfohlen, um das Tropfen oder Sammeln von Flüssigkeit während der Anwendung zu minimieren:

- 1 Öffnen und behalten Sie die Verpackung in der Nähe.
- 2 Aktivieren Sie den Applikator und lassen Sie die Flüssigkeit in den Schaumstoff fließen.
- 3 Drücken Sie den Schaumapplikator gegen die weiße Verpackungsabdeckung, um überschüssige Flüssigkeit auszudrücken.



- 4 Dann wie angegeben anwenden.



3M Deutschland GmbH  
Health Care  
Carl-Schurz-Str. 1  
41460 Neuss  
Tel.: +49 (0)2131 881 9260  
3Mmedica.de@mmm.com  
www.3M.de/medicalsolutions

3M (Schweiz) GmbH  
Health Care  
Eggstrasse 91  
8803 Rüslikon  
Tel.: +41 44 724-9090  
Innovation.ch@mmm.com  
www.3Mschweiz.ch/medicalsolutions

3M Österreich GmbH  
Health Care  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel.: +49 2131 14-4818  
Medizin-at@mmm.com  
www.3Mautria.at/medicalsolutions

Weitere Informationen finden Sie unter:

[www.3m.de/Covid](http://www.3m.de/Covid)

[3Mautria.at/Covid](http://3Mautria.at/Covid)

[3Mschweiz.ch/de/Covid](http://3Mschweiz.ch/de/Covid)

3M, Cavilon and Tegaderm are trademarks of 3M Company.  
© 3M 2020. All rights reserved.  
OMG90568. 2020-0064.

