


# ACTISORB™ SILVER 220

## ANTIMICROBIAL BINDING DRESSING

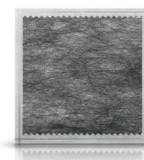

### Was ist die ACTISORB™ SILVER 220 Wundauflage?

ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage ist eine Aktivkohle-Wundauflage mit Silber, eingeschlossen in einer nicht-haftenden Nylonhülle.

### Wofür wird sie verwendet?

Die ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage hilft, unangenehme Wundgerüche zu eliminieren, indem der Geruch in der Wundauflage eingefangen wird. Das Silber bildet eine Barriere gegen das Eindringen von Bakterien, in dem die Bakterien in der Wundauflage gebunden werden und reduziert das Risiko einer Wundinfektion. Da Wundgeruch von Wundflüssigkeit begleitet sein kann, kann die ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage die Wunddrainage unterstützen, wenn sie mit einem adäquaten Sekundärverband, wie z. B. einer Schaumstoffwundauflage, kombiniert wird.

**Kontraindikationen:** ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage darf nicht auf Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.

**Hinweise:** ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage darf nicht an Patienten mit bekannten Allergien gegenüber Silber verwendet werden. Nur für den externen Gebrauch. Nur zur Einmalverwendung. Verwenden Sie die ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage nach Gebrauch nicht wieder.

## Wie wird es angewendet?


### Vorbereitung der Wunde

Bereiten Sie die Wunde gemäß der aktuellen Leitlinien zur Wundbehandlung, wie von Ihrem Arzt angewiesen, vor. Waschen Sie vor und nach der Anwendung die Hände. Falls vom Arzt empfohlen, verwenden Sie Handschuhe.

### Auswahl der Wundauflage


Verwenden Sie gemäß der Anweisung Ihres Arztes eine Größe der ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage, die etwas größer als die Wunde ist.

### Vorbereitung der Wundauflage

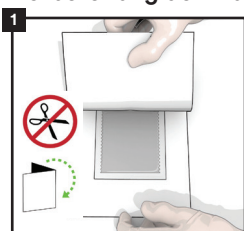


1. Entnehmen Sie die Wundauflage aus der Verpackung.
2. Falls notwendig, können Sie die Wundauflage passend zur Wundgröße falten. (Schneiden Sie die Wundauflage nicht zu)

### Applikation der Sekundär-Wundauflage

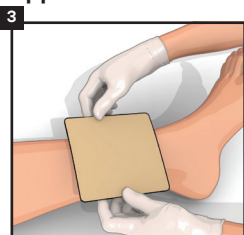


- Decken Sie die **ACTISORB™ Silver 220** Wundauflage mit einer Sekundär-Wundauflage ab und fixieren Sie sie damit, wie von Ihrem Arzt angewiesen. Falls nötig, sollte die Wundauflage in Position gehalten werden, um die Applikation zu erleichtern.

### Applikation der Wundauflage

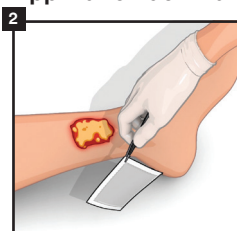

- Legen Sie **ACTISORB™ Silver 220** Wundauflage auf die Wunde. Sie können beide Seiten der **ACTISORB™ Silver 220** Wundauflage auf die Wunde legen. Die Eigenschaften der Wundauflage können am effektivsten genutzt werden, wenn sie direkten Kontakt mit dem Wundbett hat.

### Verbandwechsel und Entfernen der Wundauflage

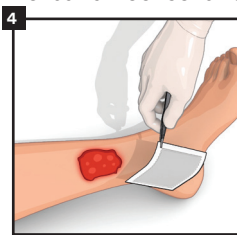

1. Entfernen Sie die Sekundär-Wundauflage wie von Ihrem Arzt empfohlen, um die **ACTISORB™ Silver 220** Wundauflage zu wechseln.
2. Möglicherweise empfiehlt Ihnen Ihr Arzt, anfangs die **ACTISORB™ Silver 220** Wundauflage alle 24 h zu wechseln. Wurde kein Wechselintervall bestimmt, stellen Sie sicher, dass die Wundauflage mindestens alle 7 Tage gewechselt wird.
3. Entfernen Sie die **ACTISORB™ Silver 220** Wundauflage vom Wundbett am 7. Tag oder wie von Ihrem Arzt empfohlen. Fragen Sie Ihre medizinische Fachkraft, wie diese ordnungsgemäß entsorgt werden soll.

## Wie oft soll es angewendet werden?

Die ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben, abhängig vom Exsudataufkommen. Die Sekundär-Wundauflage zur Absorption kann nach Bedarf gewechselt werden.

**Bitte beachten Sie:** Dieses Dokument ist für die Selbstversorgung des Patienten nach Anleitung dessen medizinischer Fachkraft gedacht und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.

**Bitte beachten Sie:** Für diese Produkte und Therapien gibt es spezifische Indikationen, Kontra-indikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung eine medizinische Fachkraft sowie die Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung ist für medizinische Fachkräfte bestimmt.

©Copyright 2020 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M und die anderen gezeigten Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken. Die unberechtigte Nutzung ist untersagt. PRA-PM-ALL-00375 (04/20)

## Häufig gestellte Fragen

### Kann ich die Wundauflage zuschneiden?

Nein, ACTISORB™ Silver 220 Wundauflage kann nicht zugeschnitten werden. Partikel aus der Wundauflage können in die Wunde gelangen und Verfärbungen verursachen.

