

KERRAMAX CARE™

SUPER-ABSORBENT DRESSING

Patienteninformation

Was ist die KERRAMAX CARE™ superabsorbierende Wundauflage?

Die KERRAMAX CARE™ Wundauflagen bieten ein Portfolio an hoch-absorbierenden Wundauflagen für die Anwendung bei stark exsudierenden Wunden. Werden große Exsudatmengen oder nasse Wunden nicht konsequent behandelt, kann sich der Heilungsprozess verzögern. KERRAMAX CARE™ Wundauflagen nehmen große Mengen an Exsudat auf und schließen Bakterien im Inneren der Wundauflage ein. Dadurch können weitere Schädigungen der intakten wundumgebenden Haut reduziert werden.


Wie können Ihnen die KERRAMAX CARE™ Wundauflagen helfen? Wofür können sie angewendet werden?

Die KERRAMAX CARE™ Wundauflagen sind weich und flexibel. Sie können zur Versorgung Ihrer Wunde beidseitig verwendet werden. Die Wundauflage nimmt große Exsudatmengen und Bakterien auf schließt sie im Kern ein und erhöht damit die Chance zur Wundheilung.


Wie wird sie angewendet?

1. Waschen Sie gründlich Ihre Hände.
2. Reinigen Sie Ihre Wunde gemäß der Anweisung Ihres medizinischen Fachpersonals.
3. Wählen Sie eine geeignete Größe der Wundauflage aus. Die Wundauflage sollte 2 cm über den Wundrand ragen.
4. Öffnen Sie die Verpackung und legen Sie die Wundauflage auf die Wunde. Die Wundauflage kann beidseitig verwendet werden.
5. Fixieren Sie die Wundauflage gemäß der Empfehlung Ihrer medizinischen Fachkraft mit einem Verband oder einem medizinischen Klebeband.
6. Überprüfen Sie regelmäßig die Wundauflage. Wenn die Wundauflage nass und schwer wird, ist das ein Zeichen dafür, dass ein Verbandwechsel notwendig ist. Tauschen Sie sie durch eine neue KERRAMAX CARE™ Wundauflage aus indem Sie die Schritte 1 - 5 wiederholen.

Zwischen Zehen und Fingern

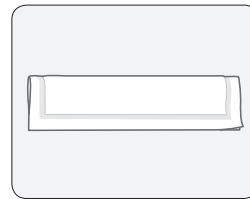


1. Falten Sie eine Wundauflage in geeigneter Größe der Länge nach.

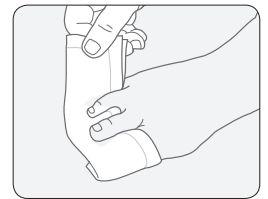


2. Wickeln Sie sie zwischen die Zehen.

Technik zur Anwendung am Bein

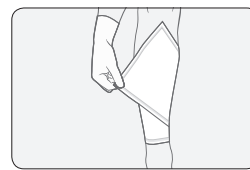


1. Legen Sie eine Wundauflage in geeigneter Größe an das untere Beinende an.

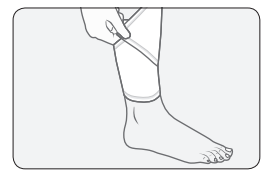

2. Wickeln Sie die Wundauflage um das Bein.



3. Achten Sie darauf, dass die Wundauflage überlappt, damit keine Lücken entstehen.

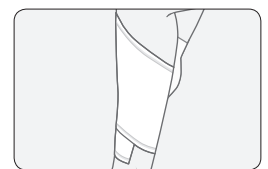

4. Fixieren Sie die Wundauflage mit einem Fixier- oder Kompressionsverband oder einem medizinischen Klebeband.

Häufig gestellte Fragen

1. Kann ich KERRAMAX CARE™ unter meinem Kompressionsverband verwenden?

Ja, die KERRAMAX CARE™ Wundauflagen können unter allen Arten von Kompressionsverbänden angewendet werden.

2. Kann ich KERRAMAX CARE™ Wundauflagen zuschneiden?

Nein, KERRAMAX CARE™ Wundauflagen können nicht zugeschnitten werden. Sie können jedoch gefaltet werden und ermöglichen so, eine Vielzahl an verschiedenen Wundformen zu verbinden.

3. Meine Wunde ist trocken. Sollte ich KERRAMAX CARE™ Wundauflagen verwenden?

Nein, KERRAMAX CARE™ Wundauflagen sollten nicht auf trockenen Wunden verwendet werden, da die Aufnahmefähigkeit ein Anhaften oder ein Austrocknen der Wunde verursachen und zu Schmerzen führen kann.

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument ist für die Selbstversorgung des Patienten nach Anleitung dessen medizinischer Fachkraft gedacht und ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.

Bitte beachten Sie: Für diese Produkte und Therapien gibt es spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung eine medizinische Fachkraft sowie die Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung ist für medizinische Fachkräfte bestimmt.

© 2020 3M. All Rights Reserved. 3M and the other marks shown are marks and /or registered marks. Unauthorized use prohibited. PRA-PM-DE-00184 (08/20)



Partner für Wundprofis