

# 3M

# Filtek™

## Bulk Fill Flowable 大块流体树脂

# 易注射的大块充填树脂


3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable大块流体树脂，现在有了新的注射器，符合人体工学的设计，使注射轻松、简单。

### 减少气泡，减少溢出

避免气泡的产生，停止推送后材料立刻停止溢出，操作更易掌控。

### 显示余量

绿色推杆的长度即为材料的余量。当材料用尽时，只有白色手柄在外。

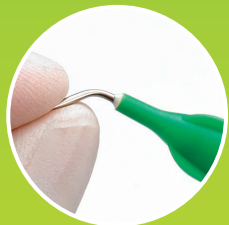

### 可弯曲的注射头

注射头可轻松弯曲，到达各个角落。

### 易于握持和注射

三角形的手柄，便于夹持，易于调整注射操作。



## 主要优势

- 避免气泡产生，避免材料溢出
- 可轻松弯曲注射头，到达各个角落
- 人体工学设计，易于握持和注射
- 单次注射层厚可达4mm
- 良好的适合性，低聚合收缩应力

## 可加热后使用

加热最高至70°C，最长1小时，重复最多25次。



## 简单快速的后牙修复



备洞，酸蚀，涂抹粘接剂(例如3M™ Single Bond Universal通用粘接剂)。



将3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable大块流体树脂充填入窝洞中，层厚可达4mm，使用3M Deep Cure-S光固化灯光照固化。



使用至少2mm厚的膏体树脂充填合面，例如3M™ Filtek™ Z350XT通用纳米树脂，光照固化。

病例来自 Dr. Reich, Seefeld, Germany

## 适应证

(单次层厚不超过4mm)



垫底  
(I、II类洞)



洞衬  
(I、II类洞)



微创修复<sup>1</sup>



III类洞



V类洞



间接修复体的  
(小范围修补)



修补<sup>2</sup>



填倒凹



窝沟封闭



堆核<sup>3</sup>

适应证详见说明书。

## 订货信息



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable大块流体树脂  
包括：2g大块流体树脂×2支/包（不含分配头）

颜色	产品规格
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
通用色	4862U

型号	产品信息
3740T	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative Dispensing Tips分配头 包括：20个分配头/包



**3M**

3M中国总办事处

上海市长宁区兴义路8号万都中心大厦38楼 邮编：200336

电话：86-21-62753535 传真：86-21-62752343

欢迎访问 [www.3M.com.cn/dental](http://www.3M.com.cn/dental)

<sup>1</sup> 包括小范围的、承受咬合力轻的合面修复。

<sup>2</sup> 修补临时修复体和复合树脂修复体。

<sup>3</sup> 当冠部牙体组织剩余一半以上时。