

INADINE™

(PVP-I) NICHTHAFTENDE WUNDAUFLAGE

10 Fakten über die INADINE™ Wundauflage



Bitte entnehmen Sie wie bei allen Wundauflagen die vollständigen Informationen der Packungsbeilage.

- 1 Die INADINE™ Dressing Wundauflage ist für folgende Indikationen angezeigt.**

Für die Behandlung ulzerierender Wunden und zur Prävention von Infektionen bei leichten Verbrennungen und leichten traumatischen Wunden mit Hautverlust.

Wundauflagen, die langsam Iod freisetzen, werden für die Behandlung einer Reihe chronischer Wunden eingesetzt, wie z. B. diabetischen oder venösen Ulzera, bei denen eine Infektion vermutet wird.¹
- 2 Die INADINE™ Wundauflage ist effektiv***

Sie verfügt über ein breites antimikrobielles Aktivitätsspektrum, einschließlich gegen MRSA.²
- 3 Die INADINE™ Wundauflage ist sicher, wenn sie gemäß der Gebrauchsanweisung angewendet wird.**

Die INADINE™ Wundauflage eignet sich für die Anwendung an Erwachsenen und Kindern. Die Anwendung an Neugeborenen, Babies unter 6 Monaten und schwangeren oder stillenden Frauen muss unter medizinischer Aufsicht erfolgen.¹
- 4 Die INADINE™ Wundauflage ist einfach in der Anwendung**

Die INADINE™ Wundauflage kann auf die Wundgröße zugeschnitten werden, ohne auszufasern oder sich aufzulösen.
- 5 Die INADINE™ Wundauflage enthält 10% Povidon-Iod (<1% verfügbares Iod)**

Die Menge wird in der Regel bei Patienten mit normaler Schilddrüsen-Funktion ausgeglichen und eliminiert.
- 6 Die INADINE™ Wundauflage kann unter medizinischer Aufsicht an Patienten mit Schilddrüsen-Erkrankungen angewendet werden.**

Die INADINE™ Wundauflage sollte nur unter medizinischer Aufsicht an Patienten mit Schilddrüsen-Erkrankungen angewendet werden. Eine Vielzahl von Studien hat die Schilddrüsenfunktion während klinischer Tests mit PVP-I untersucht und festgestellt, dass sie unverändert bleibt.^{1,3}
- 7 Die INADINE™ Wundauflage kann zur Prophylaxe verwendet werden.⁴**

Es besteht zu manchen iodhaltigen Produkten die Aussage, dass sie nur bis zu drei Monate lang verwendet werden dürfen. Diese Produkte enthalten jedoch einen bedeutend höheren Anteil an freiem Iod, das systemisch aufgenommen werden könnte. Falls die INADINE™ Wundauflage länger als eine Woche angewendet wird, sollte es unter medizinischer Aufsicht erfolgen.

Es gibt keine vorgeschriebene Einschränkung in der Anwendungsdauer, wenn die INADINE™ Wundauflage unter medizinischer Aufsicht angewendet wird.

Eine professionelle Wundversorgung empfiehlt eine regelmäßige Begutachtung der Wunde und der Wundauflage.
- 8 Die INADINE™ Wundauflage verzögert nachweislich nicht die Wundheilung**

In einer umfassenden Evaluierung der Wirkung von Povidon-Iod im Bezug auf die Wundheilung wurde festgestellt, dass "Präparate, die Povidon-Iod enthalten, keinen nachteiligen Effekt auf die Wundheilung haben".⁵
- 9 Die INADINE™ Wundauflage verursacht keine dauerhaften Verfärbungen**

PVP-I ist ein Iodophor, in dem Iod als komplexierte Form transportiert wird. Die Konzentration an freiem Iod ist sehr gering. Da PVP ein nicht-ionisches Tensid ist, färbt es nicht ab und ist nicht reizend.
- 10 Die INADINE™ Wundauflage hat einen visuellen Indikator für den Verbandwechsel**

Die INADINE™ Wundauflage verändert die Farbe von orange zu weiß, wenn das Povidon-Iod aufgebraucht ist. Wenn sich die Farbe zu weiß ändert, muss die Wundauflage gewechselt werden.

* wie in vitro getestet

Referenzen: 1. Sibbald RG et al. Iodine Made easy. Wounds International 2011;2(2). 2. Reimer K et al. Antimicrobial effectiveness of povidone-iodine and consequences for new application areas. Dermatology. 2002; 204 (suppl1):114-120. 3. Zellner PR, Buygi S. Povidone-iodine in treatment of burns patients. Journal of Hospital Infection. 1985; 6:139-46. 4. Cooper RA. Iodine revisited. International Wound Journal. 2007;4:124-137. 5. 2. Goldenheim PD. An appraisal of povidone-iodine and wound healing. Postgraduate Medical Journal. 1993; 69 (suppl. 3): 97-105. 6. ScienceDirect. Iodophor. ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/iodophor>. Accessed on 27th April 2020.

NOTE: Für KCI-Produkte und -Therapien gibt es spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung eine medizinische Fachkraft sowie die Gebrauchsanweisung.

©Copyright 2020 3M. All rights reserved. 3M and the other marks shown are marks and/or registered marks. Unauthorized use prohibited. PRA-PM-DE-00177 (07/20).

3M + **KCI**™