

# 3M™ アテスト™ 生物学的インジケータ選択ガイド

ご施設の滅菌条件に適した生物学的インジケータの選択をサポートいたします。

該当する条件が見つからない場合弊社担当営業またはカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。



据え置き型滅菌器



卓上型滅菌器

ご使用の滅菌器はどちらのタイプですか？

空気排除方式をご確認ください

## プレバキューム式

※正確な情報は滅菌器メーカーにお問い合わせください。



圧力計の目盛りに  
マイナス表記がある

真空ポンプが搭載された滅菌器  
包装済、未包装、固体、中腔及び多孔性  
(ガーゼ等)の医材など幅広い製品の滅  
菌に対応可能

## 重力置換式

※正確な情報は滅菌器メーカーにお問い合わせください。



圧力計の目盛りが  
ゼロから始まる

真空ポンプ非搭載の滅菌器  
空気排除の真空工程が省かれており  
主に未包装の個体製品の滅菌に対応

滅菌温度は何度ですか？

121℃

132～135℃

滅菌時に医材を包装しますか？

YES

NO

滅菌時間は何分ですか？

30min 以上

30min 未満

滅菌時間は何分ですか？

4min 以上

4min 未満

滅菌条件は 132～135℃  
3min 以上ですか？

YES

NO

41382/41382F



1296/1296F



41482V/VF



24  
分判定

1292



1491



24  
分判定

1291





おすすめのインジケータ

## 3M™ アテスト™ 超短時間判定用生物学的モニタリングシステム



### 3M™ アテスト™ オートリーダー

製品名称	3M™ アテスト™ オートリーダー 490		3M™ アテスト™ ミニオートリーダー 490M	
判定時間	24分			
サイズ	幅 22cm、奥行き 23cm、高さ 8.5cm		幅 15.5cm、奥行き 5.25cm、高さ 8.25cm	
同時培養本数	10本		4本	
ネットワーク連携機能	施設のイントラネット上でウェブアプリを介した判定結果の確認が可能		非対応	

### 3M™ アテスト™ 超短時間判定用生物学的インジケータ

	製品番号	仕様	入れ目
			本/袋・箱
	1492V	高圧蒸気滅菌用 適用範囲：132～135℃ 4分間以上 24分判定	50
	1491	ハイスピード高圧蒸気滅菌用 ※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用 適用範囲：132～135℃ 3分間以上 24分判定	50

### 3M™ アテスト™ 超短時間判定用プロセスチャレンジデバイス(PCD)



	製品番号	仕様	PCD内 1492V	PCD内 1243	コントロール用 1492V	入れ目
			本	枚	本	セット/箱
	41482V	高圧蒸気滅菌用 適用範囲：132～135℃ 4分間以上 24分判定	1	1	24	24
	41482VF		1	1	5	24
	1496V		1	—	24	24
	1496VF		1	—	5	24

## 3M™ アテスト™ 短時間判定用生物学的モニタリングシステム



### 3M™ アテスト™ オートリーダー

製品名称	3M™ アテスト™ オートリーダー 390	
判定時間	高圧蒸気滅菌用 3時間/ハイスピード高圧蒸気滅菌用 1時間	
サイズ	幅 22cm、奥行き 23cm、高さ 8.5cm	
同時培養本数	10本	
ネットワーク連携機能	施設のイントラネット上でウェブアプリを介した判定結果の確認が可能	

### 3M™ アテスト™ 短時間判定用生物学的インジケータ

	製品番号	仕様	入れ目
			本/箱
	1292	高圧蒸気滅菌用 3時間判定	50
	1291	ハイスピード高圧蒸気滅菌用 1時間判定	50

### 3M™ アテスト™ 短時間判定用プロセスチャレンジデバイス(PCD)

	製品番号	仕様	PCD内 1292	PCD内 1243	コントロール用 1292	入れ目
			本	枚	本	セット/箱
	41382	高圧蒸気滅菌用 適用範囲：121℃ 30分以上 3時間判定	1	1	16	16
	41382F		1	1	4	16
	1296	高圧蒸気滅菌用 3時間判定	1	—	25	25
	1296F		1	—	5	25

3M、アテストは、3M社の商標です。

2021年1月発行




スリーエム ジャパン株式会社  
http://go.3M.com/medical-jp/

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2021. All Rights Reserved.  
HPM-984-A (012101) IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-321

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)