


KERRAMAX CARE™

PANSEMENT SUPER-ABSORBANT

KERRAGAMI™





Les pansements KERRAMAX CARE™ sont très conformables et peuvent être pliés afin de s'adapter à toutes sortes de plaies.

Entre les orteils/doigts

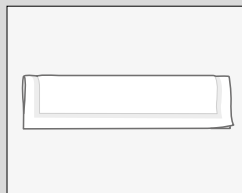

1. Plier un pansement de 10 cm x 22 cm en deux dans le sens de la longueur
2. Le passer entre les orteils/doigts

Talon/coude

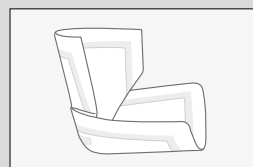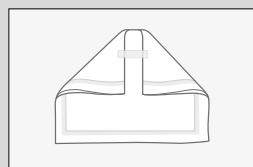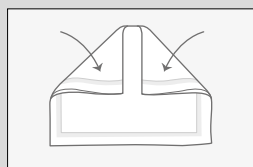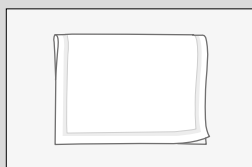

1. Plier un pansement de 10 cm x 22 cm / 20cm x 22cm en deux
2. Plier chaque coin vers l'intérieur
3. Placer un morceau de ruban adhésif pour maintenir les coins pliés
4. Ouvrir le pansement plié
5. Le placer sur le talon/coude

Jambe/bras



1. Placer un pansement de 20 cm x 50 cm à la base de la jambe/du bras
2. Envelopper la jambe/le bras avec le pansement
3. Superposer le pansement pour éviter les espaces
4. Maintenir le pansement en place avec un bandage ou une compression

Pour en savoir plus sur les bénéfices des pansements KERRAMAX CARE™, veuillez contacter votre représentant KCI ou vous rendre sur le site acelity.com

REMARQUE : Des indications, des contre-indications, des avertissements, des précautions et informations de sécurité peuvent exister pour les produits Systagenix, Crawford et KCI (entreprises Acelity). Veuillez consulter un fournisseur de produits de santé et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

Pansement KERRAMAX CARE™ : dispositif médical de classe IIb, BSI 2797.

©Copyright 2020 3M. All rights reserved. 3M and the other marks shown are marks and/or registered marks. Unauthorised use prohibited. PRA-PM-FR-00141 (03/20)

3M + **KCI**™