
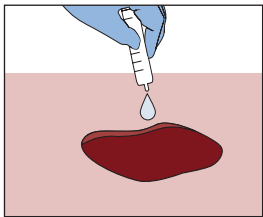
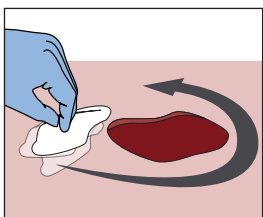
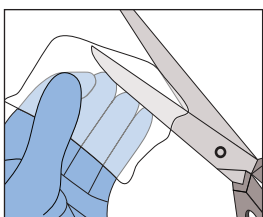
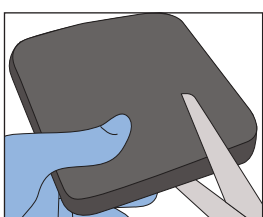
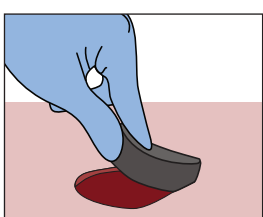
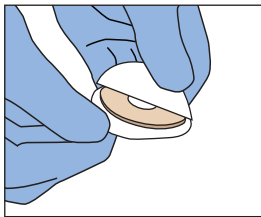
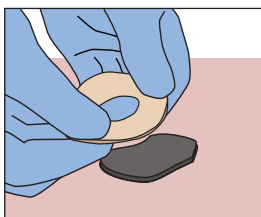
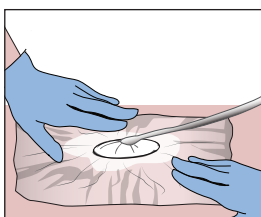
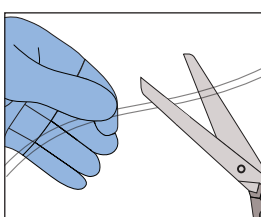
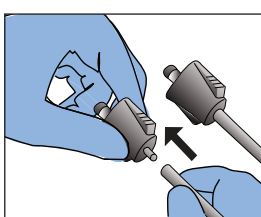
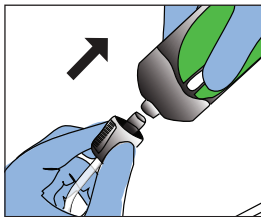
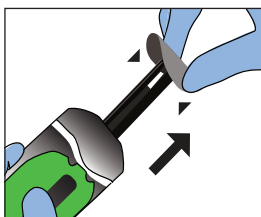
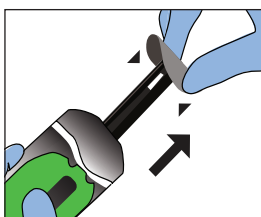
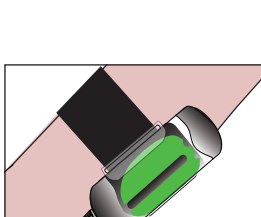


Hoe aan te brengen


- 1** Bereid het wondbed en de huid rondom de wond voor volgens het protocol van de instelling en irrigeer het wondbed grondig met gewone zoutoplossing.
- 2** Breng indien nodig een huidbeschermers aan op de omliggende huid en laat deze drogen.
- 3** Knip indien nodig een enkele laag grofmazig, niet-klevend wondverband op maat van de wond en plaats het op het wondbed.
- 4** Knip de foaminterface op de grootte en de vorm van de wond.
- 5** Plaats de foaminterface in de wondopening. De foaminterface moet de wondopening vullen en boven de randen van de wond uitsteken.
- 6** Verwijder indien nodig de SNAP™ SecurRing™ Hydrocolloid uit de verpakking. Verwijder de verwijderingsstrip van beide oppervlakken.
- 7** Vouw, rek, druk of rol indien nodig de SNAP™ SecurRing™ Hydrocolloid voorzichtig in elke willekeurige vorm zodat deze rond de buitenkant van de wond past. Laat daarbij ongeveer 1 cm intacte huid open tussen de SNAP™ SecurRing™ Hydrocolloid en de rand van de wond.
- 8** Verwijder het schutvel en plaats de SNAP™ Advanced Dressing over de wond en sluit de wond goed af.
- 9** Knip indien nodig de wondverbandslangen in een juiste hoek af op de gewenste lengte.
- 10** Duw de slangaansluiting volledig in de slang.
- 11** Sluit de SNAP™ Therapy Cartridge aan op de slangaansluiting. Gebruik beide handen.
- 12** Druk de activerings-/resetsleutel naar beneden en verwijder de sleutel van de SNAP™ Cartridge om de SNAP™ Cartridge te activeren. De cartridge moet mogelijk meerdere keren geprimeerd worden, afhankelijk van de grootte van het wondverband.
- 13** Controleer de werking van de negatieve druk. Het SNAP™ System werkt goed als:
 - de groene capaciteitsindicator zichtbaar is en in het kamervenster blijft;
 - het wondverband er samengetrokken uitziet;
 - het wondverband hard aanvoelt.
- 14** Bevestig de SNAP™ Cartridge aan de arm of riem van de patiënt met de SNAP™ Therapy Strap (indien gebruikt)

Tips en trucs voor uitdagende anatomische gebieden


Aanbrengen op de hiel

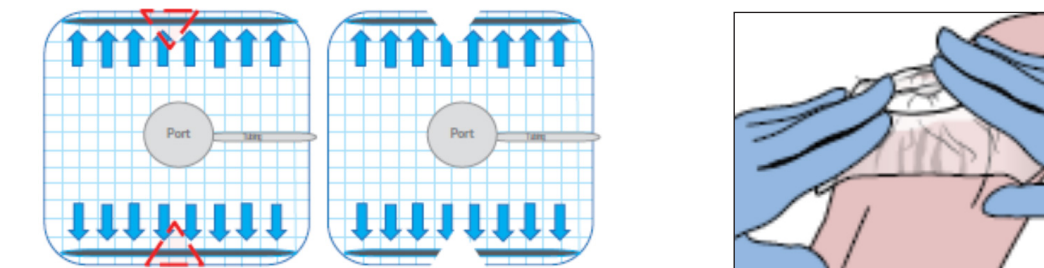


Aanbrengen op een teen I

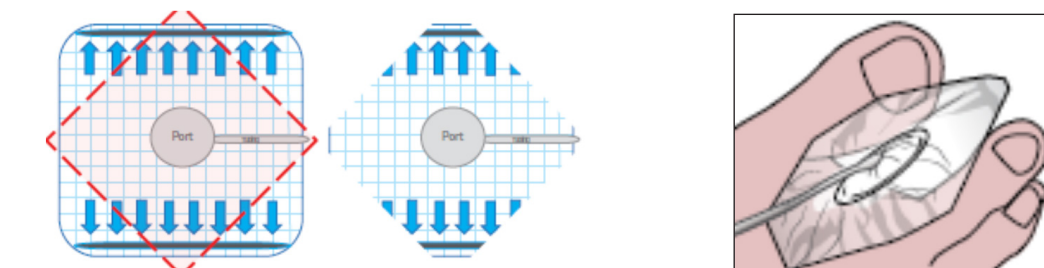

Aanbrengen op een teen II

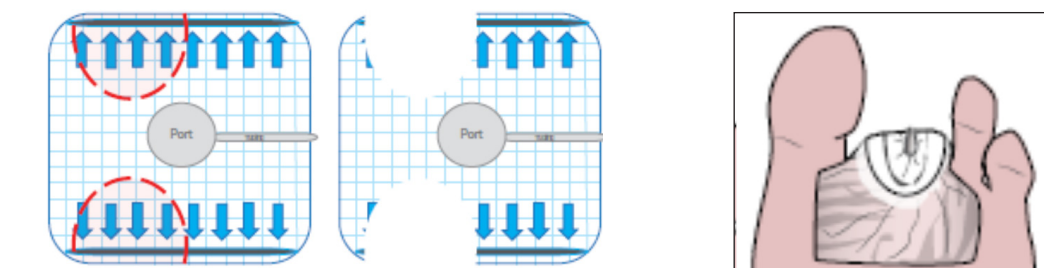

Transmetatarsale amputatie (TMA):

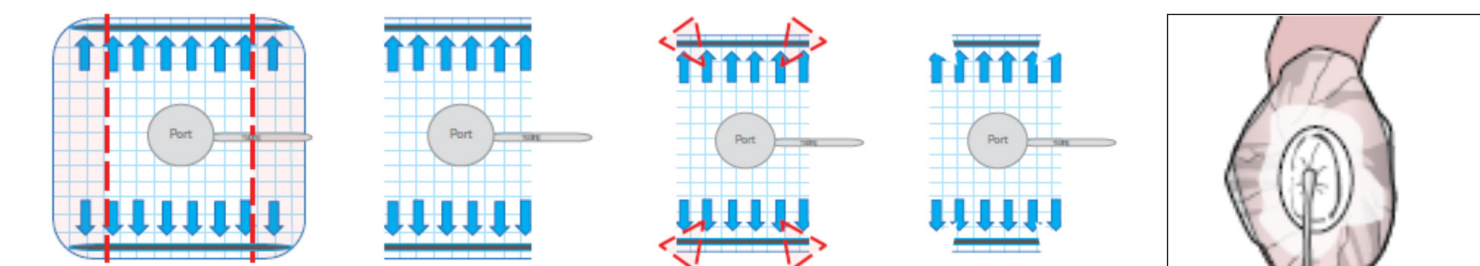

Bestelinformatie

SNAP™ Therapy Cartridge				SNAP™ SecurRing™ Hydrocolloid	SNAP™ Bridge Dressing Kit	SNAP™ Therapy Strap	SNAP PLUS™ Therapy Strap	SNAP™ Advanced Dressing Kit			
											
Artikelnummer: SNPA125P Druk: -125 mmHg Capaciteit: 150 ml	Artikelnummer: SNPA125 Druk: -125 mmHg Capaciteit: 60 ml	Artikelnummer: SNPA100 Druk: -100 mmHg Capaciteit: 60 ml	Artikelnummer: SNPA075 Druk: -75 mmHg Capaciteit: 60 ml	Artikelnummer: SRNG10 Grootte: Diameter van 5 cm	Artikelnummer: BKT14X11 Grootte: 14 cm x 11 cm Interface: Foam Artikelnummer: BKT14X11S Grootte: 14 cm x 11 cm met SNAP™ SecurRing™ Hydrocolloid Interface: Foam	Artikelnummer: STPAS Grootte: Small, 46 cm Artikelnummer: STPAM Grootte: Medium, 53 cm Artikelnummer: STPAL Grootte: Large, 61 cm	Artikelnummer: STPAS Grootte: Small, 46 cm Artikelnummer: STPAMP Grootte: Medium, 53 cm Artikelnummer: STPALP Grootte: Large, 61 cm	Artikelnummer: SKTF10X10 Grootte: 10 cm x 10 cm Interface: Netvormig open-celloam (blauw)	Artikelnummer: SKTF15X15 Grootte: 15 cm x 15 cm Interface: Netvormig open-celloam (blauw)	Artikelnummer: SKTF20X20 Grootte: 20 cm x 20 cm Interface: Netvormig open-celloam (blauw)	Artikelnummer: SKTF14X34 Grootte: 14 cm x 34 cm Interface: Netvormig open-celloam (blauw)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

OPMERKING: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

© 2021 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik niet toegestaan. PRA-PM-NL-00043 (01/21)