

3M™ V.A.C.® Ulta 4 Therapy met gebruik van 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ Dressing

Deze samenvatting van aanbrenginstructies mag alleen worden gebruikt in combinatie met de volledige veiligheids- en aanbrenginformatie die staat vermeld in de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd in de dozen van de V.A.C. Veraflo Cleanse Choice Dressing.



1 Wondpreparatie en aanbrengen van 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film (niet-prikkende barrièrefilm)

- ▶ Als de wond voorafgaand aan aanbrengen wordt schoongemaakt, zorg dan dat al het necrotische, niet-levensvatbare weefsel, inclusief bot, korst en verhard dood weefsel wordt verwijderd volgens de instructies van de behandelend arts
- ▶ Zorg ervoor dat de wond en het gebied rondom de wond goed worden gereinigd, zoals voorgeschreven door de arts of het protocol van de instelling waar u werkzaam bent, voordat u het wondverband aanbrengt
- ▶ De huid moet schoon en droog zijn voordat de Cavilon No Sting barrier film (niet-prikkende barrièrefilm) kan worden aangebracht
- ▶ Breng een gelijkmatige coating aan over het hele wondgebied
- ▶ Laat goed drogen voordat de folie wordt aangebracht*




2 Plaatsing van de wondcontactlaag

- ▶ Bescherm gevoelige structuren, vaten en organen indien nodig met een niet-klevende contactlaag**
- ▶ Beoordeel de afmetingen en de pathologie van de wond, inclusief de aanwezigheid van ondermijningen of tunnels
- ▶ Knip de dunne of dikke afdeklaag van foam zo dat deze geëxploreerde tunnels en ondermijningen vult. Zorg dat foam in tunnels contact maakt met de afdeklaag. Plaats geen contactlaag in tunnels
- ▶ Knip de wondcontactlaag (de laag met grote openingen) zodanig dat deze het volledige wondbed bedekt en plaats hem voorzichtig in de wond over een niet-klevende contactlaag, indien gebruikt.

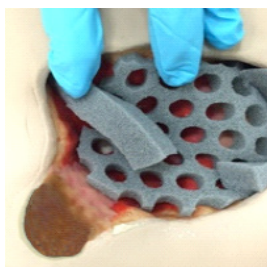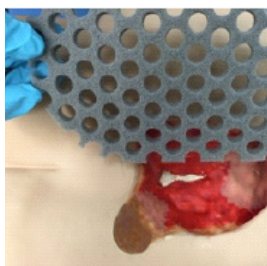


3 De wond vullen met de afdeklaag

- ▶ Knip de dunne of dikke afdeklaag zodanig dat deze de wonddiepte vult en plaats hem voorzichtig in de wond op de wondcontactlaag
- ▶ Breng niet te veel wondverband in de wond aan

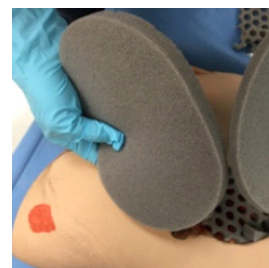

4 3M™ V.A.C.® Advanced Drape aanbrengen

- ▶ Knip de folie zo af dat deze het foam en een extra rand van ten minste 3–5 cm van intact weefsel rondom de wond bedekt
- ▶ Verwijder laag 1 om het kleefmiddel bloot te leggen en breng aan op de afdeklaag en intacte huid. Zorg er daarbij voor dat rimpels en plooiën in de huid worden gladgestreken
- ▶ Verwijder laag 2 en wrijf de folie aan, zodat er een occlusieve afdichting ontstaat.

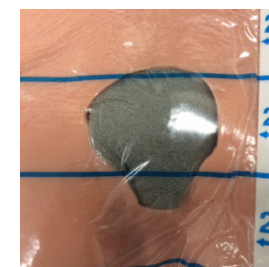

5 Plaatsing van de 3M™ V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad

- ▶ Bepaal waar u de pad wilt plaatsen. Let extra goed op hoe u de slangen plaatst voor een optimale doorstroom. Zorg ook dat deze niet over uitstekende botten of in weefselplooiën worden geplaatst
- ▶ Knip een gat van ongeveer 2,5 cm in de folie om de V.A.C. VeraT.R.A.C. Pad te bevestigen
- ▶ Verwijder beide schutvellen 1 en 2 om de kleeflaag zichtbaar te maken
- ▶ Positioneer de V.A.C. VeraT.R.A.C. Pad en breng hem aan over het gat van 2,5 cm
- ▶ Trek aan het blauwe lipje om de stabilisatielaag van de pad te verwijderen



* Cavilon No Sting Barrier Film (niet-prikkende barrièrefilm) is uitermate brandbaar. Laat het product minimaal 90 seconden drogen voordat u enig hulpmiddel toepast dat een ontstekingsbron zou kunnen vormen.


** Als er aanvullende niet-klevende materialen onder de contactlaag worden gebruikt, moeten deze compatibel zijn met de oplossing voor instillatie en moeten ze grofmazig of poreus zijn, of venstervormige openingen hebben, zodat wondvocht gemakkelijk kan worden verwijderd.

Opmerking:

- ▶ Wondverbanden moeten elke 48 tot 72 uur worden verwisseld, met een minimum van drie keer per week. De frequentie kan door de arts naar behoefte worden aangepast.
- ▶ Knip het wondverband niet boven het wondbed.
- ▶ Plaats niet te veel foam in de wond.
- ▶ Gebruik geen wondcontactlaag met gaten in tunnels of ondermijningen.

De unit instellen

6 De 3M™ V.A.C. Veralink™ Cassette bevestigen

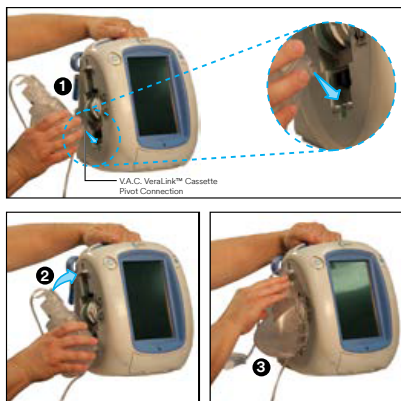


8 De zak/fles met vloeistof aanprikken en ophangen



9 De opvangbeker van 500 ml of 1000 ml bevestigen




7 De vloeistofarm uittrekken

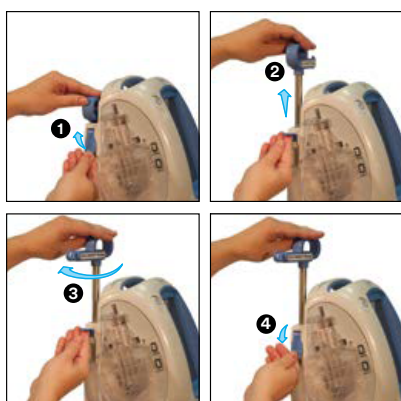

10 De wondverbandslang aansluiten

- Uitlijnen, drukken en draaien (na het aanbrengen van het wondverband)
- Sluit de instillatieslang en daarna de V.A.C.® Therapy-slang aan.

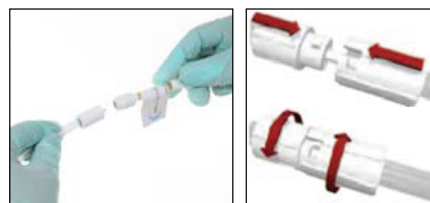

Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie over het aanbrengen van een wondverband.

3M™ V.A.C. Veraflo™ Therapy starten

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het lampje gaat branden.

Schermbild 'Choose Therapy' (Behandeling kiezen)

Schermbild 'Confirm Settings' (Instellingen bevestigen)

Schermbild Seal Check™ Leak Detector

Schermbild 'Fill Assist' (Vulhulp)

Schermbild 'Fill Assist' (Vulhulp)

Startscreen Veraflo Therapy

Selecteer **Veraflo Therapy**

Selecteer **OK** om de standaardinstellingen te accepteren

Het afvoeren begint

Selecteer **Start/Stop** in het scherm 'Fill Assist' (Vulhulp) om te beginnen met het toedienen van vloeistof aan de wond

Stop 'Fill Assist' (Vulhulp) door op **Start/Stop** te drukken. Selecteer **OK** wanneer u tevreden bent met het instillatievolume.

De Veraflo Therapy begint

De kleur van het wondverband blijft gelijk bij aanvang van de vulhulpfase.

Stop de 'Fill Assist' (Vulhulp) als de instillatievloeistof zich begint op te hopen rondom de V.A.C. VeraT.R.A.C.™ Pad.

3M

Distributed by:
GDM B.V.
 Hastelweg 224
 NL- 5652 CL Eindhoven
www.gdmedical.nl

KCI
 part of 3M

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw account manager of kijken op gdmedical.nl

Opmerking: Als een alarmconditie niet kan worden opgelost, dient u contact op te nemen met een zorgverlener of met KCI.

Opmerking: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor zorgverleners.

© 2021 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en de overige weergegeven merknamen zijn merken en/of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik niet toegestaan. PRA-PM-BE-00059 (05/21). OMI157921.