



V.A.C. ULTA™ Therapy

VERAFLO CLEANSE CHOICE™ Dressing

Diese Zusammenfassung sollte nur in Verbindung mit den Sicherheitshinweisen und Anwendungsinformationen verwendet werden, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese befinden sich in den V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE™ Dressing Kartons.

1. Wundvorbereitung und Anwendung des 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

- Die Wunde sollte vor der Anwendung debridiert werden, sodass avitales Gewebe, einschließlich Knochen, Schorf oder Beläge, wie vom behandelnden Arzt verordnet, entfernt werden.
- Vor jeder Verbandsanlage sollte die Umgebungshaut und die Wunde auf ärztliche Anordnung oder nach dem Klinikprotokoll gründlich gereinigt werden.
- Der Einsatz des 3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz vor der Anwendung hält die Haut sauber und trocken.
- Gleichmäßig den Hautschutz über den betroffenen Bereich auftragen.
- Vor dem Aufbringen der Folie alles gründlich trocknen lassen.*




2. Platzierung der Wundkontaktschicht

- Schutz der sensiblen Strukturen, Gefäße und Organe nach Bedarf mit einer nicht-haftenden Kontaktschicht.
- Wundgröße, pathologischen Zustand der Wunde inklusive Unterminierung oder Taschen beurteilen.
- Schneiden Sie den dünnen oder dicken Schaum so, dass dieser in Taschen oder Unterminierungen passt. Die Wundkontaktschicht muss mit dem Schaum in den Taschen und / oder Unterminierungen Kontakt haben. Auf keinen Fall die Wundkontaktschicht in Taschen oder Unterminierungen platzieren.



3. Auffüllen der Wunde mit der Deckschicht

- Schneiden Sie den dicken oder dünnen Schaum nach Bedarf zu, um diesen in der Wundtiefe über der Wundkontaktschicht zu platzieren.
- Den Schaum nicht in die Wunde stopfen.

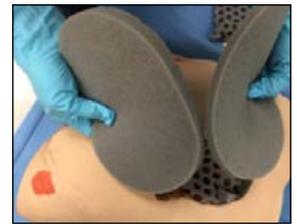

4. Anwendung V.A.C.® Advanced Drape

- Schneiden Sie die Folie so zu, dass diese den Schaum und zusätzlich 3-5 cm der intakten Umgebungshaut bedeckt.
- Entfernen Sie Lage 1 und platzieren Sie die klebende Seite über der Wunde und der intakten Haut.
- Entfernen Sie Lage 2 und drücken diese nach Anlage nochmals an, sodass Sie einen okklusiven Verschluss erreichen.
- Entfernen Sie das Lineal / die Stabilisierungsschicht.



5. Anlage V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad

- Wählen Sie die Pad-Lage. Positionieren Sie den Schlauch so, dass ein optimaler Fluss ermöglicht wird. Vermeiden Sie Knochenvorsprünge oder Falten.
- Folie anheben und ein 3,5 cm großes Loch in die Folie schneiden.
- Lage 1 und 2 der Pad-Folie entfernen, um die klebende Seite freizulegen.
- V.A.C. VERAT.R.A.C.™ Pad direkt über dem Loch platzieren.
- Ziehen Sie an der blauen Stabilisierungsschicht und entfernen diese.



*Cavilon Reizfreier Hautschutz ist leicht entflammbar. LASSEN SIE IHRE PRODUKTE FÜR MINDESTENS 90 SEKUNDEN TROCKNEN BEVOR EIN ANDERES GERÄT EINGESETZT WIRD.


** Wenn unter der Kontaktschicht ein nicht-haftendes Zusatzmaterial verwendet wird, muss dieses kompatibel mit der Instillationslösung sein. Zusätzlich sollte es porös oder gefenster sein, um die Entfernung der Flüssigkeit zu ermöglichen.

HINWEIS:


- **Verbandswechsel sollte alle 48 - 72 Stunden stattfinden oder mind. 3x wöchentlich.**
- **Den Schaum nicht über der Wunde schneiden.**
- **Den Schaum nicht in die Wunde stopfen.**
- **Die Wundkontaktschicht mit den Löchern nicht in Taschen oder Unterminierungen legen.**

Therapieeinheit vorbereiten

6. Anbringen der V.A.C. VERALINK™ Kasette

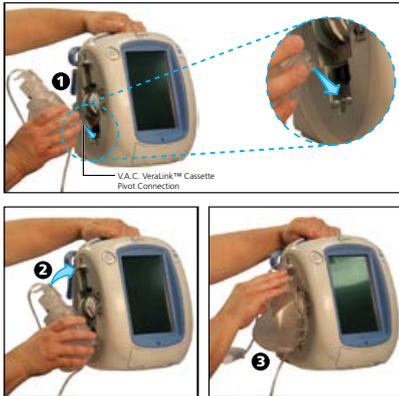


7. Ausziehen / Verlängern der Lösungshalterung

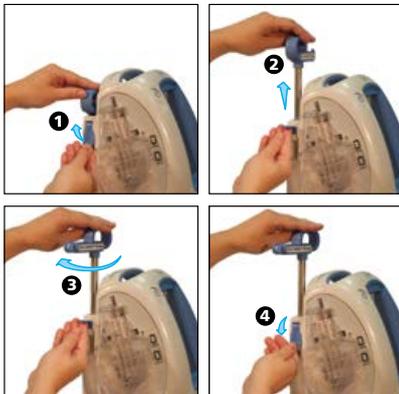


8. Anbringen der topischen Lösung mithilfe des VERALINK™-Spikes



9. Einsatz des 500 ml oder 1000 ml Kanister

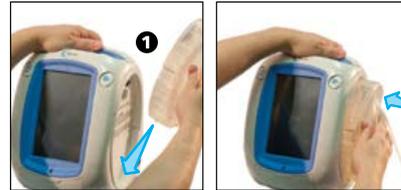

10. Kanisterschlauch anschließen (nachdem der Verband angelegt wurde) Ineinanderdrücken und drehen

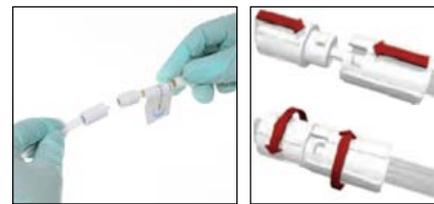

Instillationsschlauch mit dem V.A.C.® Therapy Schlauch verbinden.
Hinweis: Ausführliche Informationen zur Verbandsanlage entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

V.A.C. VERAFLU™ Therapy aktivieren

Ein-/ Ausschalttaste gedrückt halten, bis das grüne Licht erscheint (mind. 3 Sek.)



Therapie auswählen	Bestätigen der Bildschirmeinstellungen	SEAL CHECK™ Leckage Detektor	Füllhilfe	Füllhilfe	Startbildschirm V.A.C. VERAFLU™ Therapy
<p>V.A.C. VERAFLU™ Therapy wählen.</p>	<p>Mit OK die Standardinstellungen bestätigen.</p>	<p>Leckageprüfung startet.</p>	<p>Start / Stop wählen, um die Lösung ins Wundbett zu fördern.</p>	<p>Beenden der Füllhilfe durch Drücken auf Start / Stop. Mit OK bestätigen, wenn Sie mit dem Instillationsvolumen zufrieden sind.</p>	<p>V.A.C. VERAFLU™ Therapy startet.</p>



Die Farbe des Dressings bleibt zu Beginn unverändert.



Beenden Sie die Füllhilfe, sobald die Instillationslösung am V.A.C. VERAFLO™ Pad sichtbar ist.

Hinweis: Wenn ein Alarm nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an einen medizinischen Fachmann oder 3M + KCI.

Hinweis: Für diese Produkte gibt es bestimmte Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise. Bitte kontaktieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt und lesen Sie die Produktanweisung. Dieses Material ist nur für medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

© 2020 3M. Alle Rechte vorbehalten. 3M und die anderen abgebildeten Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unerlaubter Gebrauch verboten. PRA-PM-AT-00167 (11/20)

3M + KCI™