



Anlage der V.A.C.[®] Dressings

Für Wunden ohne freiliegende Gefäße, Organe, Sehnen und Nerven

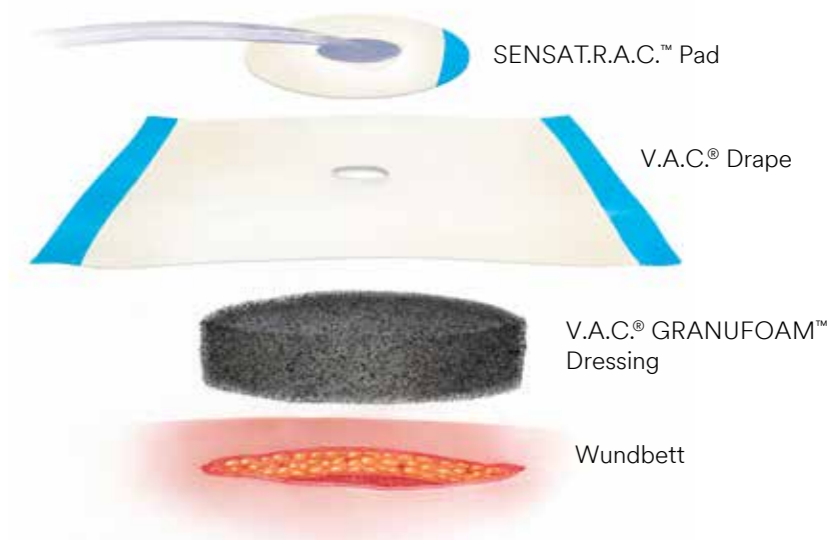


STEP 1 - Wundgröße und -typ beurteilen

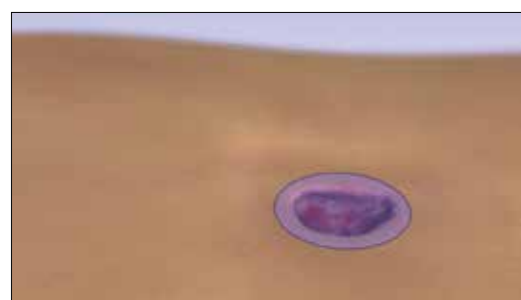


Wundbett vorbereiten.

STEP 2 - Dressing wundgerecht zuschneiden.

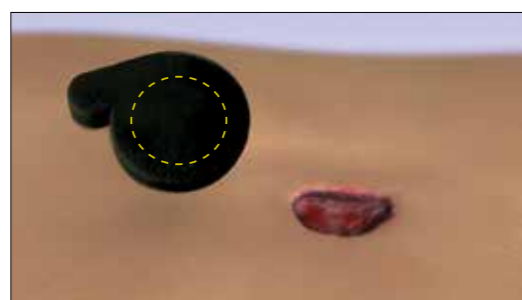

Das Dressing nicht über der Wunde zuschneiden, da sonst einzelne Schaumpartikel in die Wunde gelangen können.

STEP 3 - Dressing im Wundbett platzieren.

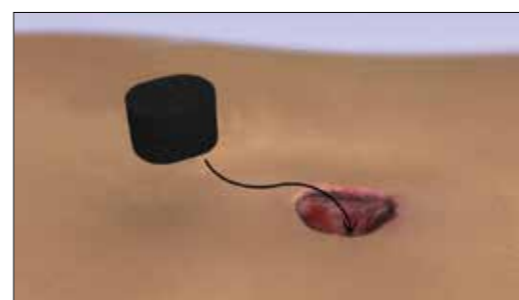


Anzahl der Schaumstücke in der Wunde notieren.

STEP 4 - V.A.C.® Folie zuschneiden.



Entfernen Sie Lage 1 und platzieren Sie die klebende Seite über der Wunde. Nun entfernen Sie die verbleibende Seite der Lage 1, die grüne Stabilisierungsschicht der Lage 2. und die perforierten blauen Seiten

STEP 5 - SENSAT.R.A.C.™ Pad anlegen

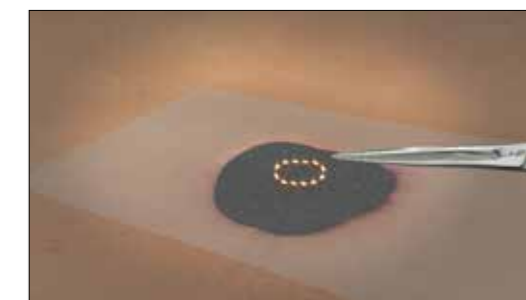


STEP 6 - Folie anheben und ein 2,5 cm großes Loch in die Folie schneiden




Empfehlung der Lochgröße: 2€-Münze.

STEP 7 - Lage 1 und 2 vom SENSAT.R.A.C.™ Pad entfernen

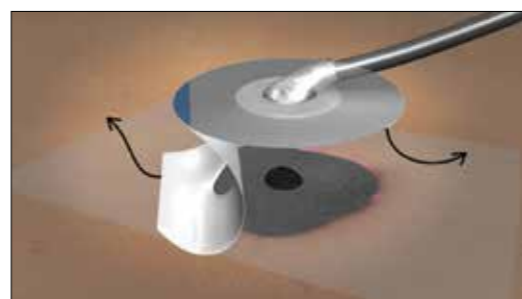

STEP 8 - SENSAT.R.A.C.™ Pad direkt über dem Loch platzieren

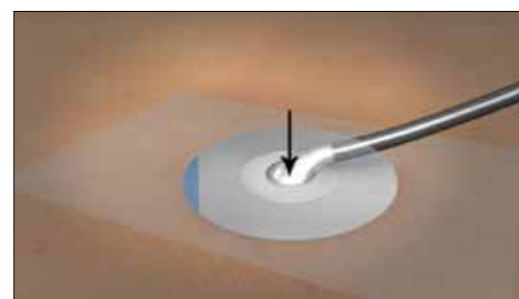

Ziehen Sie an der blauen Stabilisierungsschicht und entfernen diese. Tragen Sie das Datum und die Anzahl der Schäume auf die Folie oder dem Wundlineal ein.

STEP 9 - SENSAT.R.A.C.™ Pad Schlauch mit dem Kanisterschlauch verbinden



STEP 10 - V.A.C.® Therapy Unit einschalten



Stellen Sie die vom Arzt vorgeschriebenen Therapieeinstellungen ein, um die Therapie einzuleiten.

Bitte lesen Sie vor Anlage ausführlich die jeweiligen Informationen zum Dressing, die jedem Karton beiliegen und die V.A.C.® Therapy Klinischen Richtlinien durch. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren KCI Ansprechpartner.

Gebrauchsanweisung und Sicherheitsinformationen: Dies ist eine Kurzreferenz, die die grundlegenden Schritte einer typischen Verbandsanlage zeigt. Wie bei jedem Gerät ist es wichtig, die detaillierten Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsinformationen (einschließlich Informationen zu freiliegenden Gefäßen, Organen, Sehnen, Nerven und Infektionen) zu lesen und zu verstehen, die für Ihre VAC®-Therapieeinheit und die Verbandsanlage gelten (s. Informationen beiliegend der Therapieeinheit, dem Einwegkarton oder in den VAC® Therapy Klinische Richtlinien). Dieses Material ist für medizinisches Fachpersonal bestimmt.

HINWEIS: Für KCI-Produkte und -Therapien gibt es spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt und befolgen Sie die Produktanleitung. Dieses Material ist für medizinisches Fachpersonal bestimmt.