
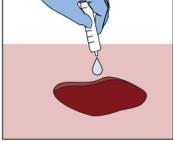
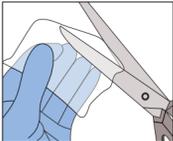
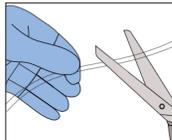
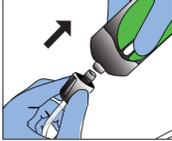
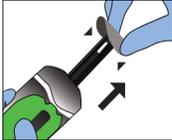
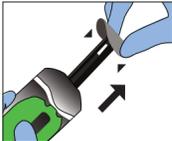
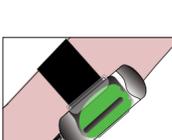


Méthode d'application


- 1 Préparer le lit de la plaie et la peau périlésionnelle en suivant le protocole hospitalier, puis irriguer minutieusement le lit de la plaie avec une solution saline normale. 
- 2 Si nécessaire, appliquer un produit de protection cutanée sur la peau entourant la plaie et laisser sécher. 
- 3 Si nécessaire, découper sur une seule couche un pansement non adhérent à larges mailles de la taille de la plaie, puis le placer sur le lit de la plaie. 
- 4 Découper l'interface en mousse afin qu'elle corresponde à la taille et à la forme de la plaie. 
- 5 Placer l'interface en mousse dans la cavité de la plaie. Noter que l'interface en mousse doit remplir la cavité et s'étendre au-delà des contours de la plaie. 
- 6 Si nécessaire, retirer l'hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™ de l'emballage. Décoller la protection anti-adhésive des deux côtés. 
- 7 Si nécessaire, modeler, étirer, comprimer ou rouler doucement l'hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™ afin qu'il s'adapte aux contours extérieurs de la plaie, en laissant environ 1 cm de peau intacte entre la marge de la plaie et l'hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™. 
- 8 Retirer le dessous et placer le pansement moderne SNAP™ sur la plaie avant de sceller. 
- 9 Si nécessaire, couper la tubulure du pansement à angle droit, à la longueur souhaitée. 
- 10 Insérer entièrement le raccord dans la tubulure. 
- 11 Connecter la cartouche de thérapie SNAP™ au raccord de la tubulure à l'aide des deux mains. 
- 12 Activer la cartouche SNAP™ : appuyer sur la clé d'activation/réinitialisation afin de la libérer, puis retirer la clé de la cartouche SNAP™. Selon la taille du pansement, la cartouche peut nécessiter plusieurs amorçages. 
- 13 Contrôler le fonctionnement de la pression négative. Le système SNAP™ fonctionne correctement si :
 - l'indicateur de capacité vert est visible et stationnaire dans la fenêtre de la chambre ;
 - le pansement présente un aspect « aspiré » ;
 - le pansement est dur au toucher.
- 14 Fixer la cartouche SNAP™ à un membre ou à la ceinture du patient à l'aide de la sangle de thérapie SNAP™ (le cas échéant). 

Conseils et astuces pour les zones anatomiques difficiles


Application au niveau du talon

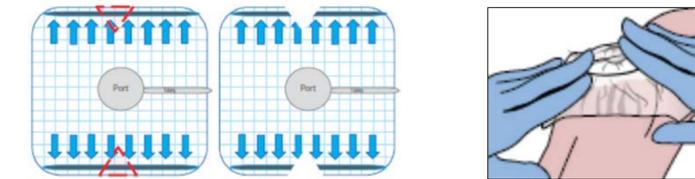


Application au niveau de l'orteil I

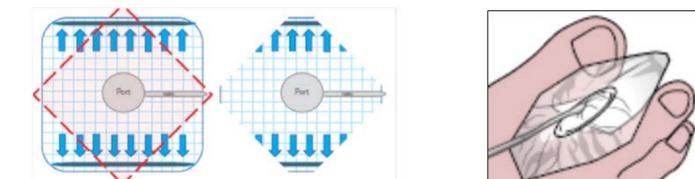

Application au niveau de l'orteil II

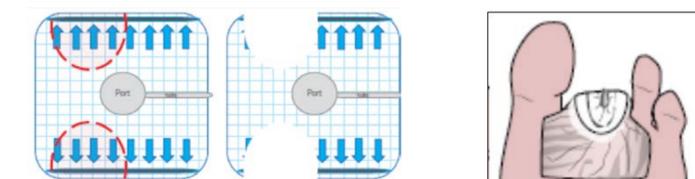

Amputation transmétatarsienne :

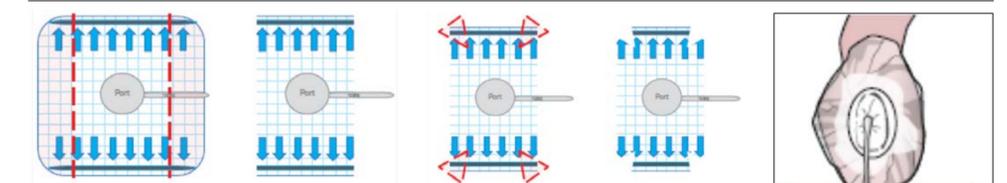

Renseignements pour les commandes

Cartouche de thérapie SNAP™				Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™	Kit de pansement pour dérivation SNAP™	Sangle de thérapie SNAP™	Sangle de thérapie SNAP PLUS™	Kit de pansement moderne SNAP™		
										
REF : SNPA125P Pression : -125 mmHg Capacité : 150 mL	REF : SNPA125 Pression : -125 mmHg Capacité : 60 mL	REF : SNPA100 Pression : -100 mmHg Capacité : 60 mL	REF : SNPA075 Pression : -75 mmHg Capacité : 60 mL	REF : SRNG10 Taille : 5 cm de diamètre	REF : BKTF14X11 Taille : 14 cm x 11 cm Interface : Mousse REF : BKTF14X11S Taille : 14 cm x 11 cm avec hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™ Interface : Mousse	REF : STPAS Taille : Petit format 46 cm REF : STPAM Taille : Moyen format 53 cm REF : STPAL Taille : Grand format 61 cm	REF : STPASP Taille : Petit format 46 cm REF : STPAMP Taille : Moyen format 53 cm REF : STPALP Taille : Grand format 61 cm	REF : SKTF10X10 Taille : 10 cm x 10 cm Interface : Mousse réticulée à pores ouverts (bleue)	REF : SKTF15X15 Taille : 15 cm x 15 cm Interface : Mousse réticulée à pores ouverts (bleue)	REF : SKTF20X20 Taille : 20 cm x 20 cm Interface : Mousse réticulée à pores ouverts (bleue)

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local.

REMARQUE : il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité particulières à ces produits et aux thérapies. Veuillez consulter un clinicien et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

SNAP™ Therapy Cartridges sont produits de classe IIa. SNAP™ Therapy Dressings sont produits de classe IIb. SNAP™ SNAP™ SecurRing™ Hydrocolloid est un produit de classe Is. SNAP™ Therapy Strap est un produit de classe I. Organisme notifié: BSI 2797.

© 2020 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques mentionnées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation interdite sans autorisation. PRA-PM-FR-00220 (12/20)