

医療用品 (04) 整形用品  
高度管理医療機器 陰圧創傷治療システム JMDN 20395000  
「InfoV.A.C.治療システム」の付属品  
(Y字連結管)

再使用禁止

\*【禁忌・禁止】

使用方法


- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

\*【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品はケーシーアイ社製陰圧創傷治療システムで使用する連結チューブを2本接続するための付属品である。

2. 外観図

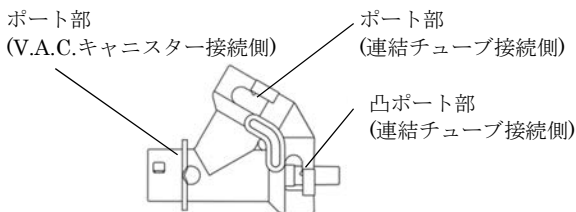

(サイズ) 全長: 34mm(突起部含む)

【使用目的又は効果】

適応疾患に対して、管理された陰圧を付加し、創の保護、肉芽形成の促進、滲出液と感染性老廃物の除去を図り、創傷治癒の促進を目的とする。

適応疾患:


既存治療に奏効しない、或いは奏効しないと考えられる難治性創傷

\*【使用方法等】

詳細は組み合わせて使用する医療機器の各添付文書及び取扱説明書を参照すること。

1. Y字連結管の使用方法

- 1) フォーム、V.A.C.ドレープ、連結チューブを適用後、本体にV.A.C.キャニスターを装着し、Y字連結管のポート部(V.A.C.キャニスター接続側)にV.A.C.キャニスターのチューブを接続する。
- 2) ポート部(連結チューブ接続側)及び凸ポート部(連結チューブ接続側)に連結チューブを接続する。

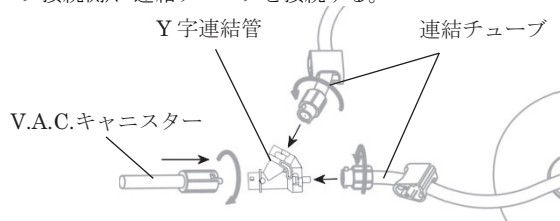

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 2か所の創傷に適用した連結チューブのうち、凸ポート部が接続された連結チューブ側のみ閉塞アラームが作動することに留意し、2か所の創傷部位の観察を日常的に行うこと。
- 2) 本体1台につき、Y字連結管を2個以上つなげて使用しないこと。
- 3) Y字連結管は1週間に1回以上交換すること。

\*【使用上の注意】

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

- 以下の創傷部を接続する場合において、Y字連結管を使用しないこと。
- ・感染が疑われる創(感染症状を軽快させた創も含む)と非感染創
  - ・病因の異なる創傷
  - ・異なる陰圧設定が必要な創傷
  - ・皮膚移植部位および皮弁部位

2. 重要な基本的注意

- 1) 本治療は、実質的な治療を2時間以上中断しないこと。再開する場合は、未開封の滅菌済パッケージから取り出した新しいY字連結管を使用すること。
- 2) 本品を下記のケーシーアイ社製陰圧創傷治療システム以外のY字連結管として使用しないこと。
  - ・ V.A.C.治療システム
  - ・ ActiV.A.C.治療システム
  - ・ InfoV.A.C.治療システム
  - ・ V.A.C.Ulta 治療システム

\*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温多湿の場所を避け、室温保存。

2. 有効期間

製品包装に記載。

3. 保管上の注意事項

- 1) 液体のかからない場所に保管すること。
- 2) 気圧・温度・湿度・風通し・日光に留意し、ほこり・塩分・イオウ分などを含む空気などにより悪影響の生じるおそれの無い場所に保管すること。
- 3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ケーシーアイ株式会社

電話 0120-897-706

製造業者:

ケーシーアイ ユーエスエー インク(米国)

KCI USA, INC.