

ADAPTIC™

NON-ADHERING DRESSING

Comfortable **easy** **to apply** and remove

装着と交換が容易で、快適な指専用ドレッシング材



アダプティック®フィンガー/トーについて

特殊な微粘着シリコンでコーティングされた素材と筒状包帯を一体化した、手指・足趾専用のドレッシング材です。



快適性

アダプティック®フィンガー/トーは、創傷への固着が少なく、かさばりにくいため、装着中の指の動きに影響を与えにくく快適です。




装着時・交換時の利便性

アダプティック®フィンガー/トーは、装着の際に剪刀やその他の器具を必要とせず、簡単にスピーディーに装着できます。また、交換時に創面に固着しにくいため、二次損傷を起こしにくく、容易に除去できます。

使用方法

手指または足趾のサイズに合わせてアダプティック®フィンガー/トーを選択します。創周囲の健常皮膚が乾いていることを確認します。

貼付方法

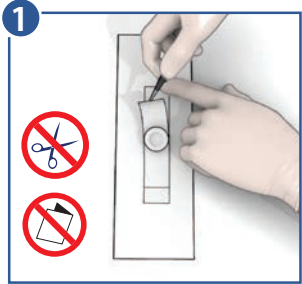

アダプティック®フィンガー/トーを光沢がある剥離紙より取り外します。

貼付方法




非固着性シリコンレイヤーで創面を被覆できるような位置を定め、指趾先端部に筒状包帯部分を当てた後、シリコンレイヤーでやさしく創部を被覆します。

1層目の筒状包帯をおろし、非固着性シリコンレイヤー部分を被覆します(必要に応じ吸収性ドレッシング材を間に挟んでください)。

続いて2層目の筒状包帯をおろし、固定・保護します。

交換について

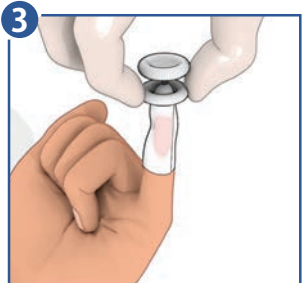

創傷の状態、滲出液の量に応じて交換頻度を決定してください。

交換の際は、外側、内側の筒状包帯を順番にゆっくりと巻き上げます。

続いて非固着性シリコンレイヤーを愛護的に除去してください。

アダプティック®フィンガー/トー (足趾用)



使用目的又は効果

非固着性ドレッシング材アダプティック®フィンガー/トーは、手指・足趾において以下のような創傷が適応となります。

- 裂傷、擦過創
- 外傷
- 抜爪を行った創
- 縫合創

アダプティック®フィンガー/トーは、創傷治療を目的とした一次被覆、固定を目的とした二次被覆にご使用いただけます²⁾。

交換時の
利便性

臨床評価において、

96%

の患者様が、アダプティック®フィンガー/トーは交換が容易、又は非常に容易であると回答しました。

アダプティック®フィンガー/トー

直径	非固着性シリコンレイヤーサイズ	入り数/箱	製品番号
S 直径2cm	2.0 x 7.6cm	10	MAD003JP
M 直径2.4cm	3.0 x 12.7cm	10	MAD013JP
L 直径2.8cm	3.0 x 12.7cm	10	MAD023JP
XL 直径3.0cm	3.0 x 12.7cm	10	MAD042JP
足趾 直径2.8cm	4.0 x 7.6cm	10	MAD062JP

販売名: アダプティックドレッシング
管理医療機器: 非固着性創傷被覆・
保護材
医療機器認証番号:
225ADBZIO0114000
JMDNコード: 11325000
滅菌方法: ガンマ線滅菌
[使用目的、効能又は効果]
創部の保護及び固着防止に用い
ること。

[保険適用]
非固着性シリコンガーゼ
(アダプティックドレッシング)
凹凸部位用
保険請求: 償還価格による。

*再使用禁止
*再滅菌禁止
使用上の注意などは添付文書をご
参照ください。

References
1. Whittaker S. A dressing for the occasion? A comparative trial of two dressings for digit injuries. *Professional Nurse Magazine*, 1994 Aug; 729-732. 2. ADAPTIC™ DIGIT case study, 2812 November 2012.

選任製造販売元

ケーシーアイ株式会社

<http://www.kcij.com>

NOTE: Specific indications, contraindications, warnings, precautions and safety information exist for these products and therapies. Please consult a clinician and product instructions for use prior to application. This material is intended for healthcare professionals.

©Copyright 2020 3M. All Rights Reserved. 3M and the other marks shown are marks and / or registered marks. Unauthorized use prohibited. PRA-PM-JP-00022 (07/20) 2020年7月作成
®はKCIの登録商標です。

3M + KCI™